

Manual del usuario**Sillón de Masajes : MR380**

Categoría: maquinaria y electrodomésticos

Designación general: Sillón de masaje eléctrico para el hogar

**Antes de su uso**


- INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .. 2
- Ubicar el sillón de masajes 9
- Antes del uso 11
- Estructura del producto 15

Como usarlo

- Instrucciones de operación..... 19

Métodos de revisión y mantenimiento

- Limpieza y mantenimiento 22
- Solución de problemas..... 23
- Especificaciones del producto..... 24

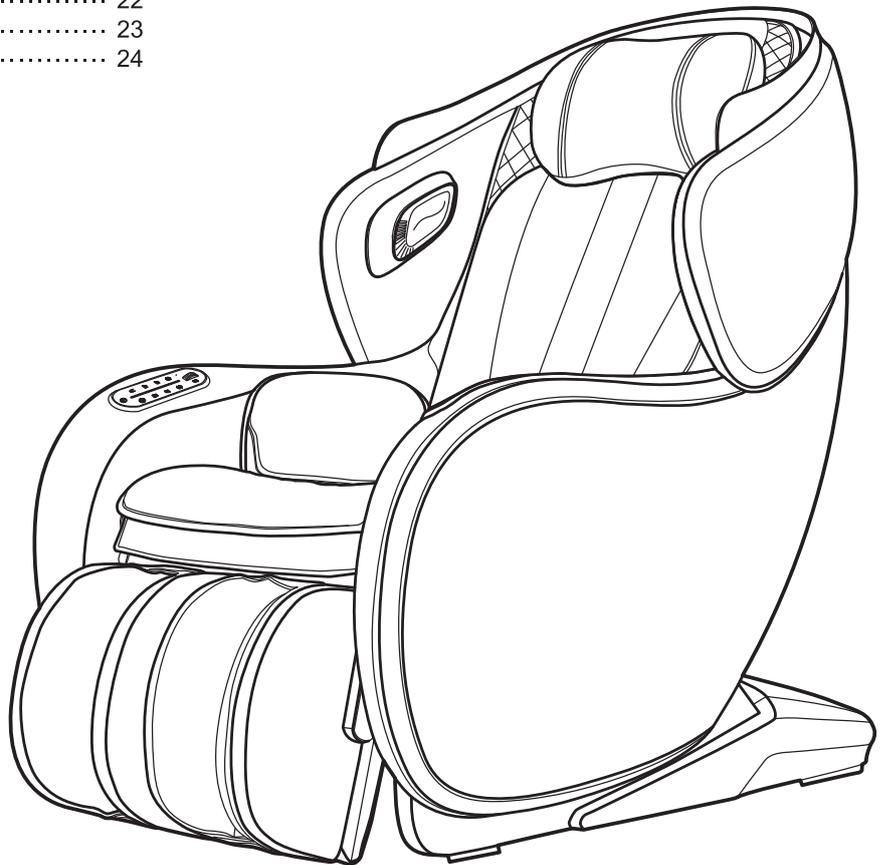**Propósito de uso, efecto-eficacia**

Sustituto de masaje para uso doméstico

- Muchas gracias por adquirir la silla de masaje Fujiiryoki.
- Lea detenidamente este manual de operación antes de usarla y utilícela sólo como se indica.
- Por favor, lea las precauciones de seguridad en las páginas 2-7 antes de usarla.
- Mantenga este manual de operación en un lugar donde esté fácilmente accesible para futuras referencias.
- Recicle el material del embalaje exterior cuando sea posible.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas "Instrucciones Importantes de Seguridad" antes de usar y utilice este producto de manera adecuada.
- Estas instrucciones importantes de seguridad están prescritas para garantizar el uso correcto del producto y prevenir lesiones y daños al usuario y a otras personas.
- A continuación se presentan las señales de prohibición y las instrucciones obligatorias.
- Cumpla con estas regulaciones, ya que son instrucciones importantes para su seguridad.

 PELIGRO	El uso inadecuado puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
 ADVERTENCIA	El uso inadecuado puede provocar lesiones o daños a la propiedad.*

	<p>⊘ Acciones prohibidas La acción prohibida se muestra dentro de la ilustración. (por ejemplo, la ilustración de la izquierda se refiere a "Prohibición de desmontaje")</p>
	<p>● Directivas, acciones que son obligatorias. La acción prohibida está ilustrada dentro de la ilustración. (por ejemplo, la ilustración de la izquierda se refiere a "desconectar el enchufe")</p>

- Guarde siempre este manual de operación en un lugar donde esté disponible para su consulta.
- Atención: Al desechar este producto y/o sus accesorios, hágalo de acuerdo con las normas y regulaciones locales. Para obtener más información, consulte con su autoridad local.


PELIGRO

	<p>Debido a que este equipo tiene un calentador incorporado y la superficie se calienta, las personas que no son sensibles al calor deben prestar atención al usarlo. Presta mucha atención en los siguientes casos: Personas mayores o enfermas, o aquellas que no pueden operar el equipo por sí mismas. Personas que han tomado medicamentos que causan somnolencia (por ejemplo, pastillas para dormir, medicamentos para el resfío). Personas que han consumido alcohol en exceso o están extremadamente cansadas. Personas con trastornos hematógenos (por ejemplo, diabetes). Personas que tienen una recomendación médica. Personas con sensibilidad reducida al calor. Existe un riesgo de quemaduras a baja temperatura y deshidratación.</p>
	<p>Las siguientes personas deben consultar a un médico antes de usar este producto: Personas que utilizan un dispositivo electrónico médico en el cuerpo, como un marcapasos, susceptible a perturbaciones electromagnéticas. Personas con tumores malignos. Personas con enfermedades cardíacas. Personas que estén embarazadas o inmediatamente después del parto. Personas que sufren de parestesias relacionadas con trastornos circulatorios periféricos debido a la diabetes, etc. Personas con heridas en la piel. Personas que necesitan reposo. Personas con pérdida sensorial de temperatura. Personas con una temperatura corporal superior a 38°C (cuando se observan síntomas de inflamación aguda, malestar, escalofríos, fluctuaciones de la presión arterial, o cuando están debilitadas). Personas con hernias de disco. Personas con tendovaginitis. Personas que padecen de osteoporosis, fracturas en la columna vertebral o dolores agudos. Personas con anomalías en la columna vertebral o aquellas con la columna desviada. Personas que sienten una anomalía en el cuerpo no mencionada anteriormente o que estén bajo tratamiento médico.</p>



PELIGRO

Si el sillón deja de moverse o ocurre alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y contacte a su proveedor para revisión. Pueden ocurrir electrificación, cortocircuitos o incendios.

Tenga cuidado con los movimientos de los rodillos cuando realice masajes alrededor del cuello. Evite masajear en exceso o masajear la parte frontal del cuello. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.

Al reclinar o bajar el apoya piernas, siempre revise debajo y alrededor del apoya piernas por personas, mascotas u otros objetos. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.

Al reclinar o bajar el apoya piernas, tenga cuidado de no atrapar las manos, dedos, pies o cabeza debajo del apoya piernas o del respaldo.

Debajo del mismo sillón. Respaldo, asiento, espacio libre del apoyabrazos. Espacio libre del apoya piernas, asiento, apoyabrazos. Debajo del apoya piernas, la parte trasera del apoya piernas. Espacio entre el brazo y el apoyabrazos. Detrás del respaldo. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.

Antes de usar, revise debajo de la almohadilla del respaldo para asegurarse de que no haya rasgaduras o desgarros en la tela de la cubierta del respaldo. (Si hay algún rasgón o desgarro, sin importar cuán pequeño sea, suspenda inmediatamente su uso, desconecte el cable de alimentación y solicite reparaciones). El uso continuo con rasgaduras o desgarros en la tela del respaldo del asiento puede causar descargas eléctricas o lesiones.

Desenchufe siempre este aparato de la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

No use el calentador en el mismo lugar del cuerpo durante mucho tiempo. Si el calor se usa en el mismo punto durante un período prolongado, pueden ocurrir quemaduras a baja temperatura incluso si la temperatura es relativamente baja (entre 40-60°C).

Sobre las quemaduras a baja temperatura:

- Las quemaduras a baja temperatura afectan la parte profunda de la piel y presentan manchas rojas o ampollas.
- En caso de encontrar manchas rojas o ampollas, consulte inmediatamente a un médico.

Se recomienda encarecidamente a las siguientes personas que no utilicen este producto. Algunas prohibiciones requieren la evaluación de un médico: (por ejemplo, aquellos que sufren de trombosis, aneurisma grave, venas varicosas agudas, varios tipos de dermatitis e infecciones cutáneas, incluidas inflamaciones del tejido subcutáneo, etc.)

No retire, rasgue o corte la cubierta de la silla (respaldo, apoya piernas) a propósito. Nunca use la silla con la cubierta removida o rasgada, ya que la ropa o el cabello pueden quedar atrapados en los rodillos de masaje.

No use el sillón con voltaje diferente al designado. Pueden ocurrir incendios o descargas eléctricas.

No use el sillón si el cable de alimentación o su enchufe están dañados, o si el tomacorriente está flojo. Contacte a su proveedor para reparaciones si el cable de alimentación o el enchufe están dañados de alguna manera. El uso continuo puede resultar en descargas eléctricas, cortocircuitos o incluso incendios.

Asegúrese de enchufar el cable de alimentación completamente y manténgalo alejado del polvo. No hacerlo puede causar daños, incendios o descargas eléctricas.

No permita que niños sin supervisión o personas que no puedan expresar sus intenciones utilicen éste sillón. No permita que los bebés se acerquen al sillón. Pueden ocurrir descargas eléctricas o lesiones.

No permita que los niños jueguen o se suban a la silla. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.

No conecte ni desconecte el enchufe de alimentación con las manos mojadas. Pueden ocurrir descargas eléctricas.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



PELIGRO

	Nunca utilice alfileres u otros sujetadores metálicos con este aparato.
	Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. Deseche el aparato si la cubierta muestra algún signo de deterioro, como ampollas o grietas.
	No lo use ni almacene en baños o lugares de alta humedad o humedad. Pueden producirse electrificación, incendios, accidentes y moho.
	Nunca remodele ni descomponga/repare usted mismo. Podría producirse un incendio o lesiones debido a una acción anormal.



ADVERTENCIA

	El uso de este producto debe limitarse a 30 minutos por cada uso. El uso continuo en la misma parte del cuerpo debe limitarse a 5 minutos. El uso prolongado puede dañar músculos y nervios. (Úselo solo por 30 minutos al día).
	Las siguientes personas deben consultar a un médico antes de usar este producto: <ul style="list-style-type: none"> • Personas cuyos músculos se han debilitado debido a la edad avanzada o que son de contextura delgada. • Personas que sufren de dolor lumbar causado por huesos u órganos internos. • Personas que se magullan fácilmente o son propensas a esguinces. • Personas que sufren de mareo intenso por el movimiento. • Personas que han sido sometidas a operaciones de órganos internos o del corazón.
	Si aparece alguna erupción, enrojecimiento de la piel, picazón o síntomas similares después de usar este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico. Pueden ocurrir accidentes o problemas de salud.
	El sillón nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, y antes de colocar o quitar piezas. Para desconectar, ponga el interruptor de corriente en posición apagada, luego retire el enchufe de la toma. Esto puede evitar accidentes por travesuras de los niños.
	Use el sillón en una superficie nivelada. No lo use en exteriores. Pueden ocurrir daños o accidentes.
	Asegúrese de que los botones de operación y los temporizadores estén funcionando normalmente antes de usarlo. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Lea nuevamente el manual de operaciones y confirme que el producto esté funcionando normalmente antes de usar el sillón después de un período prolongado de no uso. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Confirme que ningún objeto quede atrapado en el sillón (respaldo, apoya piernas, apoyabrazos) antes de usarlo. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna apertura. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	No coloque los pies o las manos en el apoya piernas cuando esté retrayéndose. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Si aparece o siente alguna anomalía física durante la operación, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico.
	Siéntese lentamente después de confirmar que los rodillos de masaje están en la posición de almacenamiento. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Use un masaje de estimulación suave cuando comience a usarlo. Puede ocurrir una lesión.



ADVERTENCIA



Asegúrese de que la terminal de tierra esté instalada. Pueden ocurrir daños o electrificación si la terminal de tierra no está instalada.



Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente en caso de cortes de energía. Cuando se restablece la energía, pueden ocurrir accidentes.

Desenchufe el cable de alimentación sosteniendo el enchufe real y no el cable. Esto puede causar electrificación, cortocircuitos o incendios.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no esté usando el sillón. Esto puede causar un incendio debido a la degradación del aislamiento por polvo o humedad.

Al hacer mantenimiento en el sillón, siempre desenchufe el cable de alimentación. Esto puede causar electrificación o lesiones.



Nunca opere el aparato con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabello y similares.

Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.

Para desconectar, ponga el interruptor de corriente en la posición de apagado, luego desenchufe de la toma de corriente.

El sillón está destinado para uso doméstico.

Las temperaturas suficientemente altas para causar quemaduras pueden ocurrir independientemente del ajuste del control. No lo use en un bebé o inválido o en una persona dormida o inconsciente. No lo use en pieles sensibles ni en personas con mala circulación sanguínea. Revise frecuentemente la piel en contacto con la zona calefaccionada del aparato para reducir el riesgo de ampollas.

No aplaste - Evite dobleces agudos.

No dañe el cable de alimentación ni el enchufe.

●No lo maltrate ●No lo dañe ●No lo procese ●No lo doble ni tire excesivamente ●No lo tuerza ●No lo ate ●No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ●No permita que el cable de alimentación quede atrapado, especialmente al mover el sillón.

Nunca opere este aparato si el cable o enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.

El uso continuado puede resultar en descargas eléctricas, cortes o incluso incendios.

No lo use inmediatamente después de comer o consumir alcohol. Pueden ocurrir náuseas, enfermedades, accidentes o lesiones.

No lo use cerca de estufas u otras fuentes de fuego, ni fume mientras usa el sillón. No lo use en alfombras calefaccionadas ni con otros equipos de calefacción. No lo use bajo mantas o almohadas. El calentamiento excesivo puede ocurrir y causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Esto puede causar incendios.

No se pare sobre el asiento, ni se suba al respaldo, apoya piernas, brazos o zona de hombros de el sillón. El usuario o el sillón pueden volcarse y producir lesiones o accidentes.

No se siente ni se pare sobre la parte superior del respaldo, la parte delantera del asiento o en el apoya piernas cuando el sillón esté reclinado. El usuario o el sillón pueden volcarse y producir lesiones o accidentes.

No intente sentarse o levantarse del sillón cuando esté reclinado o el apoya piernas esté elevado. El usuario o el sillón pueden volcarse y producir lesiones o accidentes.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA



No utilice accesorios distintos a los que acompañan al sillón. Si lo hace, podría causar un mal funcionamiento del producto.

No utilice el sillón si lleva pendientes, collares, bufandas u otros adornos, ya que podría sufrir lesiones.

No utilice el sillón si lleva objetos duros en la cabeza, como adornos para el pelo, ya que pueden provocar lesiones.

No utilice el masajeador de muslos o caderas con objetos duros en los bolsillos. Esto puede provocar accidentes o lesiones.

No lo utilice desnudo. Los masajes directos sobre el cuerpo desnudo pueden dañar la piel.

No lo use en las zonas de los codos, las rodillas, la cabeza o el abdomen. No deje que las manos o los pies queden atrapados en los rodillos. Podrían producirse lesiones.

No desconecte el cable de alimentación ni apague el interruptor mientras utiliza el sillón. Esto puede provocar accidentes o lesiones.

No duerma mientras utiliza el sillón. Esto puede provocar problemas de salud o lesiones.

No mueva el sillón si hay personas o elementos sobre él. Pueden producirse daños o lesiones.

Asegúrese de que no haya más de una persona en el sillón a la vez. Si lo hace, podría dañar el sillón o provocar lesiones.

No limpie con bencina, disolvente de pintura ni alcohol, ni rocíe con ningún aerosol farmacéutico, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No debe utilizarse para otros fines que no sean el masaje, ya que podría causar daños o accidentes.

No utilice otros equipos terapéuticos mientras utiliza este producto. Esto puede provocar problemas de salud o accidentes..

No transporte el sillón ni lo mueva con las ruedas sobre el suelo, ya que se raya fácilmente.

No vuelque el sillón ni lo someta a golpes fuertes. Podrían producirse daños o lesiones.

No lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.

Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

No transporte este aparato sujetándolo por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.

Nunca utilice el aparato con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, cabellos y similares.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.



ADVERTENCIA



Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Utilice las superficies de calor con cuidado. Puede provocar quemaduras graves. No utilice el producto sobre zonas de piel sensibles o en presencia de mala circulación. El uso desatendido del calor por parte de niños o personas discapacitadas puede ser peligroso

Mantenga a los niños alejados del soporte extendido para los pies, del soporte para la espalda (u otras partes similares).

Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Por favor, no escuches a un volumen muy alto.
Escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo puede dañar su audición.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Instrucciones de puesta a tierra

! PELIGRO


La conexión incorrecta del conector a tierra del equipo puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto; si no encaja en la toma de corriente, solicite la instalación de una toma adecuada por un electricista calificado.

! ADVERTENCIA

La conexión a tierra debe estar instalada firmemente. Si no está instalada, puede causar una descarga eléctrica en caso de problemas o cortocircuitos.

- ※ Este producto debe estar conectado a tierra. Si presenta un mal funcionamiento o falla, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra conforme a todos los códigos y reglamentos locales.

Métodos de conexión a tierra

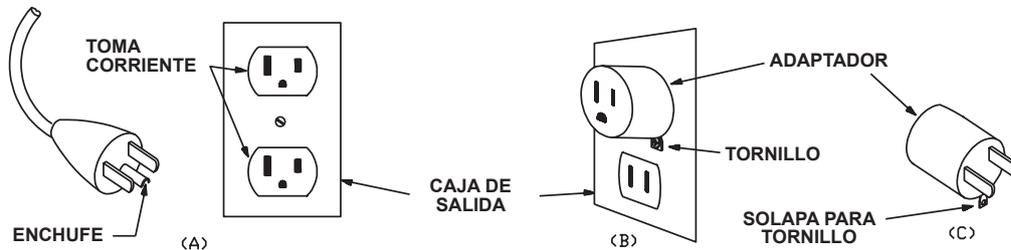

- ※ Este producto está diseñado para usarse en un circuito nominal de 220-240 V y tiene un enchufe con conexión a tierra similar al ilustrado en el dibujo A. Un adaptador temporal similar al ilustrado en los dibujos B y C puede usarse para conectar este enchufe a un receptáculo de 2 polos, como se muestra en el dibujo B, si no se dispone de una toma de corriente con conexión a tierra adecuada. El adaptador temporal debe usarse solo hasta que un electricista calificado instale una toma de corriente con conexión a tierra adecuada (dibujo A). La oreja rígida verde, lengüeta o cable que se extiende desde el adaptador debe conectarse a una conexión a tierra permanente, como una cubierta de caja de tomacorriente con conexión a tierra adecuada. Siempre que se utilice el adaptador, debe mantenerse en su lugar con un tornillo de metal.

Cuando no hay una terminal de tierra en el tomacorriente


Antes de la compra, consulte con una tienda de electricidad, distribuidor o electricista y realice la conexión a tierra.

Ubicar el sillón de masajes

Espacio requerido para la instalación

Asegúrese de que haya suficiente espacio para que el sillón masajeador se incline, y que la parte posterior del sillón esté al menos 35 cm alejada de la pared.

No exponga el sillón a la luz solar directa ni a ambientes de alta temperatura (como frente a equipos de calefacción).
Al colocar una alfombra plana, el tamaño debe ser suficiente para cubrir el área donde la máquina entra en contacto con el suelo y el área donde los pies entran en contacto con el suelo.

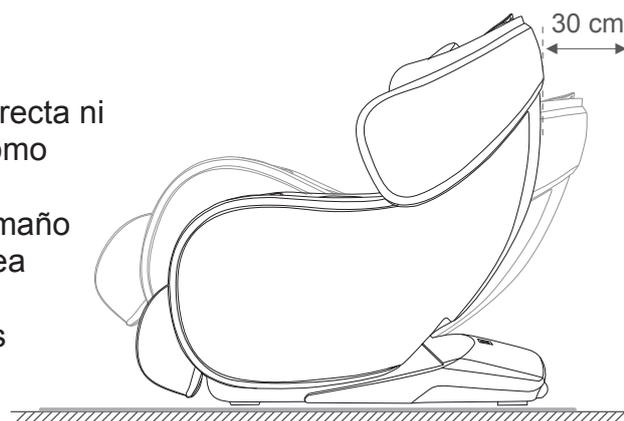


Cómo levantar el sillón masajeador

Sostenga los lados inferiores del soporte del sillón y luego levante y mueva. Dado que la máquina es pesada, tenga cuidado al transportarla para evitar esfuerzos en la espalda. (Esta máquina debe ser transportada por dos o más personas).

1- Levante el sillón para moverlo sobre superficies frágiles como pisos de madera.

2- Al moverlo sobre un piso de madera, se recomienda levantar el sillón para evitar daños en el suelo causados por las ruedas. Cuando levante y mueva el sillón a una posición designada y lo baje, tenga cuidado de no colocar las manos ni los pies debajo para evitar lesiones graves. No suelte la máquina hasta que esté completamente en posición plana para evitar daños en el suelo.

Se recomienda colocar alfombras u otros protectores en el suelo.

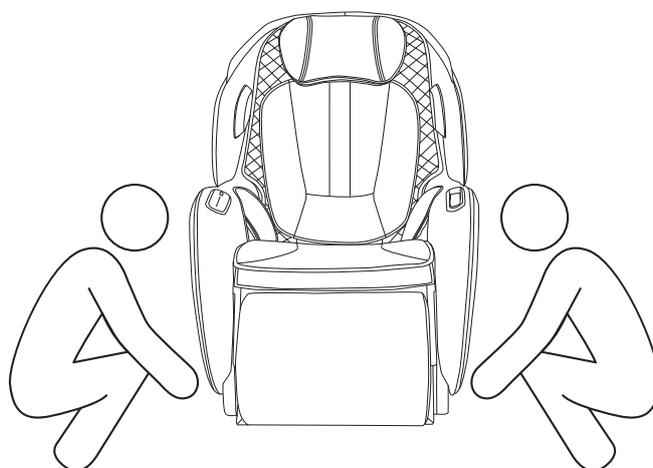

Ubicar el sillón de masajes

Cómo mover el sillón masajeador por una persona

Use las ruedas traseras para mover el sillón. Según el método mostrado en la imagen, incline el sillón hacia abajo y hacia atrás unos 45° para moverlo.

Nota: No presione demasiado hacia abajo para evitar daños en el producto o lesiones en la persona que lo transporta por caída.




1- Antes de moverlo, debe apagar correctamente la máquina, restaurar completamente la posición del respaldo y el apoya piernas, y luego desenchufar el suministro de energía del producto.

2- El producto debe estar vacío al moverlo. No permita que personas, mascotas o desechos permanezcan en el sillón.

3- Al usar las ruedas para mover el sillón, evite obstáculos que superen los 2 mm de altura o 5 mm de ancho.

4- Las ruedas no están diseñadas para movimientos de larga distancia. Para distancias que excedan los 50 metros, mueva el producto lentamente y de manera constante en segmentos cortos.

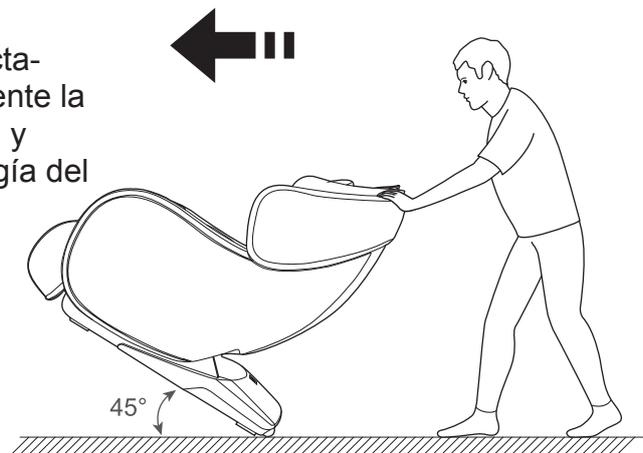


Antes del uso

Chequee el entorno

Asegúrese de que no haya personas, mascotas u otros objetos alrededor de la unidad



PRECAUCION

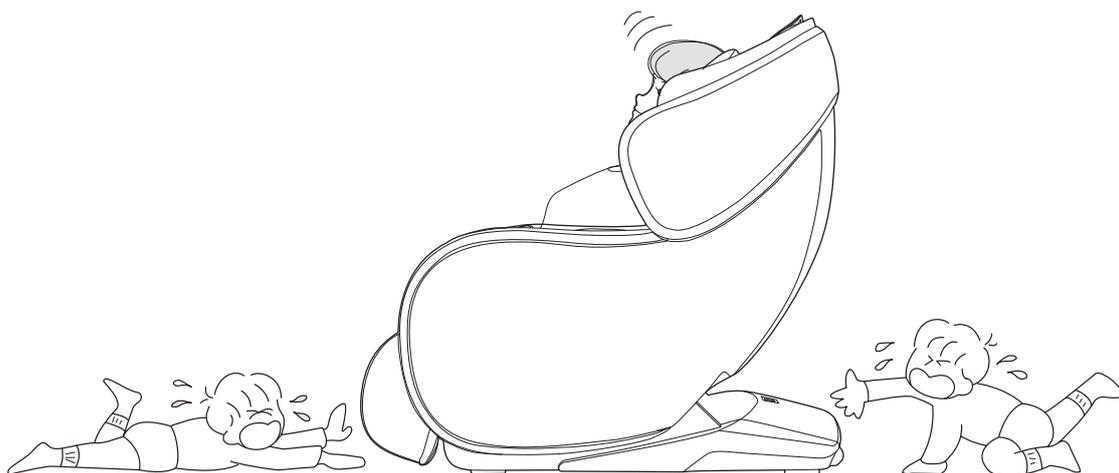


Antes del uso

Seguridad antipinzamiento: Señales de advertencia

Asegúrese de que no haya objetos extraños en los espacios del sillón antes de usarlo.


Antes de comenzar el masaje, asegúrese de que no haya obstrucciones en la pantorrilla, el pie y otras áreas. Bajo ninguna circunstancia se deben introducir las manos, los pies o la cabeza en el área entre el mecanismo de la pantorrilla y el cuerpo, así como en el área entre el reposabrazos y el asiento.

Evite que las manos, los pies o la cabeza queden atrapados detrás de la tela o la cubierta de cuero de la zona de masaje. Hay señales de advertencia que indican el riesgo de atrapamiento en las partes móviles de la pantorrilla y en la cubierta posterior del sillón.

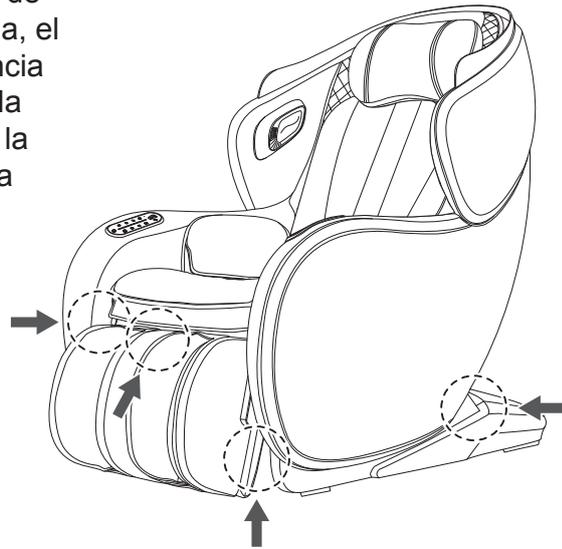

PRECAUCION

Debido a que la unidad de pantorrillas puede voltearse, al voltearse, tenga cuidado de no pellizcarse las manos.

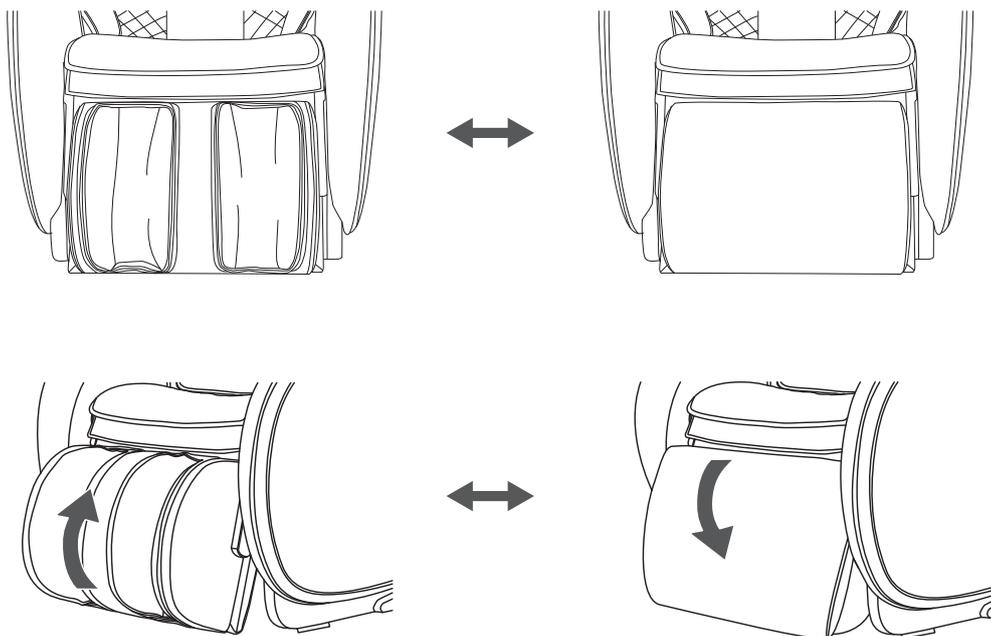

Explicación del sistema de detección de pinzamiento


La parte inferior del respaldo de este dispositivo está equipada con una función antipinzamiento.

Durante el movimiento de reclinación/enderozamiento, si un objeto toca el área de detección antipinzamiento, se activará la función antipinzamiento y el dispositivo entrará en modo de pausa.

Retire el objeto de debajo del respaldo y presione el botón de pausa para reanudar el movimiento de reclinación/enderozamiento.



PRECAUCION


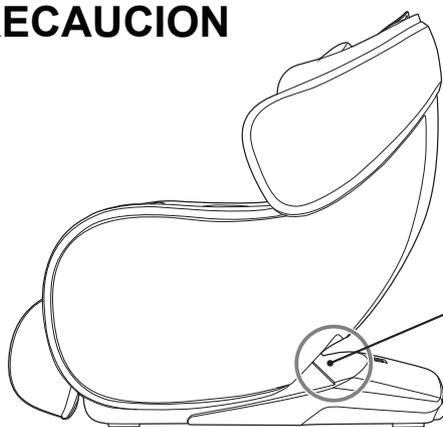


Tira de sensor antipinzamiento incorporada


Posición de detección antipinzamiento entre la cubierta trasera y la cubierta inferior.

Antes del uso

Descripción de la unidad de pantorrillas

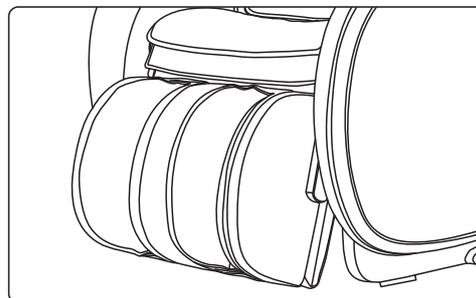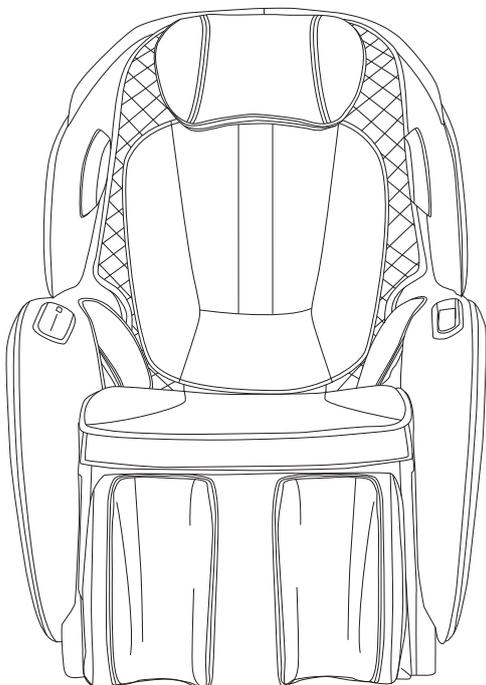

Modo de masaje: gire para disfrutar del masaje de presión de aire en las pantorrillas.

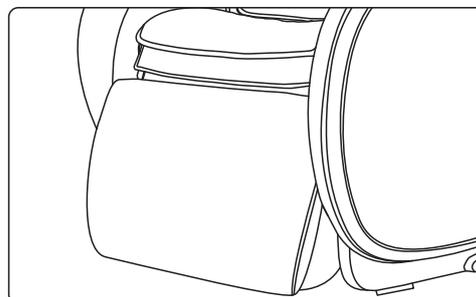


Modo de ocio: dale la vuelta y usalo como reposapiernas para relajarte, de fácil almacenamiento y simple.


Encender




PRECAUCION

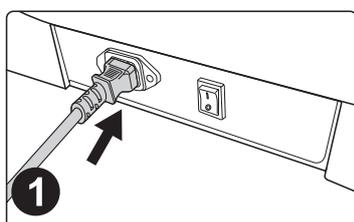

1 Conecte el cable de alimentación al sillón.

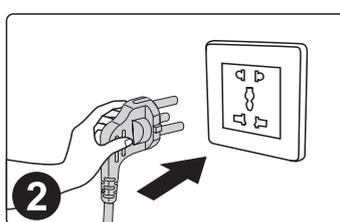

2 Conectelo a la fuente de alimentación.

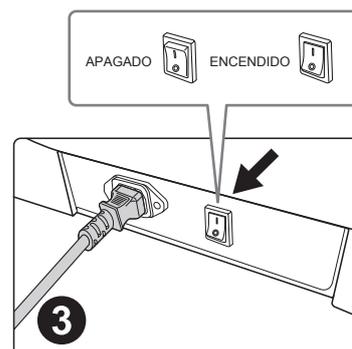

3 Encienda el interruptor (posición "I")





PELIGRO

- Compruebe si el cable de alimentación y el enchufe están dañados antes de usarlo.
- Suministre energía a este producto de acuerdo con los requisitos de potencia calibrados de este producto.
- Está estrictamente prohibido utilizar una fuente de alimentación distinta a la nominal de este producto.
- Está estrictamente prohibido conectar varios dispositivos de conversión de energía para alimentar este producto sin autorización.

Estructura del producto

Descripción de los componentes:

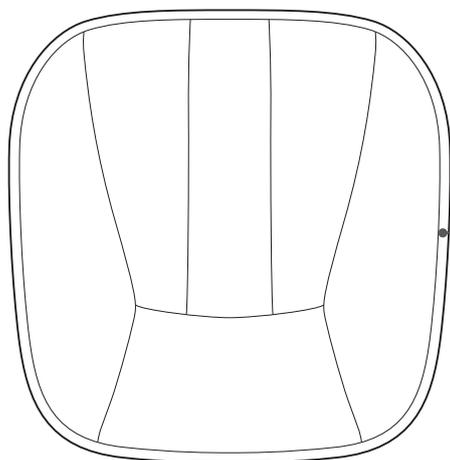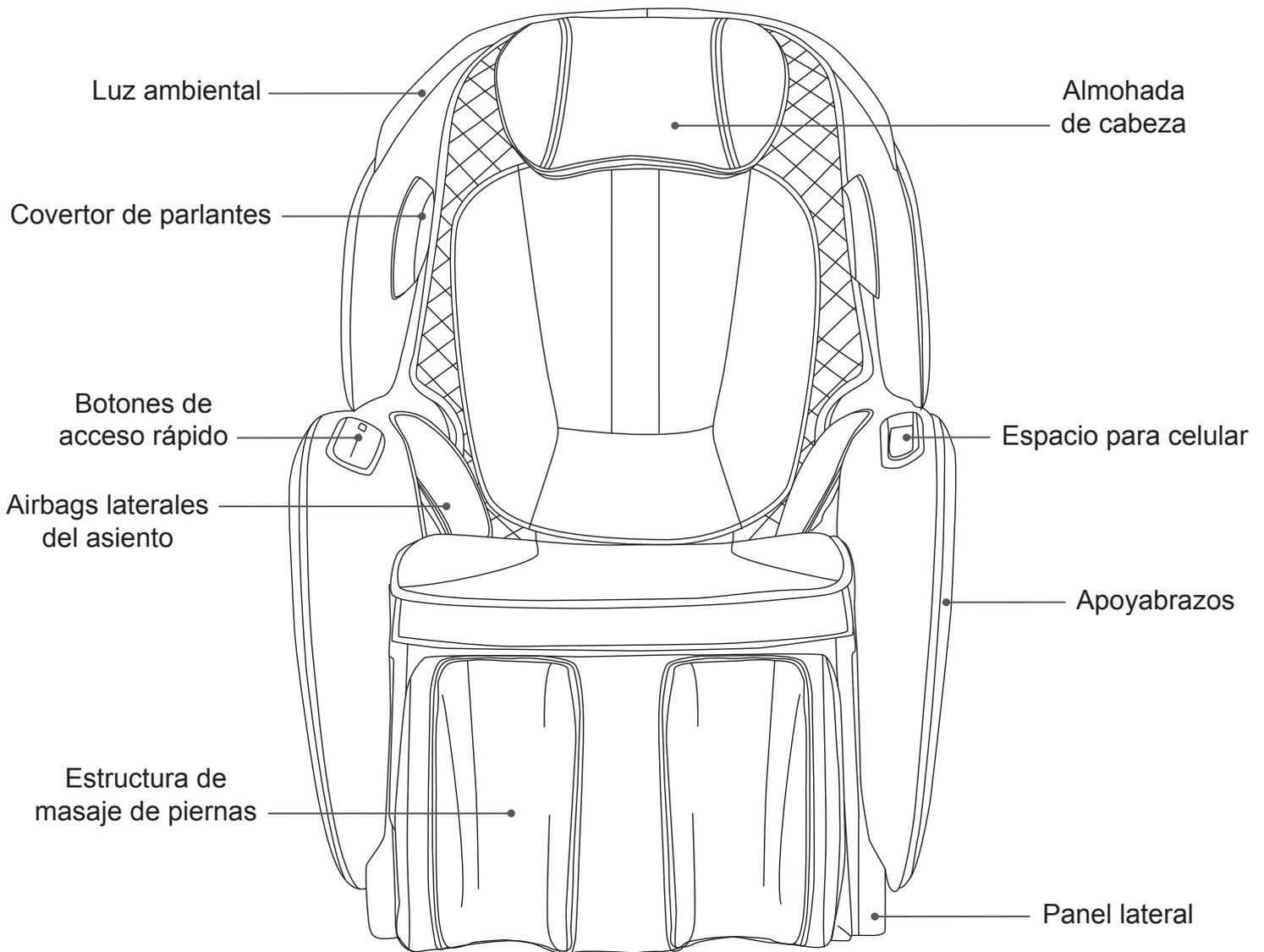


Almohada

Puede ser utilizada en la espalda o en el asiento.


Estructura del producto

Distribución de funciones

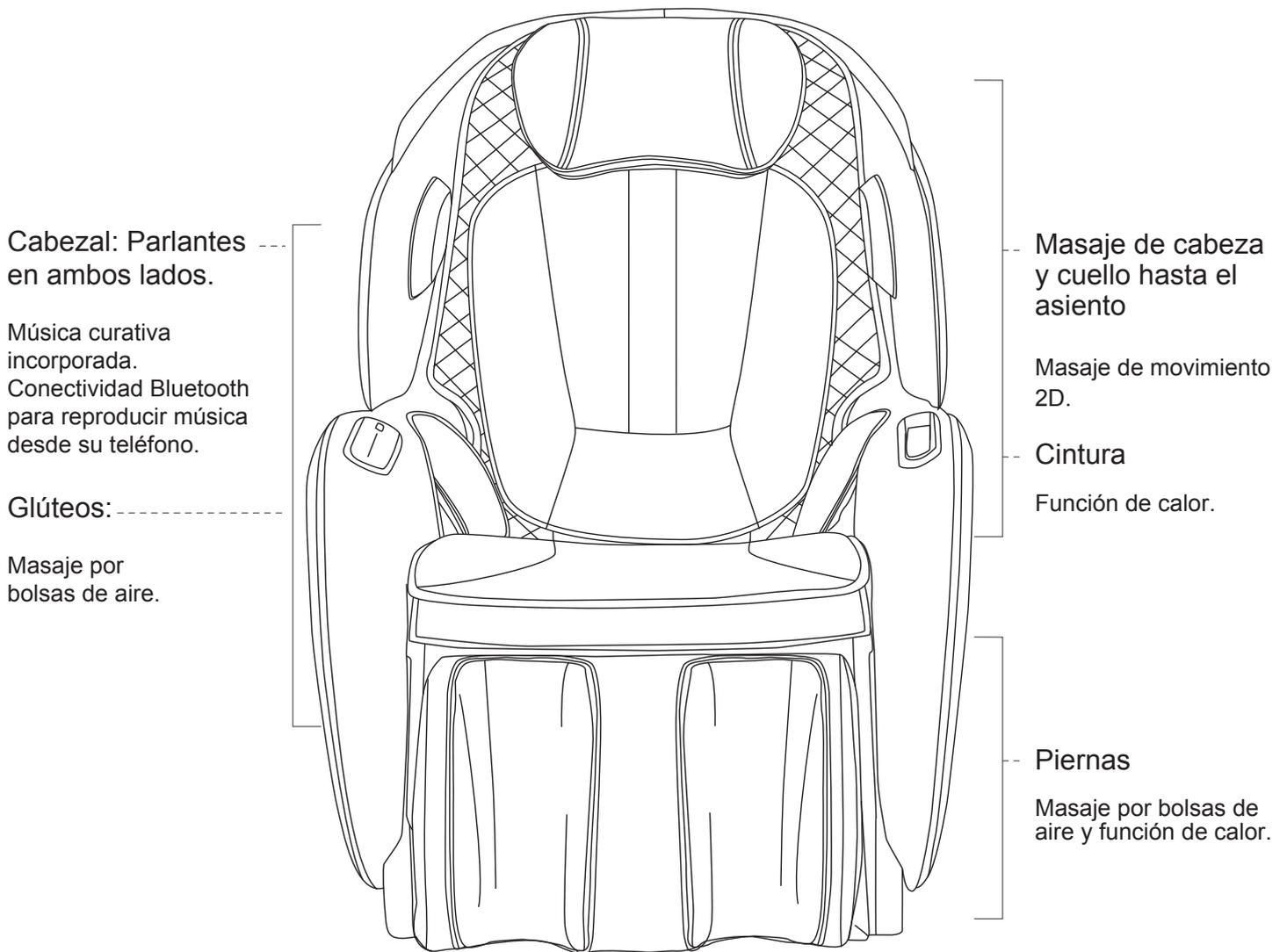

Estructura del producto

I. Explicación de los botones de acceso rápido del apoyabrazos derecho:

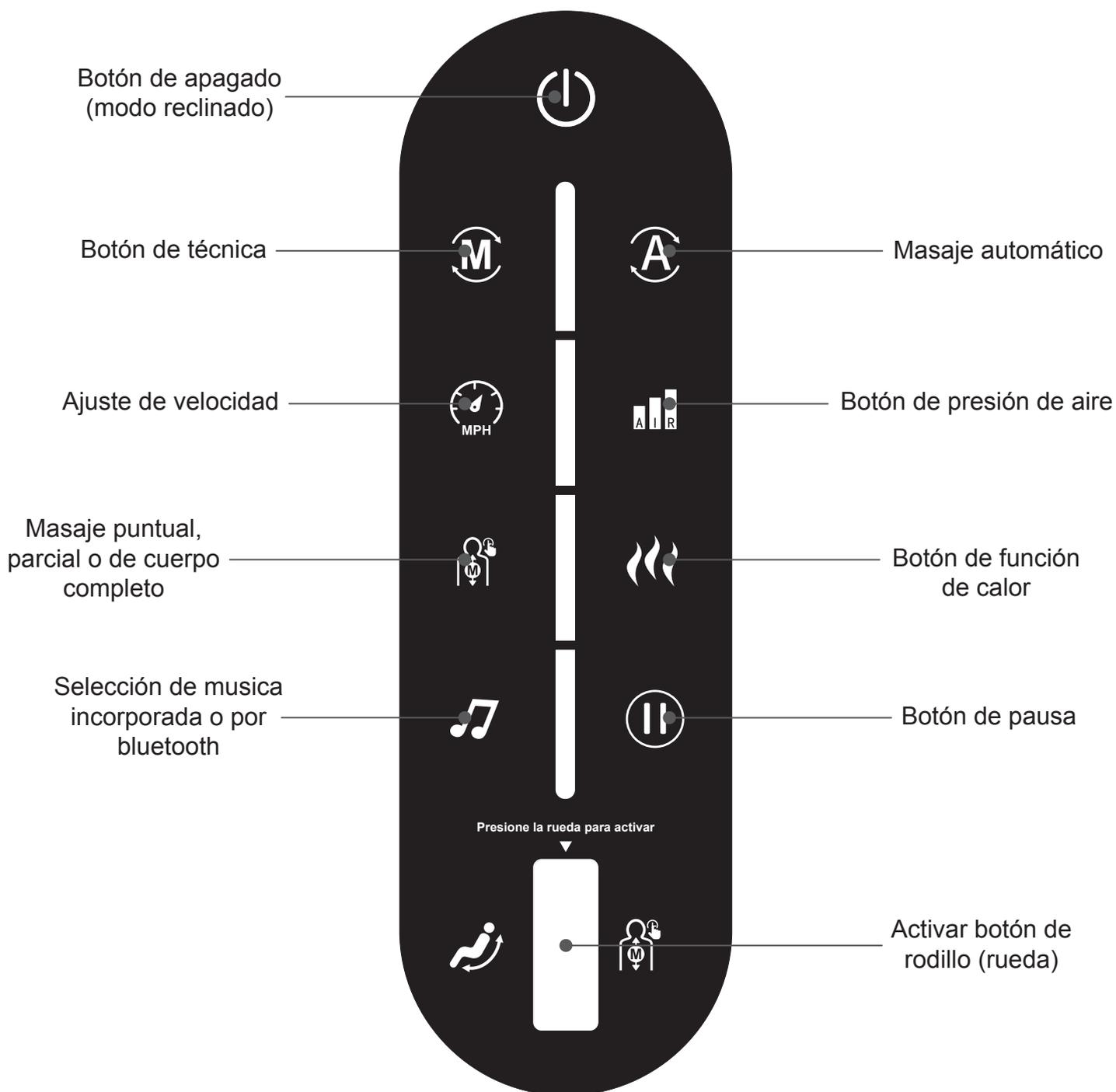

Estructura del producto

Botón	Nombre del botón	Descripción
	Botón de apagado (modo reclinado)	Presione brevemente para apagar el sillón. Presione prolongadamente para ingresar al modo reclinado durante el funcionamiento.
	Botón de técnica	Programa de masaje manual, consulte la página 20 del manual para obtener más detalles.
	Ajuste de velocidad	Ajusta la velocidad del masaje durante los programas de masaje manual.
	Masaje puntual, parcial o de cuerpo completo	Durante los programas de masaje manual, presione para cambiar las áreas de masaje. Presione brevemente para cambiar entre masaje de cuerpo completo y masaje parcial. Mantenga presionado para ajustar la posición del sistema de masaje.
	Selección de musica incorporada o por bluetooth	Música curativa incorporada. También se puede conectar a un teléfono a través de Bluetooth para reproducir música propia.
	Masaje automático	Presione brevemente para cambiar los programas automáticos (consulte la página 19 para obtener más detalles).
	Botón de presión de aire	Enciende o apaga la presión del aire y cambia entre 4 niveles de intensidad.
	Botón de función de calor	Presione para activar o desactivar la función de calor.
	Botón de pausa	Presione durante un masaje para pausar urgentemente todas las acciones de masaje. Presione nuevamente para reanudar todas las acciones de masaje.
	Activar botón de rodillo (rueda)	Función 1: Presione la rueda para activar el sillón. Función 2: Durante el "Masaje puntual, parcial o de cuerpo completo", gire la rueda hacia adelante o hacia atrás para controlar la posición hacia arriba y hacia abajo del sistema de masaje.

Instrucciones de operación

II. Iniciar masaje

1. Presione la rueda para activar la silla de masaje y el respaldo ajustará automáticamente su ángulo.


1.2 Seleccione el programa automático:

- ① Pulse la tecla "A" para elegir el programa automático (puede seleccionar otros programas automáticos pulsando nuevamente la tecla "A" dentro de 3 segundos).
- ② Después de la selección, la silla detectará automáticamente la posición del hombro en el cuerpo humano. Mantenga una posición sentada que se ajuste al sillón de masaje.
- ③ Ajuste la posición del hombro. Si la posición detectada se desvía de la posición real del hombro, utilice la rueda para ajustar la posición del sistema de masaje hasta que se alinee con la posición del hombro adecuada. Si no se realiza ningún ajuste de la posición del hombro en 10 segundos, comenzará el masaje.

2.2 Seleccionar programa manual:

Ingrese directamente al programa manual (sin acción de detección de posición del hombro).

Ajuste del ángulo de inclinación:

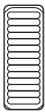
Función	Botón	Descripción
Elevar		Gire la rueda hacia adelante y el respaldo se elevará lentamente. Suelte el botón para detener el ascenso de inmediato. Cuando se acerque al límite, sonará un pitido corto como aviso. Si continúa girando la rueda después de alcanzar el límite, un pitido corto le indicará que ha llegado a la posición extrema.
Acostar		Gire la rueda hacia atrás y el respaldo descenderá lentamente. Suelte el botón para detener el descenso de inmediato. Cuando se acerque al límite, sonará un pitido breve como aviso. Si continúa girando la rueda después de alcanzar el límite, un pitido breve le indicará que ha llegado a la posición extrema.

Masaje automático:

Función	Botón	Nombre del programa	Descripción
Masaje automático	 Azul profundo	Masaje de recuperación de la fatiga corporal completa	Masaje lento y profundo para eliminar la fatiga y relajar completamente.
	 Verde	Masaje rítmico de cuerpo completo	Movimientos rítmicos de golpeteo para relajar todo el cuerpo y liberar el estrés.
	 Violeta	Masaje calmante de cuerpo completo	Principalmente movimientos de amasamiento para un masaje general relajante.
	 Naranja	Masaje de estiramiento de cuerpo completo	Estira los músculos de todo el cuerpo, promoviendo la flexibilidad.
	 Azul	Masaje de hombros y cuello	Masaje focalizado en zona de hombros y cuello.
	 Amarillo	Masaje de cintura	Masaje focalizado en la zona de la cintura.
	 Morado	Masaje pélvico	Se concentra en masajear alrededor de la región pélvica.
	 Rosa	Masaje de relajación curativa	Un programa de relajación centrado en el masaje con air bag y el estiramiento.

Instrucciones de operación

Masaje manual:

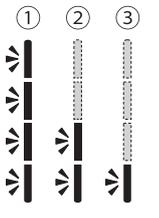Función	Botón	Descripción
Técnica	 Azul profundo	Kneading (Amasado)
	 Verde	Variable-speed Kneading (Amasado de velocidad variable)
	 Violeta	Tapping (Golpeteo)
	 Naranja	Variable-speed Tapping (Golpeteo de velocidad variable)
	 Azul	Kneading + Tapping (Amasado + Golpeteo)
	 Amarillo	Variable-speed Kneading + Variable-speed Tapping (Amasado de velocidad variable + Golpeteo de velocidad variable)
	 Morado	Circular Kneading (Amasado circular)
	 Rosa	Shiatsu
Rango de masaje		Tres modos ajustable (Cuerpo completo, parcial o punto fijo)
		① Masaje recíproco de longitud completa. ② Masaje recíproco parcial de pequeño alcance. ③ Masaje de punto fijo.
		Ajuste de la posición del masaje (en los modos de punto fijo y parcial, se puede ajustar la posición del masaje).

Masaje de presión de aire:

Función	Botón	Descripción
Presión de aire		Botones de presión de aire: cinco modos ajustables, incluido apagado, y cuatro intensidades de presión de aire.

Función de calor:

Función	Botón	Descripción
Calor		Botón de calor: presione este botón para activar o desactivar la función de calor. El calor se siente después de 3 minutos de ser activado.

Botón de Pausa/Inicio del masaje:

Función	Botón	Descripción
Pausa/Inicio		Presione durante un masaje para pausar todas las acciones del masaje. Presione nuevamente para reanudar todas las acciones de masaje.


Nota: Cuando se presiona la tecla de velocidad durante 5 segundos, se escucha un pitido. Dentro de los 3 segundos, presione la tecla de airbag para encender o apagar la luz ambiental.

III. Instrucciones de funcionamiento de reproducción de audio por Bluetooth


1. Ingrese al menú principal del dispositivo inteligente, abra "Configuración", seleccione la opción "Bluetooth", active "Bluetooth" y automáticamente "Buscar nuevos dispositivos Bluetooth".
2. El dispositivo buscará el modelo de Bluetooth correspondiente (MR380-XXXXXXX). Haga clic en el botón de emparejamiento. Si se le solicita que lo empareje con el dispositivo, seleccione "Emparejar" para completar el emparejamiento.
3. Abra el reproductor de música del dispositivo inteligente y seleccione una canción para reproducir.

IV. Terminar el masaje


1. Durante el masaje, presione el botón de encendido para apagar inmediatamente todas las funciones de masaje, reiniciar el mecanismo del respaldo o dejar que el temporizador de masaje alcance su límite, apagando automáticamente todas las funciones de masaje y reiniciando el mecanismo del respaldo.
2. Corte el suministro eléctrico de todo el sillón (consulte la ilustración para cortar toda la alimentación del sillón). Apague el sillón desde el interruptor de encendido (consulte la ilustración). Desconecte el enchufe de alimentación de la toma corriente (consulte la ilustración). Desconecte el cable de alimentación del producto.

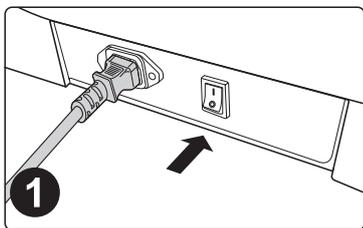

1 Apague el sillón desde el interruptor de encendido.

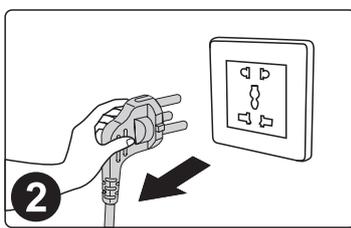

2 Desconecte el enchufe de alimentación.

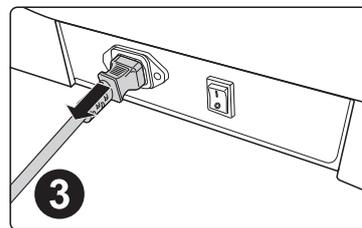


3 Desconecte el cable de alimentación del producto.

Limpieza y mantenimiento

Limpie las partes del ecocuero y plástico

Limpie la superficie del cuero con un paño suave y seco.

- No use productos químicos como disolventes, gasolina, etc., para limpiar la unidad.
- Cuando utilice productos para el cuidado del cuero (trapos), siga las instrucciones de uso.
- Si el ecocuero está particularmente sucio, límpielo de la siguiente manera:
 - ① Empape un paño suave en agua o agua caliente con un 3% a 5% de detergente neutro, luego escúrralo bien.
 - ② Use este paño suave para limpiar la superficie de cuero.
 - ③ Limpie el detergente con un paño empapado en agua limpia y bien escurrido.
 - ④ Limpie con un paño suave y seco.
 - ⑤ Deje que se seque al aire de manera natural.
- Cuando sea difícil quitar las manchas, use una esponja de melamina impregnada en detergente neutro y luego limpie la máquina con ella.
- No use un secador de pelo para secar la superficie.
- Como el color del tejido puede manchar la superficie del ecocuero, tenga cuidado al limpiar el sillón con telas de colores.
- No mantenga estas partes en contacto con plástico durante un largo período, ya que esto puede causar decoloración.
- El ecocuero puede decolorarse, por lo que cuando utilice tintes para el cabello, cubra las partes tocadas con una toalla.

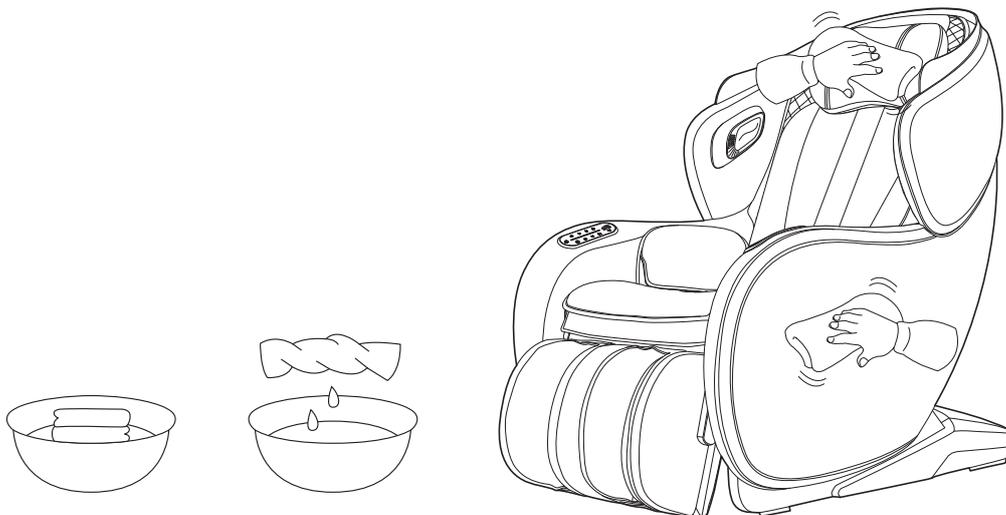

Solución de problemas

Problema	El respaldo llega a una cierta posición, al presionar el botón de ajuste correspondiente no cambia y emite un sonido continuo de "bip, bip".
Solución	Debido al diseño estructural del producto y los requisitos ergonómicos, existen medidas de protección restrictivas para el ajuste de la postura. Se emitirá un sonido recordatorio al alcanzar el límite.

Problema	Luego de encender el sillón, las funciones no comienzan o algunas funciones no operan.
Solución	Luego de presionar el botón de encendido en el sillón, es necesario indicar manualmente el programa automático que desea realizar u otra función que desee activar. Si selecciona el modo de masaje manual, las funciones que no seleccione pueden quedar desactivadas. Setee el sillón en modo de operación manual.

Problema	El sillón entra en estado de pausa durante el masaje.
Solución	El respaldo del sillón tiene una función de anti-pellizco, y entra en modo de pausa cuando se detectan objetos extraños. Retire el objeto debajo del respaldo y presione el botón de pausa para reanudar el masaje.

Problema	El sillón emite un sonido de fricción durante el ajuste de la postura.
Solución	Todo el producto utiliza materiales avanzados y respetuosos con el medio ambiente. Debido a las características inherentes de estos materiales, puede ocurrir un ligero ruido de fricción en los puntos de movimiento relativo, lo cual se considera normal. Nota: Si escucha sonidos de desgarramiento del tejido o material durante el funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente y busque asistencia profesional.

Problema	Los rodillos de masaje no alcanzan la posición de los hombros o el cuello.
Solución	Si la cabeza no toca el reposacabezas o la espalda no toca el respaldo, la posición de los hombros puede estar más baja que la posición real durante el proceso de detección de la forma del cuerpo. Siéntese en la posición más profunda del sillón, apoye la cabeza en el reposacabezas y luego reinicie la operación desde el principio.

Problema	El sillón está dañado. El cable de alimentación o el enchufe de alimentación se calientan anormalmente.
Solución	Para prevenir accidentes, comuníquese de inmediato con el centro de servicio autorizado.

Para cualquier duda o pregunta sobre este producto, no dude en contactar al personal de servicio designado.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	CirC3
Nombre del modelo	MR380
Fuente de alimentacion	220/240v 50/60Hz
Tiempo calificado	20 min
Consumo	100W
Estructura de seguridad	Clase I
Peso máximo del usuario	100kg
Origen	China

 **Bluetooth**® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by FUJIIRYOKI is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

MEMO

MEMO

MEMO

S Y N C A
