

FUJIIRYŌKI

Manual del usuario


Uso doméstico

Sillón de masaje : **JP-4000**

Categoría: Maquinaria y aparatos
Designación general: Sillón de masaje eléctrico doméstico

CYBER-RELAX

A I

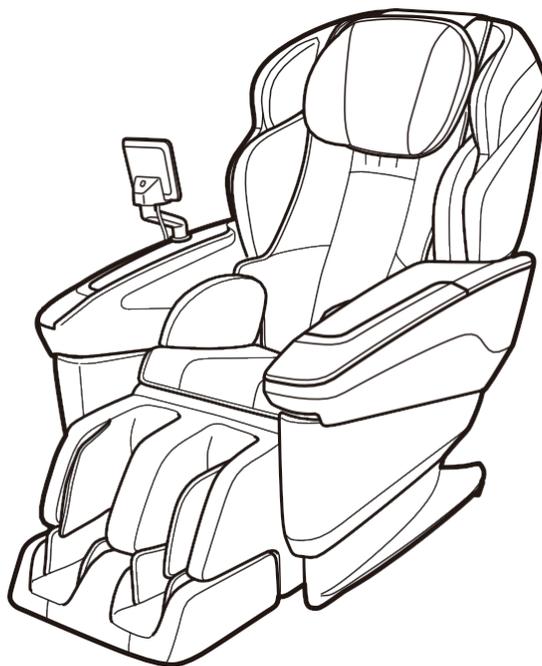

Finalidad de uso, efecto-eficacia

Sustitución del masaje para uso doméstico.

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el sillón y utilícelo sólo según las indicaciones.
- Lea las precauciones de seguridad de las páginas 2-7 antes de utilizarlo.
- Conserve este manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para futuras consultas.
- Si es posible, recicle el material de embalaje exterior.

FABRICADO EN JAPÓN

Consulte en las páginas **10-15** cómo montar cada una de las piezas del sillón de masaje.

Consulte las páginas **76~ 81** para montar las distintas piezas del sillón de masaje.



Intertek
5002153

Estimado cliente,

Gracias por adquirir un sillón de masaje FUJIIRYOKI.

Fundada en Japón en 1954, Fuji Medical Instruments MFG. Co, Ltd (también conocida como FUJIIRYOKI) cuenta con una larga tradición de excelencia. Nos enorgullece haber fabricado en serie el primer sillón de masaje del mundo y, desde entonces, no hemos dejado de innovar, lanzando al mercado nuevos productos y tecnologías únicas.

Nuestro compromiso con la artesanía y la hospitalidad refleja los valores japoneses de destreza, delicadeza y cortesía. Nos esforzamos por ofrecer estas cualidades en cada sillón de masaje que creamos.

Esperamos que disfrute de la excepcional experiencia que le proporcionan nuestros sillones de masaje. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Saludos cordiales,

Fuji Medical Instruments MFG. Co, Ltd.

Antes de usar

• INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
• Nombres y funciones	8
• Instalación y montaje.....	10
• Antes de empezar el masaje cada vez.....	16

Cómo utilizarlo

• Sobre el sillón de masaje 2 Modos	18
• Ajuste el ángulo de inclinación y extensión del reposapiés / Uso de la parte del brazo	20
• Masaje con programa (Recomendación / Programa automático).....	22
• Sobre el fin del masaje	28
• Masaje manual	30
• Masaje de aire	35
• Masaje con técnica y masaje con aire juntos.....	37
• Nivel de fatiga	38
• Situación	39
• Historial de programas	40
• Función de calor ON/OFF	41
• Masaje con rodillo de pies	42
• Control de volumen del sonido de funcionamiento.....	43
• Ajustes (idioma/reclinación automática/brillo de la pantalla/reinicio del Bluetooth).....	44
• Uso del altavoz BLUETOOTH.....	46
• Acerca del modo personalizado por el usuario	50
• Para activar el bloqueo para niños	58

Mantenimiento/Preguntas y respuestas

• Mantenimiento y almacenamiento.....	59
• PREGUNTAS Y RESPUESTAS	61

Atención al cliente

• Solución de problemas	63
• Especificaciones del producto.....	66

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas "Instrucciones importantes de seguridad" antes de usar el producto y utilícelo correctamente.
- Estas instrucciones de seguridad se prescriben para garantizar el uso correcto del producto y evitar lesiones y daños al usuario y a otras personas.
- A continuación se muestra la pantalla y el contenido.
- Respete las normas, ya que son instrucciones importantes para su seguridad.

 PELIGRO	El uso inadecuado puede provocar lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA	Un uso inadecuado puede provocar lesiones o daños materiales.*

*Se entiende por daños materiales a las viviendas, los objetos personales, animales domésticos y los animales de compañía.

	<p>⊘ Acciones prohibidas La acción prohibida se muestra dentro de la ilustración (por ejemplo, la ilustración de la izquierda hace referencia a la "Prohibición de desmontaje")</p>
	<p>● Directivas, acciones obligatorias La acción prohibida se ilustra dentro de la ilustración (por ejemplo, la ilustración de la izquierda se refiere a "desenchufar el cable de alimentación")</p>

- Guarde siempre este manual de instrucciones en un lugar donde pueda consultarlo fácilmente.
- Atención: Cuando se deshaga de este producto y/o sus accesorios, hágalo de acuerdo con las leyes y normativas locales. Para más detalles, consulte a las autoridades locales.



PELIGRO

	<p>Debido a que este equipo tiene un calentador incorporado y la superficie se calienta, las personas que no son sensibles al calor deben prestar atención al usarlo. Presta mucha atención en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores o enfermas, o aquellas que no pueden operar el equipo por sí mismas. • Personas que han tomado medicamentos que causan somnolencia (por ejemplo, pastillas para dormir, medicamentos para el resfío). • Personas que han consumido alcohol en exceso o están extremadamente cansadas. • Personas con trastornos hematógenos (por ejemplo, diabetes). • Personas que tienen una recomendación médica. • Personas con sensibilidad reducida al calor. <p>Existe un riesgo de quemaduras a baja temperatura y deshidratación.</p>
	<p>Las siguientes personas deben consultar a un médico antes de usar este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personas que utilizan un dispositivo electrónico médico en el cuerpo, como un marcapasos, susceptible a perturbaciones electromagnéticas. • Personas con tumores malignos. Personas con enfermedades cardíacas. • Personas que estén embarazadas o inmediatamente después del parto. • Personas que sufren de parestias relacionadas con trastornos circulatorios periféricos debido a la diabetes, etc. • Personas con heridas en la piel. Personas que necesitan reposo. • Personas con pérdida sensorial de temperatura. • Personas con una temperatura corporal superior a 38°C (cuando se observan síntomas de inflamación aguda, malestar, escalofríos, fluctuaciones de la presión arterial, o cuando están debilitadas). • Personas con hernias de disco. Personas con tendovaginitis. • Personas que padecen de osteoporosis, fracturas en la columna vertebral o dolores agudos. • Personas con anomalías en la columna vertebral o aquellas con la columna desviada. • Personas que sienten una anomalía en el cuerpo no mencionada anteriormente o que estén bajo tratamiento médico.



PELIGRO

	<p>Si el sillón deja de moverse o ocurre alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y contacte a su proveedor para revisión. Pueden ocurrir electrificación, cortocircuitos o incendios.</p>
	<p>Tenga cuidado con los movimientos de los rodillos cuando realice masajes alrededor del cuello. Evite masajear en exceso o masajear la parte frontal del cuello. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.</p>
	<p>Al reclinar o bajar el apoya piernas, siempre revise debajo y alrededor del apoya piernas por personas, mascotas u otros objetos. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.</p>
	<p>Al reclinar o bajar el apoya piernas, tenga cuidado de no atrapar las manos, dedos, pies o cabeza debajo del apoya piernas o del respaldo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debajo del mismo sillón. Respaldo, asiento, espacio libre del apoyabrazos. • Espacio libre del apoya piernas, asiento, apoyabrazos. Debajo del apoya piernas, la parte trasera del apoya piernas. Espacio entre el brazo y el apoyabrazos. Detrás del respaldo. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	<p>Antes de usar, revise debajo de la almohadilla del respaldo para asegurarse de que no haya rasgaduras o desgarros en la tela de la cubierta del respaldo. (Si hay algún rasgón o desgarró, sin importar cuán pequeño sea, suspenda inmediatamente su uso, desconecte el cable de alimentación y solicite reparaciones). El uso continuo con rasgaduras o desgarros en la tela del respaldo del asiento puede causar descargas eléctricas o lesiones.</p>
	<p>Desenchufe siempre este aparato de la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.</p>
	<p>No use el calentador en el mismo lugar del cuerpo durante mucho tiempo. Si el calor se usa en el mismo punto durante un período prolongado, pueden ocurrir quemaduras a baja temperatura incluso si la temperatura es relativamente baja (entre 40-60°C).</p> <p>Sobre las quemaduras a baja temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las quemaduras a baja temperatura afectan la parte profunda de la piel y presentan manchas rojas o ampollas. • En caso de encontrar manchas rojas o ampollas, consulte inmediatamente a un médico.
	<p>Se recomienda encarecidamente a las siguientes personas que no utilicen este producto. Algunas prohibiciones requieren la evaluación de un médico: (por ejemplo, aquellos que sufren de trombosis, aneurisma grave, venas varicosas agudas, varios tipos de dermatitis e infecciones cutáneas, incluidas inflamaciones del tejido subcutáneo, etc.)</p>
	<p>No retire, rasgue o corte la cubierta de la silla (respaldo, apoya piernas) a propósito. Nunca use la silla con la cubierta removida o rasgada, ya que la ropa o el cabello pueden quedar atrapados en los rodillos de masaje.</p>
	<p>No use el sillón con voltaje diferente al designado. Pueden ocurrir incendios o descargas eléctricas.</p>
	<p>No use el sillón si el cable de alimentación o su enchufe están dañados, o si el tomacorriente está flojo. Contacte a su proveedor para reparaciones si el cable de alimentación o el enchufe están dañados de alguna manera. El uso continuo puede resultar en descargas eléctricas, cortocircuitos o incluso incendios.</p>
	<p>Asegúrese de enchufar el cable de alimentación completamente y manténgalo alejado del polvo. No hacerlo puede causar daños, incendios o descargas eléctricas.</p>
	<p>No permita que niños sin supervisión o personas que no puedan expresar sus intenciones utilicen éste sillón. No permita que los bebés se acerquen al sillón. Pueden ocurrir descargas eléctricas o lesiones.</p>
	<p>No permita que los niños jueguen o se suban a la silla. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.</p>
	<p>No conecte ni desconecte el enchufe de alimentación con las manos mojadas. Pueden ocurrir descargas eléctricas.</p>

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



PELIGRO

	Nunca utilice alfileres u otros sujetadores metálicos con este aparato.
	Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. Deseche el aparato si la cubierta muestra algún signo de deterioro, como ampollas o grietas.
	No lo use ni almacene en baños o lugares de alta humedad o humedad. Pueden producirse electrificación, incendios, accidentes y moho.
	Nunca remodele ni descomponga/repare usted mismo. Podría producirse un incendio o lesiones debido a una acción anormal.



ADVERTENCIA

	El uso de este producto debe limitarse a 30 minutos por cada uso. El uso continuo en la misma parte del cuerpo debe limitarse a 5 minutos. El uso prolongado puede dañar músculos y nervios. (Úselo solo por 30 minutos al día).
	Las siguientes personas deben consultar a un médico antes de usar este producto: <ul style="list-style-type: none"> • Personas cuyos músculos se han debilitado debido a la edad avanzada o que son de contextura delgada. • Personas que sufren de dolor lumbar causado por huesos u órganos internos. • Personas que se magullan fácilmente o son propensas a esguinces. • Personas que sufren de mareo intenso por el movimiento. • Personas que han sido sometidas a operaciones de órganos internos o del corazón.
	Si aparece alguna erupción, enrojecimiento de la piel, picazón o síntomas similares después de usar este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico. Pueden ocurrir accidentes o problemas de salud.
	El sillón nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, y antes de colocar o quitar piezas. Para desconectar, ponga el interruptor de corriente en posición apagada, luego retire el enchufe de la toma. Esto puede evitar accidentes por travesuras de los niños.
	Use el sillón en una superficie nivelada. No lo use en exteriores. Pueden ocurrir daños o accidentes.
	Asegúrese de que los botones de operación y los temporizadores estén funcionando normalmente antes de usarlo. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Lea nuevamente el manual de operaciones y confirme que el producto esté funcionando normalmente antes de usar el sillón después de un periodo prolongado de no uso. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Confirme que ningún objeto quede atrapado en el sillón (respaldo, apoya piernas, apoyabrazos) antes de usarlo. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna apertura. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	No coloque los pies o las manos en el apoya piernas cuando esté retrayéndose. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Si aparece o siente alguna anomalía física durante la operación, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico.
	Siéntese lentamente después de confirmar que los rodillos de masaje están en la posición de almacenamiento. Pueden ocurrir accidentes o lesiones.
	Use un masaje de estimulación suave cuando comience a usarlo. Puede ocurrir una lesión.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

	<p>Asegúrese de que la terminal de tierra esté instalada. Pueden ocurrir daños o electrificación si la terminal de tierra no está instalada.</p>
	<p>Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente en caso de cortes de energía. Cuando se restablece la energía, pueden ocurrir accidentes.</p>
	<p>Desenchufe el cable de alimentación sosteniendo el enchufe real y no el cable. Esto puede causar electrificación, cortocircuitos o incendios.</p>
	<p>Desenchufe el cable de alimentación cuando no esté usando el sillón. Esto puede causar un incendio debido a la degradación del aislamiento por polvo o humedad.</p>
	<p>Al hacer mantenimiento en el sillón, siempre desenchufe el cable de alimentación. Esto puede causar electrificación o lesiones.</p>
	<p>Nunca opere el aparato con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabello y similares.</p>
	<p>Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.</p>
	<p>Para desconectar, ponga el interruptor de corriente en la posición de apagado, luego desenchufe de la toma de corriente.</p>
	<p>El sillón está destinado para uso doméstico.</p>
	<p>Las temperaturas suficientemente altas para causar quemaduras pueden ocurrir independientemente del ajuste del control. No lo use en un bebé o inválido o en una persona dormida o inconsciente. No lo use en pieles sensibles ni en personas con mala circulación sanguínea. Revise frecuentemente la piel en contacto con la zona calefaccionada del aparato para reducir el riesgo de ampollas.</p>
	<p>No aplaste - Evite dobleces agudos.</p>
	<p>No dañe el cable de alimentación ni el enchufe. ●No lo maltrate ●No lo dañe ●No lo procese ●No lo doble ni tire excesivamente ●No lo tuerza ●No lo ate ●No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ●No permita que el cable de alimentación quede atrapado, especialmente al mover el sillón.</p>
	<p>Nunca opere este aparato si el cable o enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación. El uso continuado puede resultar en descargas eléctricas, cortes o incluso incendios.</p>
	<p>No lo use inmediatamente después de comer o consumir alcohol. Pueden ocurrir náuseas, enfermedades, accidentes o lesiones.</p>
	<p>No lo use cerca de estufas u otras fuentes de fuego, ni fume mientras usa el sillón. No lo use en alfombras calefaccionadas ni con otros equipos de calefacción. No lo use bajo mantas o almohadas. El calentamiento excesivo puede ocurrir y causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Esto puede causar incendios.</p>
	<p>No se pare sobre el asiento, ni se suba al respaldo, apoya piernas, brazos o zona de hombros de el sillón. El usuario o el sillón pueden volcarse y producir lesiones o accidentes.</p>
	<p>No se siente ni se pare sobre la parte superior del respaldo, la parte delantera del asiento o en el apoya piernas cuando el sillón esté reclinado. El usuario o el sillón pueden volcarse y producir lesiones o accidentes.</p>
	<p>No intente sentarse o levantarse del sillón cuando esté reclinado o el apoya piernas esté elevado. El usuario o el sillón pueden volcarse y producir lesiones o accidentes.</p>

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA



No utilice accesorios distintos a los que acompañan al sillón. Si lo hace, podría causar un mal funcionamiento del producto.

No utilice el sillón si lleva pendientes, collares, bufandas u otros adornos, ya que podría sufrir lesiones.

No utilice el sillón si lleva objetos duros en la cabeza, como adornos para el pelo, ya que pueden provocar lesiones.

No utilice el masajeador de muslos o caderas con objetos duros en los bolsillos. Esto puede provocar accidentes o lesiones.

No lo utilice desnudo. Los masajes directos sobre el cuerpo desnudo pueden dañar la piel.

No lo use en las zonas de los codos, las rodillas, la cabeza o el abdomen. No deje que las manos o los pies queden atrapados en los rodillos. Podrían producirse lesiones.

No desconecte el cable de alimentación ni apague el interruptor mientras utiliza el sillón. Esto puede provocar accidentes o lesiones.

No duerma mientras utiliza el sillón. Esto puede provocar problemas de salud o lesiones.

No mueva el sillón si hay personas o elementos sobre él. Pueden producirse daños o lesiones.

Asegúrese de que no haya más de una persona en el sillón a la vez. Si lo hace, podría dañar el sillón o provocar lesiones.

No limpie con bencina, disolvente de pintura ni alcohol, ni rocíe con ningún aerosol farmacéutico, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No debe utilizarse para otros fines que no sean el masaje, ya que podría causar daños o accidentes.

No utilice otros equipos terapéuticos mientras utiliza este producto. Esto puede provocar problemas de salud o accidentes.

No transporte el sillón ni lo mueva con las ruedas sobre el suelo, ya que se raya fácilmente.

No vuelque el sillón ni lo someta a golpes fuertes. Podrían producirse daños o lesiones.

No lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.

Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

No transporte este aparato sujetándolo por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.

Nunca utilice el aparato con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, cabellos y similares.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.



ADVERTENCIA



Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Utilice las superficies de calor con cuidado. Puede provocar quemaduras graves. No utilice el producto sobre zonas de piel sensibles o en presencia de mala circulación. El uso desatendido del calor por parte de niños o personas discapacitadas puede ser peligroso

Mantenga a los niños alejados del soporte extendido para los pies, del soporte para la espalda (u otras partes similares).

Conecte este sillón únicamente a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.

Este sillón no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Por favor, no escuches a un volumen muy alto.
Escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo puede dañar su audición.


No lo utilice en exteriores.

Mantenga el cabello largo alejado del masajeador mientras lo utiliza.

Nombres y funciones

Sillón


Frente

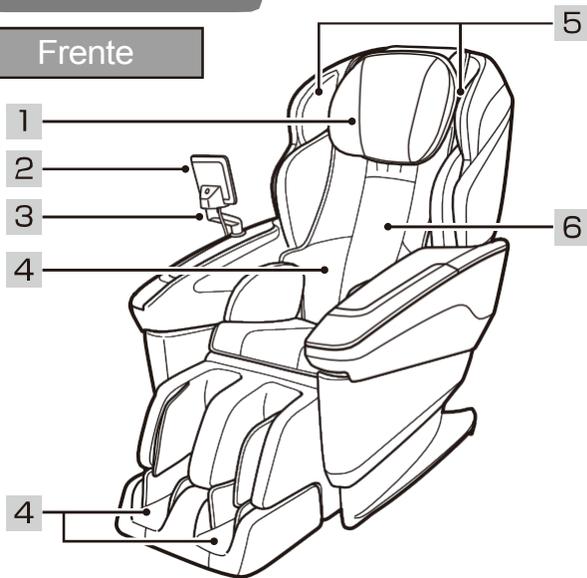

Frente

- 1** Almohada
Gira hacia atrás la almohadilla durante el masaje.
- 2** Control remoto
- 3** Soporte para control remoto
- 4** Calor
Incorporado en la espalda, planta de los pies.
- 5** Altavoz BLUETOOTH
Disfruta de música a través de BLUETOOTH.
- 6** Respaldo
Apóyate lentamente en el respaldo.


Dorso

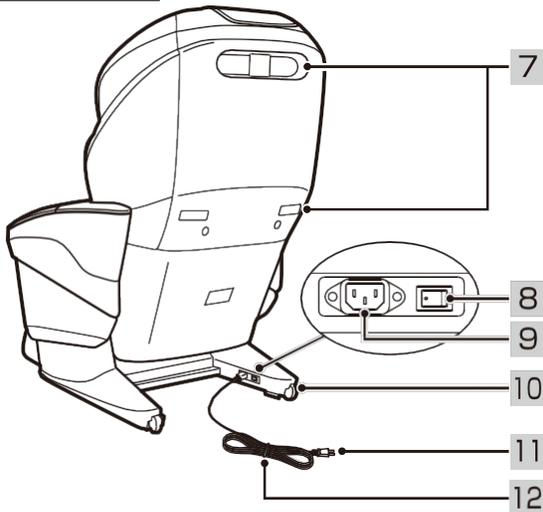

Dorso

- 7** Mango
- 8** Interruptor de encendido
Apague el sillón después de usarlo.
- 9** Entrada (puerto de enchufe del cable de alimentación)
- 10** Ruedas
- 11** Clavija de alimentación
- 12** Cable de alimentación

Posición de masaje

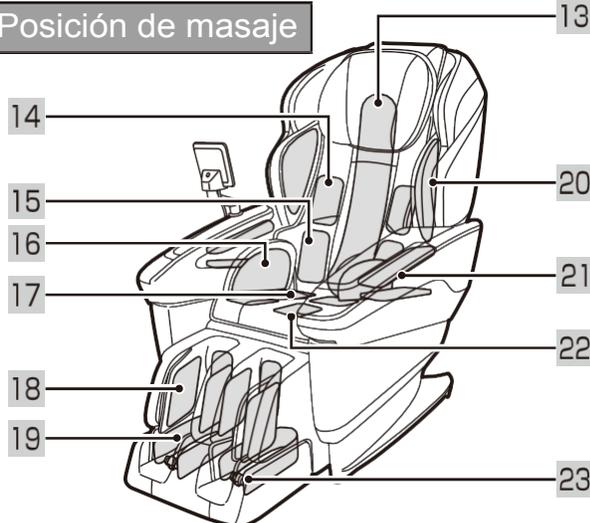



Posición de masaje

- 13** Respaldo
Masajea toda la zona de la espalda
- 14 - 22** Masaje de aire para cada parte del cuerpo.

14 cadera	15 cintura	16 pelvis
17 cadera	18 pantorrilla	19 tobillo
20 hombro	21 brazo	22 muslo
- 23** Rodillo de pie
Masaje con rodillos para la planta de los pies.

Control remoto

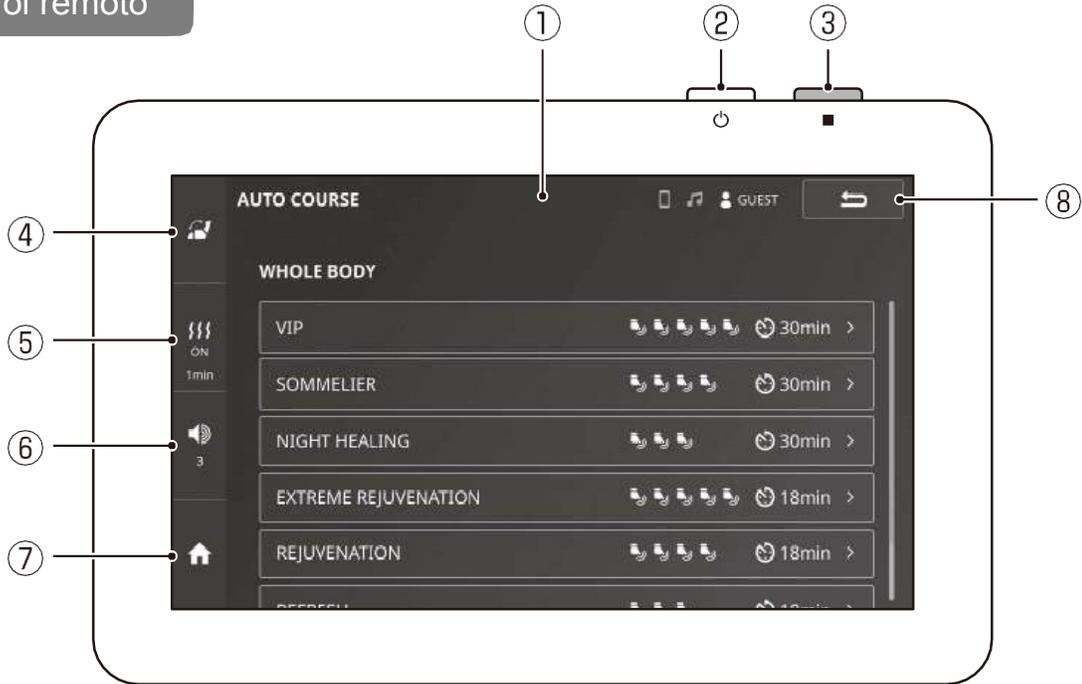

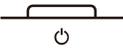①		Pantalla LCD (panel táctil)	Se maneja tocando o desplazándose con el dedo. Cuando se muestre la figura anterior, el desplazamiento mostrará el menú oculto en la parte inferior. (Ejemplo: pantalla de selección automática de curso)
②		Botón de encendido	Enciende y apaga el control remoto. Si pulsa este botón durante un masaje, la unidad de masaje se detendrá y los rodillos volverán a su posición original.
③		Botón de parada de emergencia	Detiene todas las operaciones y expulsa el aire de airbags. (Toque para detener el masaje inmediatamente).
④		Botón de ajuste de inclinación	Ajusta el ángulo de la sección respaldo/piernas y la longitud de las piernas.
⑤		Botón de calefacción	Enciende y apaga el calor
⑥		Botón de control de volumen	Ajusta el volumen de los sonidos de funcionamiento.
⑦		Botón Inicio	El masaje se detiene y vuelve a la pantalla de menú.
⑧		Botón Atrás	Vuelve a la pantalla de menú.

Instalación y montaje

Compruebe la unidad principal y los accesorios


⚠ ADVERTENCIA

No utilice accesorios distintos de los que acompañan al sillón. De lo contrario, el producto podría no funcionar correctamente.

Documentos del manual de usuario


- Manual del usuario
- Folletos de ensamblado

• Total

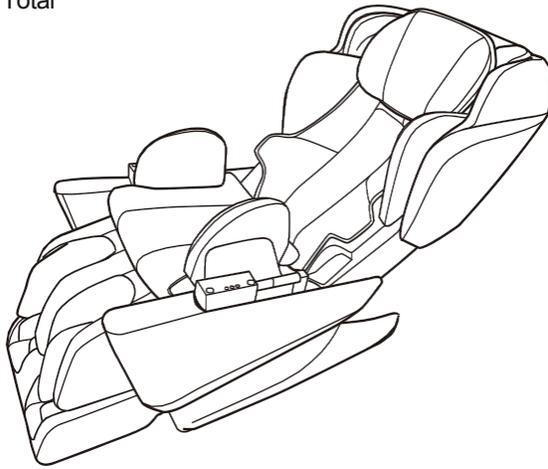


• Unidad de brazo (izquierda)(derecha)


Brazo derecho

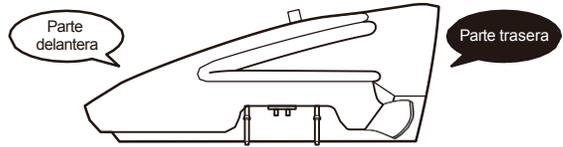

Brazo izquierdo

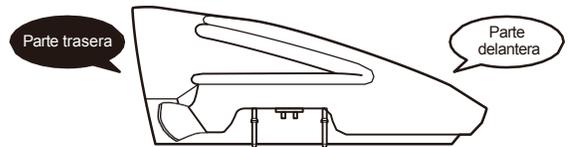

- Soporte para el control remoto
- Cable de alimentación

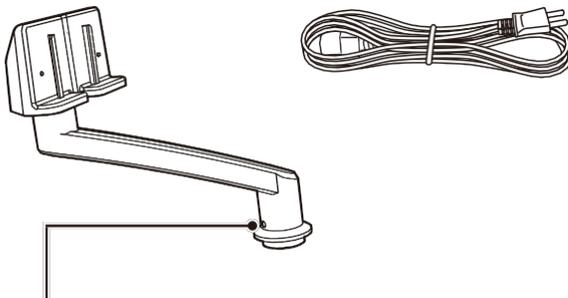

- Tornillo: 1
Está montado sobre el soporte del control remoto.


• Llave hexagonal



• Etiqueta de precaución



Para una correcta instalación, asegúrese de comprobar las direcciones delantera/trasera e izquierda/derecha de la unidad de brazo.

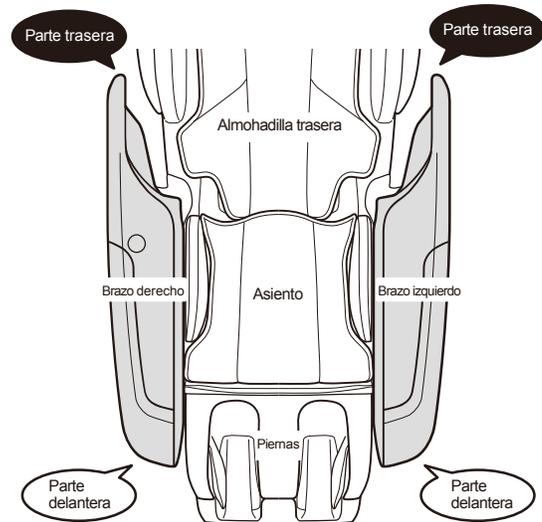

Sillón de masaje visto desde arriba

Decidir el lugar de instalación de toda la unidad

! PELIGRO

No utilizar ni almacenar en cuartos de baño o lugares con mucha humedad. Puede producirse electrificación, incendio, accidentes y moho.

! ADVERTENCIA


Utilice el sillón en una superficie nivelada. No lo utilice al aire libre. Podrían producirse daños o accidentes.

No acercarse a estufas u otras fuentes de fuego, ni fumar mientras se utiliza el sillón. No utilizar sobre alfombras calefaccionadas u otros equipos de calefacción. No lo utilice debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Puede provocar un incendio.

Debe instalarse en una superficie plana donde haya 50 cm de espacio por detrás para reclinarsse.

- Si se conecta la alimentación, el cuerpo se desplaza automáticamente hacia atrás y el reposapiés se eleva hasta alcanzar la posición de espera. Es conveniente que la unidad principal esté rodeada por un espacio de más de 30 cm por delante y 50 cm por detrás.

- Al reclinarsse, incluso el reposapiés se eleva.
- No instale la unidad en lugares donde reciba luz solar directa todos los días, ni cerca de aparatos de calefacción o de altas temperaturas. De lo contrario, el color de la unidad principal podría cambiar o la calidad podría deteriorarse.

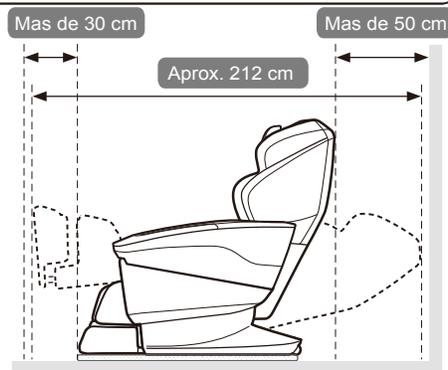

Configuración completa


! ADVERTENCIA

No mueva la silla mientras haya personas u objetos sobre ella. Podrían producirse daños o lesiones. No arrastre el sillón ni la mueva con las ruedas por el suelo, donde podría rayarse fácilmente.


No tire del cable de alimentación o del cable del mando a distancia con la pierna ni lo enrolle con las ruedas. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

Sujete las asas del reposapiés y del respaldo y levántelas para transportarlas (consulte la figura siguiente)

- Al tratarse de una unidad pesada, debe ser transportada por 2 o más personas.
- Fíjese bien en sus pasos y bájelo lentamente.

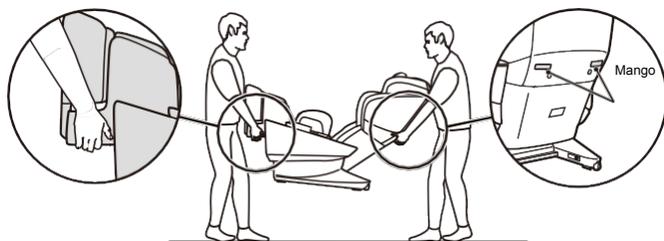

La puerta debe tener 72 cm o más (70 cm de ancho para el ancho del sillón + 2 cm de margen de protección)

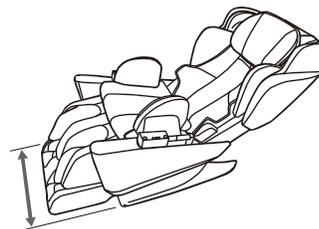

Instalación y montaje


Instalación de la unidad de brazo

⚠ Por favor, instale en ambos lados de la misma manera.

1. Mueva la posición de montaje de la unidad de brazo hacia la parte delantera del cuerpo principal (①) e inserte la parte convexa de la unidad de brazo en el orificio (②) de la posición de montaje.


- Instale el reposabrazos con el respaldo en posición reclinada.
- Insértelo con firmeza. De lo contrario, existe riesgo de fuga de aire o de caída.
- Por favor, instale en ambos lados de la misma manera.

Montaje de la unidad de brazo

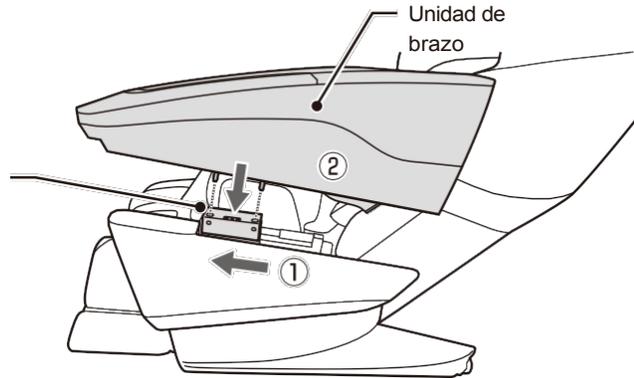


2. Alinee y cierre el cierre del respaldo del cuerpo principal y el de la unidad de brazos.

- Por favor, instale en ambos lados de la misma manera.

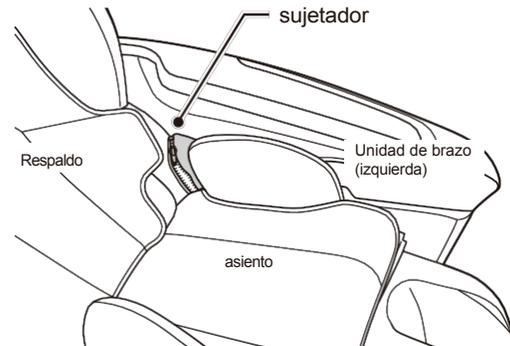


Para desmontar la unidad de brazo

1. Recline el respaldo y abra el cierre (①) que sujeta el brazo y el respaldo.
2. Deslice la unidad de brazo hacia el respaldo, empuje hacia abajo el tope que se encuentra entre la unidad de brazo y el asiento (②) y suelte el bloqueo.
3. Mueva la unidad de brazo hacia la parte de las patas, empuje el tope (③) hacia abajo y suelte el bloqueo.
4. Levante y retire la unidad de brazo.

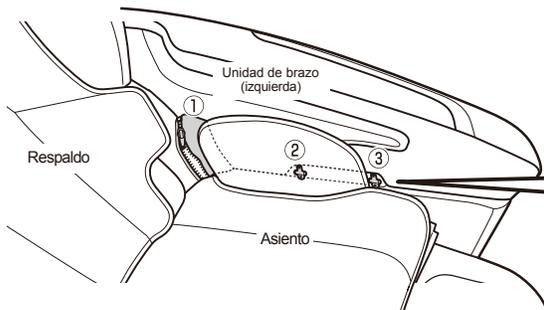

Detenedor (②,③)

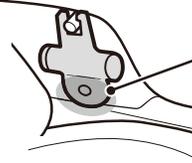


Presione esta zona con los dedos y desbloquéela.

Montaje del soporte remoto

Inserte el soporte del control remoto en la fijación del soporte del control remoto de la unidad de brazo (el lado derecho), y fíjelo en su sitio utilizando la llave hexagonal.

Fije firmemente el soporte.
De lo contrario, el soporte del control remoto podría desprenderse y provocar un funcionamiento incorrecto o lesiones.
Si no se fija firmemente, el soporte del mando a distancia puede desprenderse, provocando un funcionamiento incorrecto o lesiones.

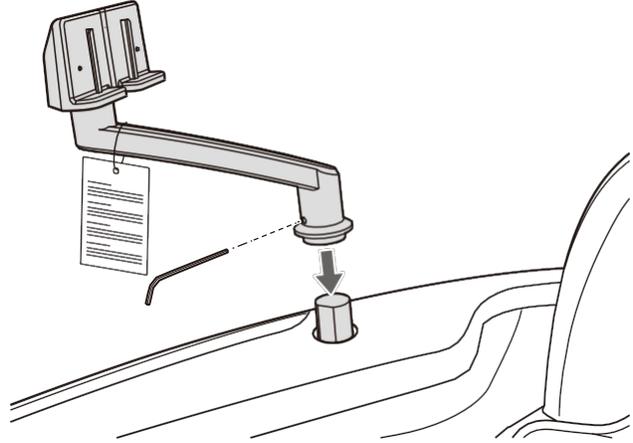


Fijación del control remoto

● Método de fijación

Alinee la parte cóncava de la parte posterior del control remoto con la parte convexa del control e instálelo introduciéndolo desde arriba.


● Método de extracción

El control remoto debe extraerse por la parte superior.

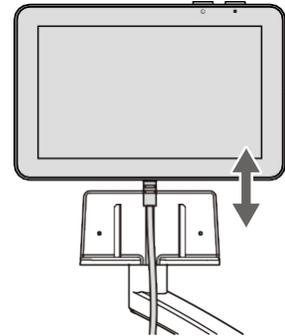

● Ajuste del ángulo del soporte del control remoto


El soporte del control remoto es ajustable en ángulo.

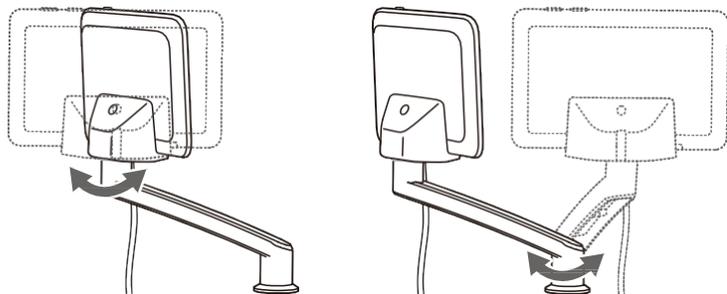

Instalación y montaje

Método para quitar la almohada y ajustar el respaldo


1. La almohada se fija al respaldo con cinta velcro.

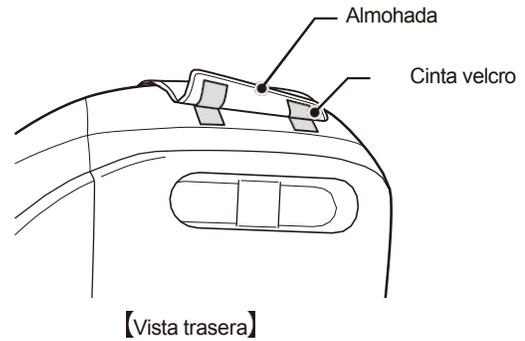

2. Ajuste el respaldo según sus preferencias.


- El respaldo puede utilizarse como calefactor. Consulte "Colocación de la almohadilla trasera (parte del calentador)" para más detalles. (P.41)

Si desea fijar firmemente el respaldo, fije el reposacabezas y el respaldo con el cierre.

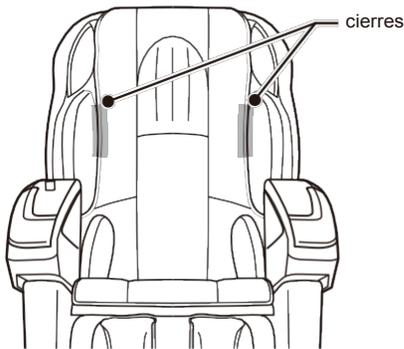

El centro de la almohadilla de la espalda es extraíble. Se puede sentir un masaje más fuerte cuando se quita.

- ① Levante el cierre la parte posterior de la almohadilla trasera.
- ② Retire el velcro de la parte posterior de la almohadilla trasera.

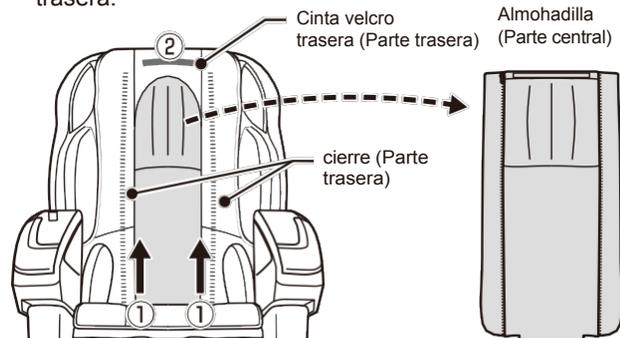

Colocar el cable de alimentación


! PELIGRO

No utilice el sillón si no es con el voltaje designado. Podría producirse un incendio o electrificación. Inserte el enchufe de alimentación y el conector a la raíz sin falta y no permita que se adhiera polvo. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

No utilice enchufes o cables de alimentación dañados. Puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. Si está dañado, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente para su reparación.

1. Inserte el conector del cable de alimentación en la entrada (puerto de inserción del cable de alimentación) en la parte inferior derecha de la parte trasera del cuerpo principal.

- Insértelo con firmeza.
- No utilice ningún otro cable eléctrico que no sea el suministrado.
- Compruebe que el cable de alimentación, el cable del mando a distancia o el enchufe no estén dañados o que no haya polvo en el enchufe.

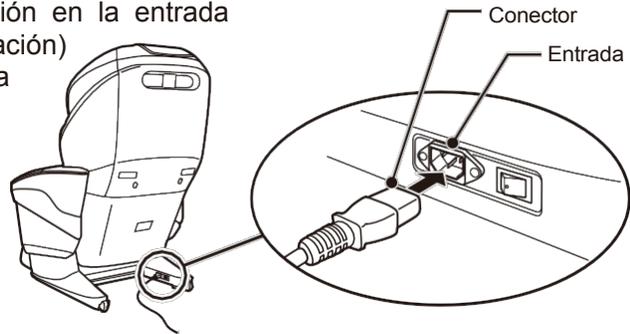

Instrucciones de conexión

! PELIGRO


Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma corriente adecuada.

! ADVERTENCIA

La toma de tierra debe instalarse firmemente. Si no se instala la toma de tierra, puede provocar una descarga eléctrica en caso de avería y cortocircuito.

X Este producto debe conectarse a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable con un conductor de puesta a tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Métodos de conexión

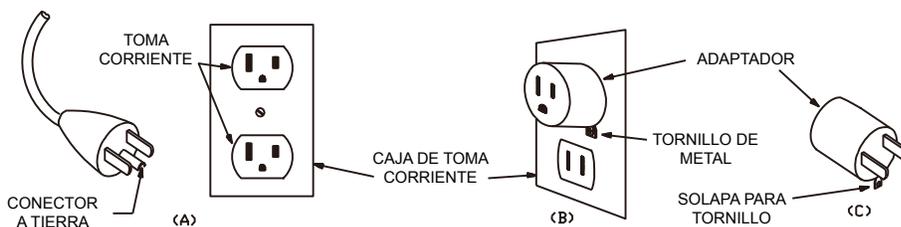

Este producto es para uso en un circuito nominal de 120 V, y tiene un enchufe con conexión a tierra que se parece al enchufe ilustrado en el croquis A de la figura 86.1. Se puede utilizar un adaptador temporal parecido al que se ilustra en los dibujos B y C para conectar este enchufe a un receptáculo de 2 polos, como se muestra en el dibujo B, si no se dispone de una toma de corriente con conexión a tierra adecuada. El adaptador temporal sólo debe utilizarse hasta que un electricista cualificado pueda instalar una toma con toma de tierra adecuada (esquema A). La oreja rígida, terminal o similar de color verde que se extiende desde el adaptador debe conectarse a una toma de tierra permanente como, por ejemplo, la cubierta de una caja de toma de corriente debidamente conectada a tierra. Siempre que se utilice el adaptador, debe sujetarse con un tornillo metálico.

Cuando no hay terminal de puesta a tierra en la toma corriente


Antes de la compra, hable con la tienda de electricidad, distribuidor y hacer la conexión a tierra (D-Class<Class-D> trabajo de instalación / costo).

Antes de empezar el masaje cada vez

Compruebe alrededor del sillón

Compruebe sin falta los alrededores

- Compruebe que no haya nadie, ningún animal doméstico ni nada por delante o detrás del sillón y debajo del reposapiés.

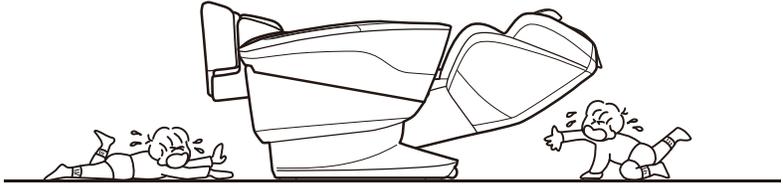

Conectar la alimentación



PELIGRO


No utilice el sillón si no es con el voltaje designado. Podría producirse un incendio o electrificación.

Inserte firmemente el enchufe de alimentación para que no se acumule polvo. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito o una ignición.

No utilice enchufes o cables de alimentación dañados. Si está dañado, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente para su reparación.


1. Inserte el enchufe del cable de alimentación en el receptáculo.

- Compruebe que el cable de alimentación, el cable del control remoto y el enchufe del cable de alimentación no estén dañados. Y que no haya polvo acumulado en el enchufe del cable de alimentación.

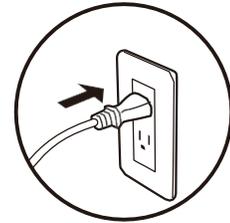

2. Conecte la alimentación del cuerpo principal.

- El interruptor de encendido está detrás del cuerpo principal, en la parte inferior derecha.

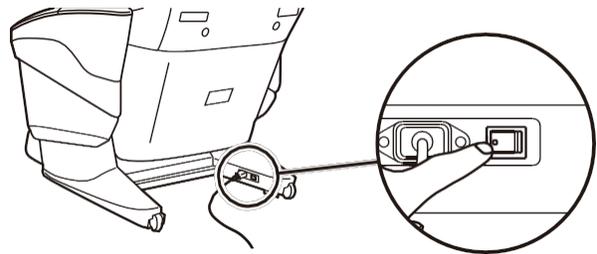

3. Pulse el "botón de encendido" del control remoto para encenderlo.

- Aparece la pantalla normal.
- El respaldo del asiento se reclina y el reposapiés se eleva hasta la posición de reposo automáticamente.

- No se puede utilizar el dispositivo a menos que aparezca la pantalla de menú después de pulsar el "Botón de encendido".



Posición de espera

Comprobar el cuerpo principal

1. Compruebe si hay rasgaduras en la tela de la cubierta.



PELIGRO

Antes de usar, sujete el respaldo y asegúrese de que no hay desgarros en la tela de recubrimiento del respaldo ni en las demás piezas. (Si hubiera algún desgarro, por pequeño que sea, deje de usar el sillón inmediatamente. Desconecte el enchufe del cable de alimentación y solicite reparación).

El uso continuo con el paño rasgado puede causar descargas eléctricas o cualquier peligro en el cuerpo.

2. Compruebe si ha quedado atrapada alguna sustancia extraña en el cuerpo principal.



ADVERTENCIA

Antes del uso, compruebe que no haya ninguna sustancia extraña atrapada en el cuerpo principal (respaldo, reposapiés, reposabrazos).

No hacerlo puede causar accidentes o lesiones.

3. Compruebe si los rodillos de masaje está en posición retraída.

- Si la unidad de masaje no se encuentra en la posición de plegado, pulse el "botón de encendido" para devolverla a la posición de plegado.



ADVERTENCIA

Antes de sentarse en el sillón, compruebe si los rodillos de masaje están en posición retraída. No hacerlo puede causar accidentes y lesiones.

4. Compruebe que el reposapiés esté completamente bajado.



ADVERTENCIA

No suba ni baje del sillón en el momento de reclinarsse o cuando el reposapiés esté levantado. El sillón podría volcar y el usuario podría caerse y hacerse daño.

Sobre el sillón de masaje 2 Modos

Este producto tiene 2 modos disponibles para su uso: Modo Invitado, Modo Personalizado por el Usuario. Para conocer las funciones disponibles en cada modo, consulte la tabla de la página de especificaciones. (P67)

Modo Invitado (P20 ~ 49)

- Después de encender el equipo, se mostrará la pantalla del menú y se ingresará automáticamente al Modo Invitado.
- En el Modo Invitado, se puede realizar el masaje directamente sin registrar información personalizada con anticipación. Cada vez que se utiliza, la máquina realizará el ajuste de inclinación y la detección de forma corporal.

En el Modo Personalizado, mientras hayas registrado la información personalizada, puedes omitir el ajuste de inclinación y la detección de forma corporal.

Modo Personalizado (P50 ~ 57)

- El registro/personalización de información de usuario se puede hacer para hasta 2 usuarios.
- El usuario puede registrar información personalizada la primera vez que utilice el equipo. Una vez completado el registro, la máquina iniciará el curso automático de acuerdo con la información personalizada registrada. La detección de forma corporal y el ajuste pueden omitirse.

Si deseas cambiar del Modo Personalizado de Usuario a otros modos, reinicia el equipo antes de operar.

Información personalizada registrable (Modo personalizado por el usuario)

Personalizar la línea de fondo

Información sobre la posición de los hombros y la cintura

Información de la posición del hombro / cintura
Seleccione el punto de masaje del recorrido automático.

Información sobre la detección de curvas en S

Para que el sillón de masaje masajee uniformemente a lo largo de la espalda, esta función recopilará información sobre la línea de la espalda. Los datos de la línea de la espalda detectados también se pueden editar según las preferencias.

Personalizar reclinación

Información reclinada


Es posible registrar información del ángulo preferido del respaldo, ángulo de las piernas / longitud de las piernas.

Personalizar la presión de los airbags

Información sobre la presión atmosférica


Tras el preajuste, es posible registrar la información de la intensidad de masaje de aire preferida.

Ejemplo de primer registro con información personalizada

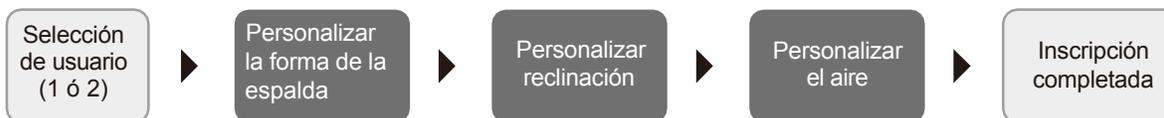


Ejemplo de cada operación de masaje (Programa en modo automático)

Modo Invitado

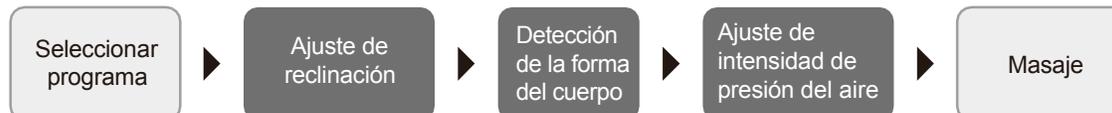

Modo personalizado por el usuario

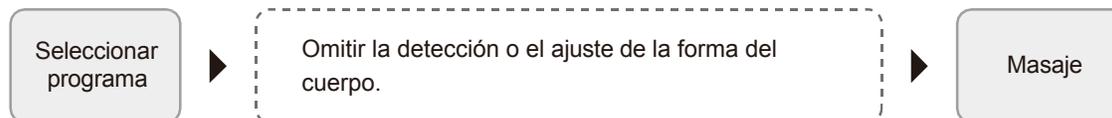

Ajuste del ángulo de inclinación y extensión del reposapiés / Uso de la parte del brazo

! PELIGRO


Verificá que no haya nadie, ninguna mascota ni objetos alrededor del sillón (parte trasera, delantera, laterales y parte inferior del cuerpo principal) cuando se recline o se mueva el reposapiés. No hacerlo puede causar accidentes, lesiones o daños en el hogar.

! ADVERTENCIA

No coloques tu pierna ni tu mano en la zona ajustable del reposapiés cuando este se esté moviendo.
No intentes sentarte sobre la parte frontal del reposapiés o del almohadón del asiento durante la inclinación.
No subas ni bajes del sillón mientras se está inclinando o cuando el reposapiés está elevado.

Ajuste del ángulo de inclinación y extensión del reposapiés

Pulse el "Botón de reclinado" para mostrar la "Pantalla de ajuste del reclinado".

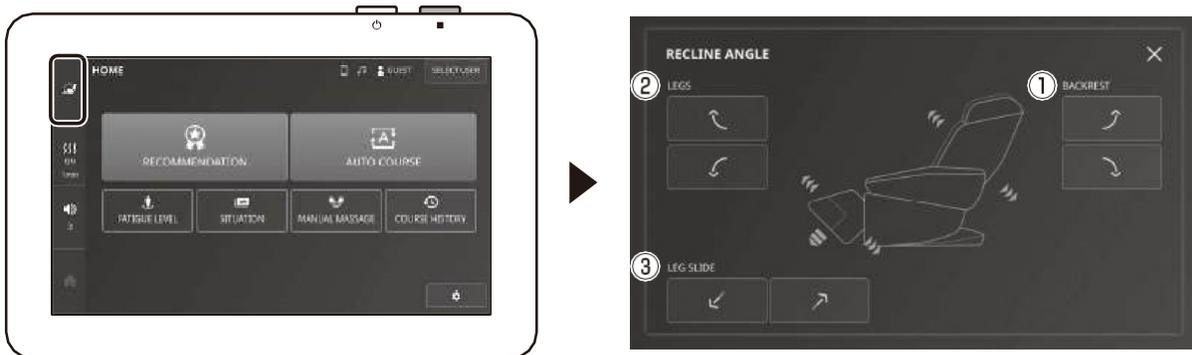


①	Ajuste el ángulo de inclinación. Ajuste el ángulo de las piernas.	
②	Ajusta el ángulo de las piernas.	
③	Ajuste la longitud de las piernas.	

Ajuste de la longitud de la sección de los pies

Estire la suela y ajuste la longitud del reposapiés.

- Sole puede estirar o contraer con el muelle. Apriételo con la pierna.
- Al volver a colocar el reposapiés en su posición original, evite aplicar fuerza sobre las plantas de los pies. Si el reposapiés se vuelve a colocar en su posición cuando los muelles están extendidos, la parte de la planta del pie podría golpear el suelo y entonces no será posible volver a colocar el reposapiés en su posición con suavidad.

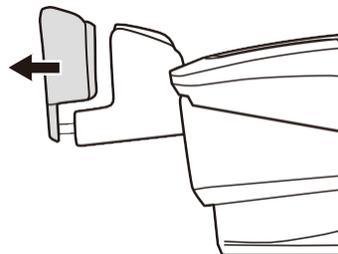


Uso de la parte del brazo

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el masaje de manos y brazos con relojes, anillos, uñas postizas o pulseras. Podría lesionarse.


Introduzca la mano con los dedos extendidos y la palma hacia abajo.

- No introduzca la mano en vertical ni con los dedos doblados.

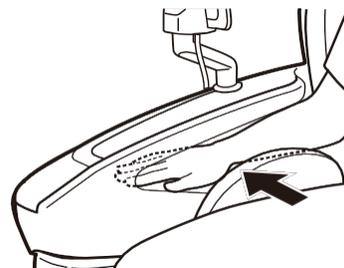

Si desea ajustar la posición del brazo (unidad de brazo)


- Puede ajustar la posición deslizando la parte del brazo cuando el respaldo está inclinado. Una vez inclinado el respaldo, deslice la parte del brazo hacia el respaldo (manual).
- Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación del respaldo, más se podrá deslizar el brazo hacia el lado del cojín del respaldo. Cuando el respaldo está en posición plegada (completamente vertical), el brazo no puede deslizarse.

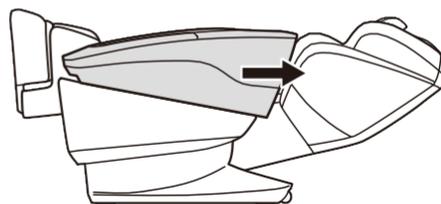

Masaje con programa (RECOMENDACIÓN / PROGRAMA AUTOMATICO)

Introducción

- Coloque el interruptor de alimentación del cuerpo principal en la posición "ON".
- Coloque la almohada hacia atrás, siéntese en el sillón y apoye lentamente la cabeza en el respaldo. Si desea suavizar la sensación del masaje, añada y utilice la almohada según sus preferencias.

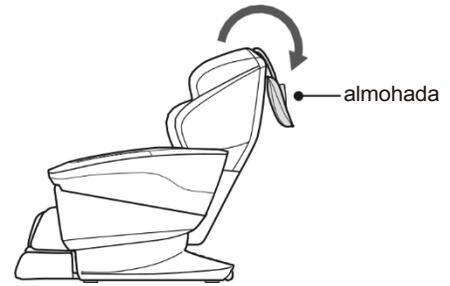


Comienza el programa recomendado o el programa automático.

1. Pulsa el botón de encendido para encenderlo.


- Aparece la pantalla de inicio.

2. Pulse "RECOMENDACIÓN" o "PROGRAMA AUTOMÁTICO" (RECOMMENDATION o AUTO COURSE).

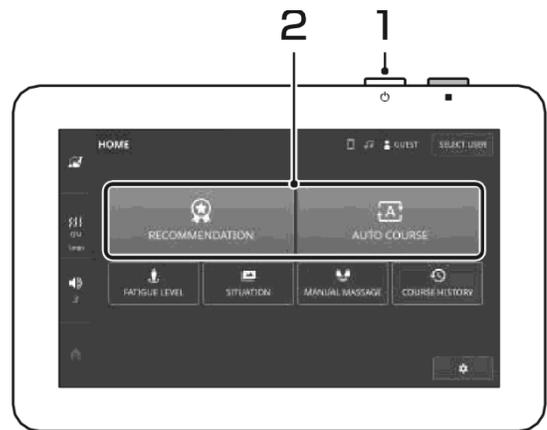


3. Pulse el nombre del programa que desee.

Ejemplo: Si elige "RECOMENDACION"

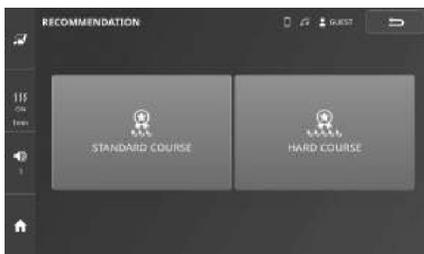

▼
Detección de la forma del cuerpo



Ejemplo: Si elige "AUTO COURSE" --> "TODO EL CUERPO" ("WHOLE BODY")

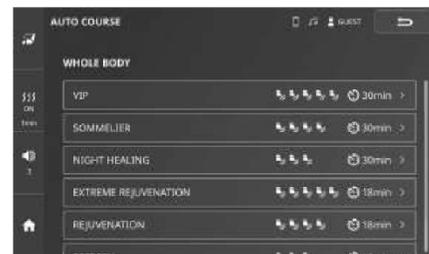

▼
Detección de la forma del cuerpo


4. La posición del hombro se detectará automáticamente. Una vez finalizada la detección, pulse "OK".

- Si la posición del hombro no es correcta, ajústela mediante "redetección" o "Ajuste".

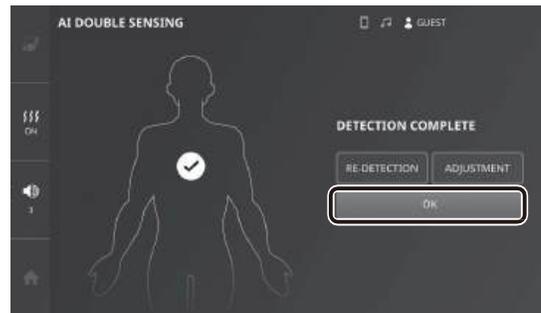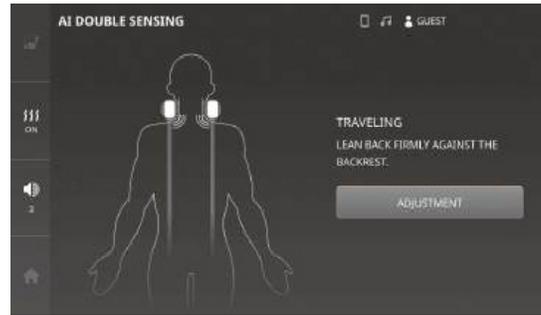


5. Una vez completada la detección de la posición del hombro, comenzará la detección de la línea de fondo. Una vez finalizada la detección, pulse "Start" para iniciar el recorrido.

- No retire la cabeza del respaldo durante la detección.
- Toca "Volver a detectar" para iniciar de nuevo la detección.
- Si se produce un error de detección, pulse "Volver a detectar" para realizar la detección de nuevo.

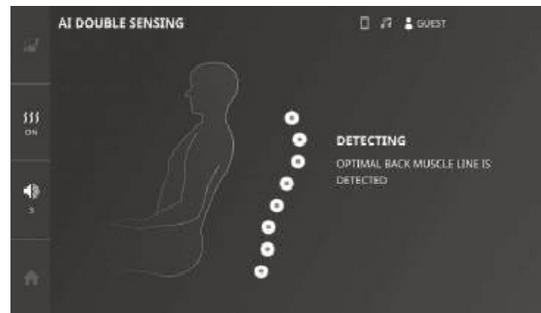

Masaje con programa (RECOMENDACIÓN / PROGRAMA AUTOMATICO)

6. Se muestran el programa automático seleccionado y la acción de masaje.

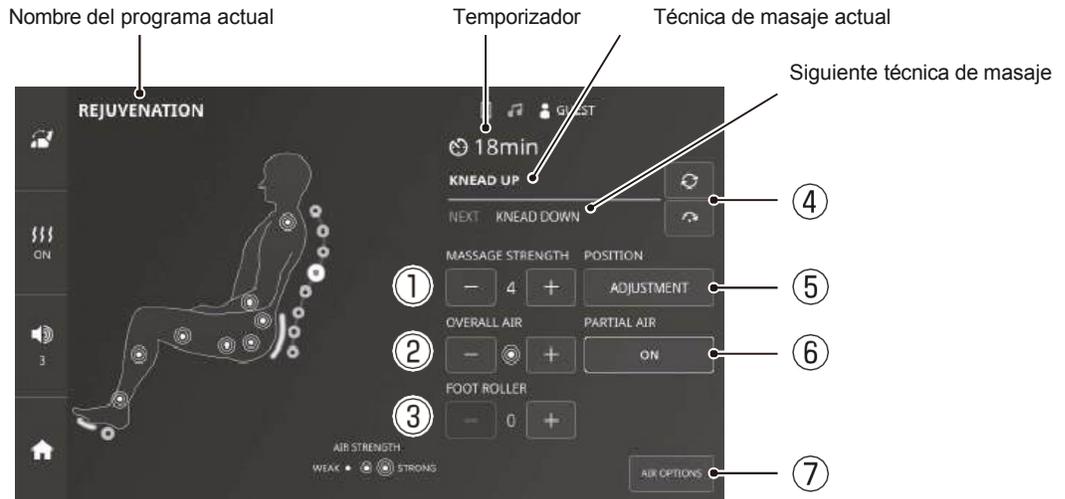

①		Ajuste de la fuerza del rodillo de masaje	Ajuste la fuerza de los rodillos de masaje (7 o 12 niveles, según el recorrido).
②		Ajuste de la fuerza general del masaje de aire	Ajuste por lotes de la intensidad de masaje de aire general (7 niveles).
③		Ajuste de la fuerza del rodillo de pie	Ajuste la intensidad del masaje del rodillo de pies. (3 niveles)
④		repetir	Repita la técnica de masaje actual.
		omitir	Pase a la siguiente técnica de masaje.
⑤		Ajuste de la posición del hombro / cintura	Ajuste la posición de los hombros y de la cintura (posición vertical). (P.25)
⑥		Ajuste del masaje de aire por zonas	Ajuste la intensidad del masaje de aire para cada parte del cuerpo (P.25)
⑦		Opciones de aire	Seleccione la opción de masaje de aire. (P.25)


Algunos elementos no pueden ajustarse o configurarse en función del programa seleccionado.

7. El masaje finalizará cuando se agote el temporizador.


Ajuste durante el método de programa automático

● Ajuste de la posición del hombro / cintura

- (1) Cuando los rodillos de masaje estén cerca del hombro, pulse "Ajustar" para mostrar la pantalla de ajuste de la posición del hombro.
- (2) Ajústelo a la posición deseada.
- (3) Pulse "OK" para volver a la pantalla del programa.

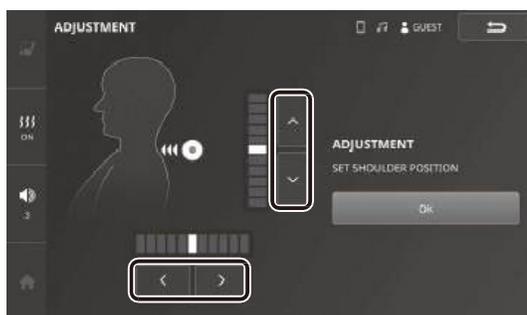

- (4) Cuando los rodillos de masaje se encuentren en la zona lumbar, al tocar "ajustar" aparecerá la pantalla de ajuste de la posición lumbar.
- (5) Ajústelo a su posición preferida.
- (6) Pulse "OK" para volver a la pantalla del programa.

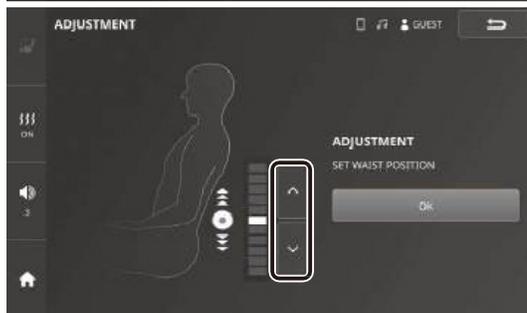


● Ajuste del masaje por zonas

- (1) Pulse "AIRE PARCIAL".
- (2) Pulse el botón de intensidad para cada parte del cuerpo y ajuste la intensidad a su gusto pulsando "+" o "-".
- (3) Pulse de nuevo "AIRE PARCIAL" para desactivar la visualización de la intensidad de cada zona.



● Opciones de aire

- (1) Pulse "Opciones de aire".
- (2) Configura tus opciones preferidas.
- (3) Pulse "OK" para volver a la pantalla del programa.

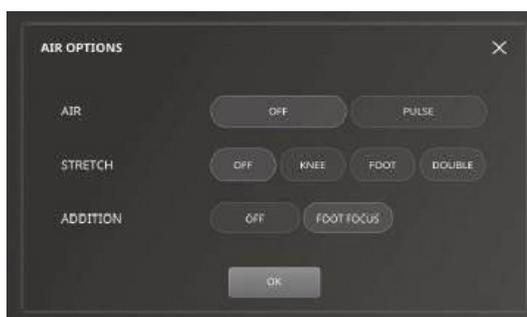

Masaje con programa (RECOMENDACIÓN / PROGRAMA AUTOMATICO)

Sobre la operación de los programas automáticos

Lista de detalles que se pueden ajustar durante la descripción de cada programa automático y durante el inicio o en medio del programa.

	Programa	Tiempo	Detección de hombros automática	Detección de forma de espalda automática	Fuerza de masaje	Fuerza de masaje de aire	Saltar / Repetir	Ajuste de posición de cintura	Rodillo de pies	Opción	
CUERPO COMPLETO	VIP	30min	●	●	7 niveles	●	-	●	●	-	
	SOMMELIER	30min	●	●	7 niveles	●	-	●	●	-	
	NIGHT HEALING	30min	●	●	7 niveles	●	-	●	●	-	
	EXTREME REJUVENATION	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	REJUVENATION	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	REFRESH	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	RELAX	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	SOFT	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	QUICK MASSAGE	7min	●	●	7 niveles	●	-	●	●	●	
PARTE	CUELLO / HOMBROS / ESPALDA	EXTREME REJUVENATION	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●
		REJUVENATION	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●
		REFRESH	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●
		RELAX	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●
		NECK FOCUS SHORT	7min	●	-	12 niveles	●	-	-	●	●
		SHOULDER FOCUS SHORT	7min	●	-	12 niveles	●	-	-	●	●
		SHOULDER BLADE FOCUS SHORT	7min	●	-	12 niveles	●	-	-	●	●
		BACK BODY TRUNK	7min	●	-	12 niveles	●	-	-	-	-
CINTURA / CINTICO / PIERNAS	EXTREME REJUVENATION	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	REJUVENATION	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	REFRESH	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	RELAX	18min	●	●	7 niveles	●	●	●	●	●	
	WAIST FOCUS SHORT	7min	-	-	12 niveles	●	-	●	●	●	
	WAIST BODY TRUNK	7min	●	-	12 niveles	●	-	-	-	-	

※ La línea de la columna vertebral no se puede ajustar.


	Programa	Tiempo	Detección de hombros automática	Detección de forma de espalda automática	Fuerza de masaje	Fuerza de masaje de aire	Saltar / Repetir	Ajuste de posición de cintura	Rodillo de pies	Opción	
PARTE	CINTURA / CLÁTICO / PIERNAS	SCIATIC FOCUS SHORT	7min	-	-	-	●	-	-	●	●
		FOOT FOCUS SHORT	7min	-	-	-	●	-	-	● (No se puede desactivar)	-
ESTIRAMIENTO	CUERPO COMPLETO	CONDITIONING	30min	●	-	7 niveles	●	-	-	-	-
		MINDFULNESS	30min	-	-	-	●	-	-	-	-
		EXTREME WHOLE BODY STRETCH	18min	●	-	7 niveles	●	-	-	-	-
		WHOLE BODY STRETCH	18min	●	-	7 niveles	●	-	-	-	-
		WHOLE BODY AIR	18min	-	-	-	●	-	-	-	●
		TECHNICAL STRETCH	18min	●	-	7 niveles	●	-	-	-	-
	PARTE	NECK STRETCH	7min	●	-	-	●	-	-	-	-
		SHOULDER STRETCH	7min	●	-	12 niveles	●	-	-	-	-
		BACK STRETCH	7min	●	-	-	●	-	-	-	-
		WAIST STRETCH	7min	-	-	-	●	-	●	-	-
		PELVIS CORE STRETCH	7min	-	-	-	●	-	-	-	-
		LEG / KNEE STRETCH	7min	-	-	-	●	-	-	-	-
		ARCH STRETCH	7min	-	-	-	●	-	-	-	-
RECOMENDACION	STANDARD COURSE	18min	●	●	7 niveles	●	●	-	●	●	
	HARD COURSE	18min	●	●	7 niveles	●	●	-	●	●	

※ La línea de la columna vertebral no se puede ajustar.


Sobre el fin del masaje

El tiempo de masaje es diferente en cada programa (7, 18, 30 min)

- Una vez finalizado el masaje, los rodillos de masaje vuelve a la posición de almacenamiento.
- Cuando la inclinación automática está "ON", el respaldo se elevará automáticamente y las piernas bajarán automáticamente. Cuando la inclinación automática está en "OFF", al pulsar "START STORING" se elevará el respaldo y bajarán las piernas. (P.44)
- Si no se realiza ninguna operación durante un tiempo una vez finalizado el masaje, el sillón se apagará.

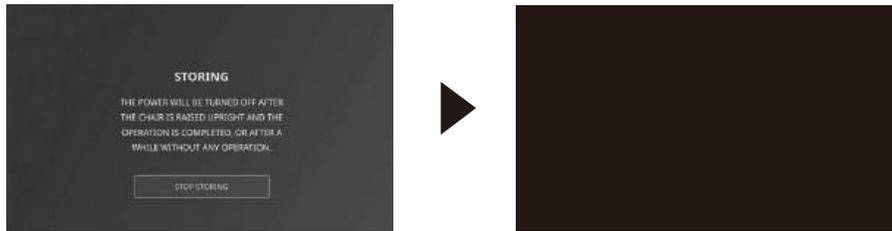

Al regresar el reposapiés a su posición original, evitá aplicar fuerza con las plantas de los pies. Si el reposapiés se mueve de regreso cuando los resortes están extendidos, la parte de la planta del pie podría golpear el suelo y luego no será posible volver a colocar el reposapiés suavemente en su posición.

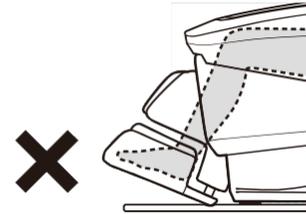

Cuando el masaje se detiene como tal

Pulse el botón "Parada repentina" o el botón "Inicio".


- Los rodillos de masaje se detienen manteniendo la posición actual.
- El temporizador continuará y volverás a la pantalla de inicio.



Cuando el masaje debe interrumpirse repentinamente

Pulsa el "botón de encendido".


- Los rodillos de masaje vuelve a la posición de almacenamiento.
- Cuando la inclinación automática está "ON", el respaldo sube automáticamente y las piernas bajan automáticamente. Cuando la inclinación automática está en "OFF", al pulsar "START STORING" se eleva el respaldo y se bajan las piernas.(P. 44).

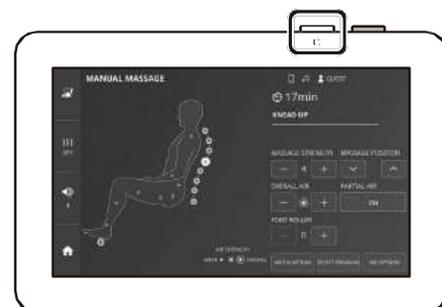


Desconecte la alimentación del cuerpo principal

1. Desconecte la alimentación del cuerpo principal

- El interruptor de encendido está en la parte inferior derecha, detrás del cuerpo principal.

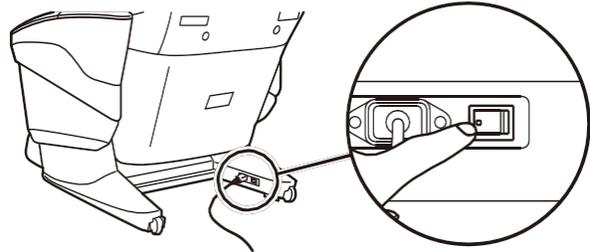

2. Retire el enchufe del cable de alimentación del receptáculo

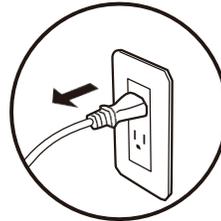


Masaje manual

Iniciar el masaje de frotamiento deseado

1. Pulse el botón de encendido para encender el sillón.

- Aparece la pantalla de inicio.

2. Pulse "Masaje manual".

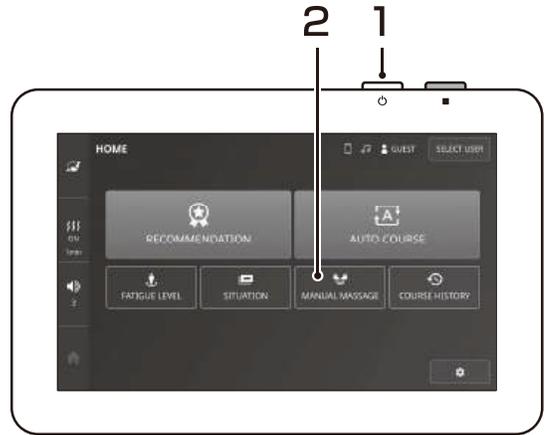


3. Toque el menú que prefieras.




4. Pulse el nombre de su técnica de masaje preferida.

- Inicia el masaje.

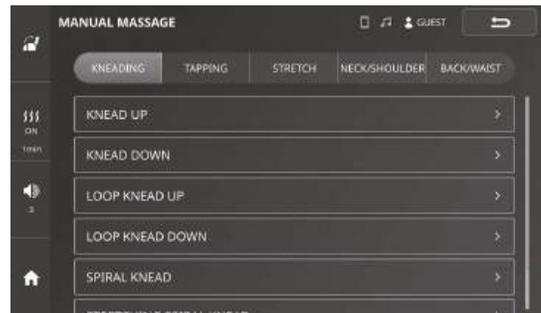

5. Se muestran la técnica de masaje y la acción de masaje seleccionadas.

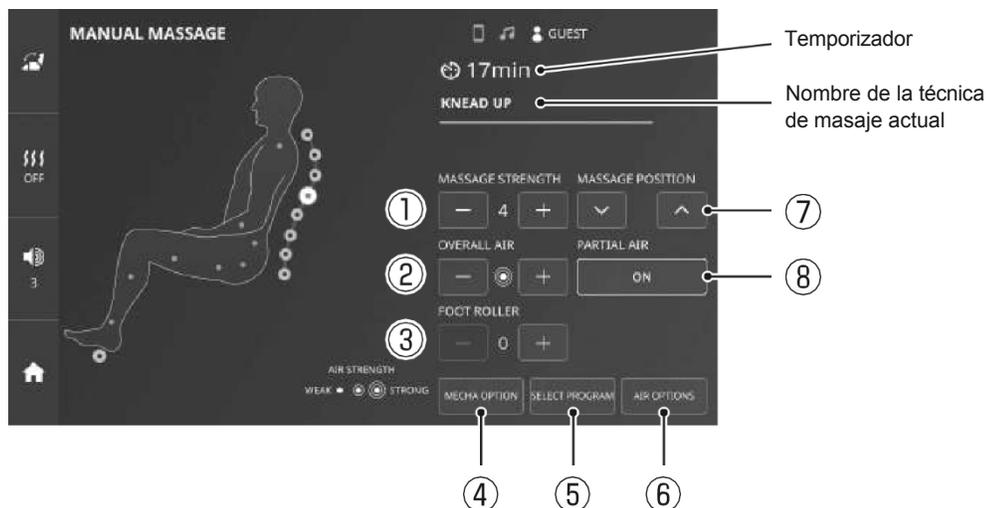

①		Ajuste de la fuerza de rodillos de masaje	Ajusta la fuerza de los rodillos de masaje (12 niveles)
②		Ajuste de la fuerza general del masaje de aire	Ajuste por lotes de la intensidad general del masaje de aire (7 niveles)
③		Ajuste de la fuerza del rodillo de pie	Ajuste la intensidad del masaje del rodillo de pies. (3 niveles)
④		Opción Mecha	Seleccione la opción de la técnica de masaje. (P.32)
⑤		Seleccionar programa	Aparecerá una lista de técnicas de masaje y podrá cambiar a otra técnica de masaje.
⑥		Opciones de aire	Seleccione la opción de masaje de aire. (P.32)
⑦		Ajuste de la posición de masaje	Ajuste la posición de masaje.
		Ajuste de la posición del hombro / cintura	Ajuste la posición de los hombros y de la cintura (posición vertical). (P.33)
⑧		Ajuste del masaje de aire por zonas	Ajuste la intensidad del masaje de aire para cada parte del cuerpo (P.33)

Algunos elementos no pueden ajustarse o configurarse en función del programa seleccionado.

Masaje manual

6. El masaje finalizará cuando se agote el temporizador.

Cómo ajustar durante el masaje


● Opción Mecha

- (1) Toque "Opción Mecha".
- (2) Configure las opciones a su gusto.
- (3) Pulse "OK" para volver a la pantalla de masaje.



● Opciones de aire

- (1) Pulse "Opciones de aire".
- (2) Configure sus opciones preferidas.
- (3) Pulse "OK" para volver a la pantalla de masaje.

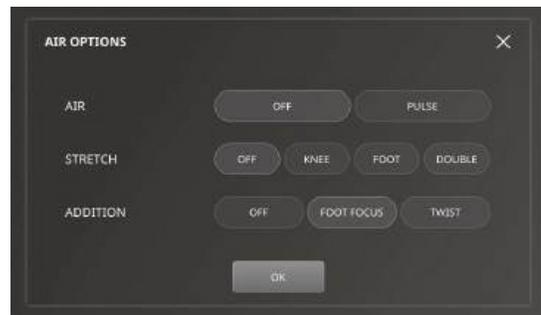

Opciones de masaje de aire

[PULSE]

El masaje se realiza poco a poco muchas veces con aire.

[KNEE]

La pierna se sujeta con aire y se estira hacia adelante.

[FOOT FOCUS]

El masaje de pantorrillas se puede realizar simultáneamente con otro masaje de aire.

[FOOT]

La pierna se sujeta con aire y se estira hacia abajo.

[TWIST]


El masaje con giro se realiza alrededor del centro de la cintura.

[DOUBLE]

La pierna se sujeta con aire y se estira hacia abajo mientras se estira hacia adelante.


● Ajuste del masaje por zonas

- (1) Pulse "AIRE PARCIAL".
- (2) Pulse el botón de intensidad para cada parte del cuerpo y ajuste la intensidad a su gusto pulsando "+" o "-".
- (3) Pulse de nuevo "AIRE PARCIAL" para desactivar la visualización de la intensidad de cada zona.

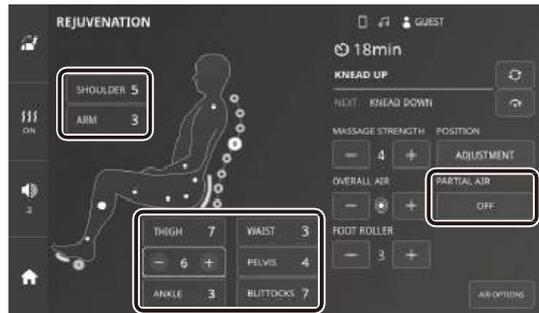

● Ajuste de la posición del hombro / cintura

- (1) Cuando los rodillos de masaje estén cerca del hombro, pulse "Ajustar" para mostrar la pantalla de ajuste de la posición del hombro.
- (2) Ajústelo a la posición deseada.
- (3) Pulse "OK" para volver a la pantalla de masaje.
- (4) Cuando los rodillos de masaje se encuentren en la zona lumbar, al pulsar "ajustar" aparecerá la pantalla de ajuste de la posición lumbar.
- (5) Ajústelo a su posición preferida.
- (6) Pulse "OK" para volver a la pantalla de masaje.

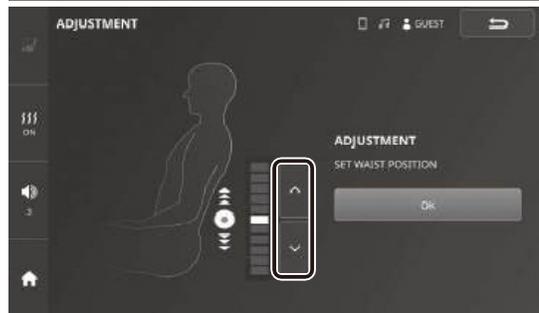

Masaje manual

Tabla de funciones de masaje mecha

Lista de ajustes que pueden ser utilizados en cada tecnica de masaje kneading.

	Programa	Ajuste de técnica kneading	Ajuste delantero y trasero de técnica kneading	Fuerza Mecha	Velocidad de masaje	Ancho Mecha	Combinación de rodillo de pies	Posición de masaje	
AMASADO	KNEADING	KNEAD UP / DOWN	-	-	●	●	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		LOOP KNEAD UP / DOWN	-	-	●	●	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		SPIRAL KNEAD	-	-	●	-	2 niveles	●	-
		PRECISION SPIRAL KNEAD	-	-	●	-	-	●	-
		RELAX KNEAD UP / DOWN	-	-	●	●	-	●	-
		PALMAR KNEAD UP / DOWN	-	-	●	-	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		3D KNEAD UP / DOWN	-	-	-	-	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		PUSH & KNEAD	-	-	●	●	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		RUBBING MASSAGE	-	-	●	●	-	●	-
GOLPETEO	TAPPING	TAPPING	-	-	●	●	●	●	TODO / PARTE / PUNTO
		WAVELET	-	-	●	●	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		IRREGULAR WAVES WAVELET	-	-	●	-	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		TAPPING SPIRAL KNEAD	-	-	●	-	-	●	-
		TAPPING PRECISION SPIRAL KNEAD	-	-	●	-	-	●	-
		3D TAPPING	-	-	-	-	●	●	TODO / PARTE / PUNTO
		3D WAVELET	-	-	-	-	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
ESTRIMIENTO	STRETCH	ROLLING	posición de hombros	●	●	-	●	●	PARTE / PUNTO
		WAVE ROLLING	posición de hombros	●	●	●	-	●	PARTE / PUNTO
		SHIATSU	-	-	●	-	●	●	TODO / PARTE / PUNTO
		SHIATSU STRETCH	-	-	●	-	●	●	TODO / PARTE / PUNTO
		STRETCH	-	-	●	-	●	●	TODO / PARTE / PUNTO
		STRETCH KNEAD UP	-	-	●	●	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		STRETCH TAPPING	-	-	●	●	●	●	TODO / PARTE / PUNTO
		STRETCH WAVELET	-	-	●	●	-	●	TODO / PARTE / PUNTO
		STRETCH SHIATSU	-	-	●	2 niveles	●	●	PARTE / PUNTO
		LIFT UP / PUSH DOWN	-	-	●	-	-	●	-
CUELLO / HOMBROS	NECK / SHOULDER	NECK SHIATSU	posición de hombros	●	-	-	-	●	-
		NECK RELAX	posición de hombros	●	-	-	-	●	-
		NECK UPWARD LIFTING	posición de hombros	-	-	-	-	●	-
		NECK PALMAR KNEAD	posición de hombros	●	-	-	-	●	-
		NECK / SHOULDER EXTREME KNEAD	posición de hombros	●	-	-	-	●	-
		NECK / SHOULDER EXTREME TAPPING	posición de hombros	●	-	-	-	●	-
		SHOULDER TAPPING	posición de hombros	●	-	-	-	●	-
		UPPER SHOULDER PRESS	-	-	-	-	-	●	-
		COLLAR DOWNWARD PRESSING	posición de hombros	-	-	-	-	●	-
		TOP SHOULDER LINE SHIATSU	posición de hombros	-	-	-	-	●	-
ESPALDA / CINTURA	BACK / WAIST	SHOULDER BLADE LINE	-	-	●	-	-	●	-
		RHOMBOID	posición de hombros	●	●	-	-	●	-
		SHOULDER BLADE OPEN	posición de hombros	●	●	-	-	●	-
		UPPER BACK DEEP SHIATSU	posición de hombros	-	-	-	-	●	-
		WAIST EXTREME KNEAD	posición de cintura	-	-	-	-	●	-
		WAIST EXTREME TAPPING	posición de cintura	-	-	-	-	●	-
		PARASPINAL	posición de hombros	●	●	●	-	●	-
		LUMBAR DEEP SHIATSU	posición de cintura	-	-	-	-	●	-
		WAIST SHIATSU	posición de cintura	-	-	-	-	●	-
		WAIST PALMAR	posición de cintura	-	-	●	-	●	-
BUTTOCK	-	-	-	-	-	●	-		


Masaje de aire

Iniciar masaje de aire

1. Pulse el botón de encendido para encenderlo.

- Aparece la pantalla de inicio.

2. Pulse "Masaje manual".

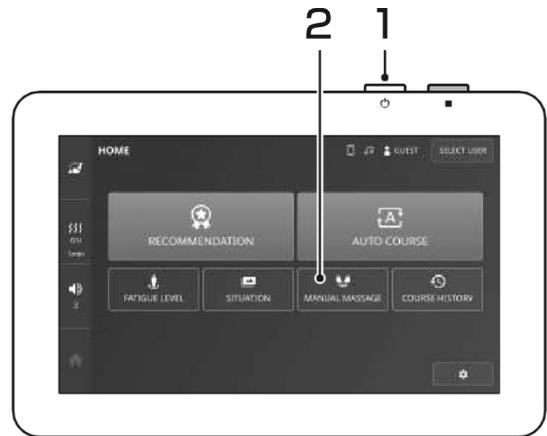


3. Pulse "Masaje de aire".




4. Ajuste la intensidad deseada y pulse "OK".

- Se puede seleccionar individualmente la fuerza del aire de "Hombros", "Brazos", "Cintura", "Pelvis", "Glúteos", "Muslos", "Pantorrilla", "Tobillo".
- Se puede reducir con "-" y aumentar con "+".
- El reposapiés no baja a la posición de reposo mientras se utiliza el masaje de aire de pie o el rodillo de pie.
- Apague el aire de los pies y el rodillo de los pies y baje el reposapiés cuando desee bajar el reposapiés a la posición de reposo.

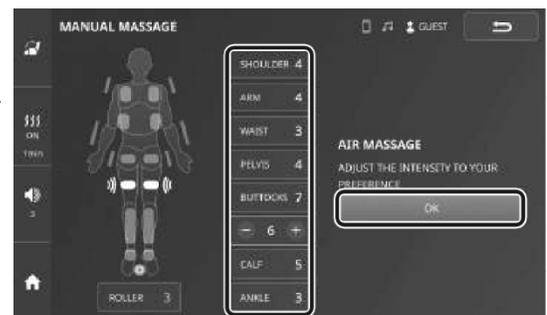

Masaje de aire

5. Se muestra el funcionamiento del masaje de aire.

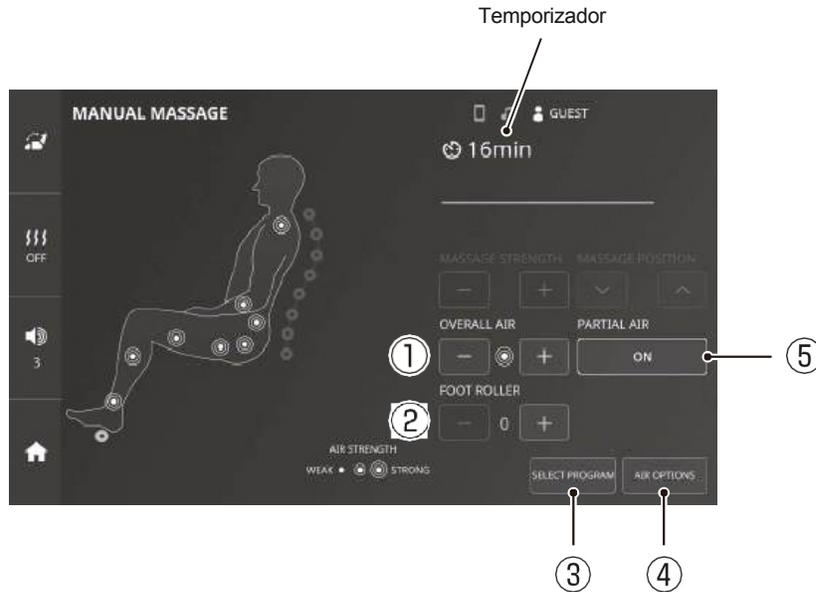

①		Ajuste de la fuerza general del masaje de aire	Ajuste por lotes de la intensidad general del masaje de aire (7 niveles)
②		Ajuste de la fuerza del rodillo de pie	Ajuste la intensidad del masaje del rodillo de pies. (3 niveles)
③		Seleccionar programa	Aparecerá una lista de técnicas de masaje y podrá cambiar a otra técnica de masaje.
④		Opciones de aire	Seleccione la opción de masaje de aire. (P.32)
⑤		Ajuste del masaje de aire por zonas	Ajuste la intensidad del masaje de aire para cada parte del cuerpo (P.33)

Algunos elementos no pueden ajustarse o configurarse en función del programa seleccionado.

6. El masaje finalizará cuando se agote el temporizador.

Masaje con técnica y masaje de aire juntos.


Masaje combinado con aire durante la técnica de masaje

1. Pulse "AIRE PARCIAL".

- Se visualiza la fuerza de cada zona y comienza el masaje de aire.



2. Pulse el indicador de intensidad de cada zona y ajústela a la intensidad deseada.

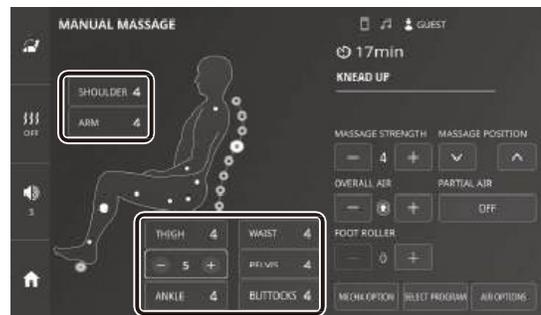


Técnica de masaje combinado con masaje de aire

1. Pulse "SELECCIONAR PROGRAMA".

- Aparece una lista de técnicas más firmes.



2. Pulse el nombre de la técnica de masaje que desee para iniciar el masaje.

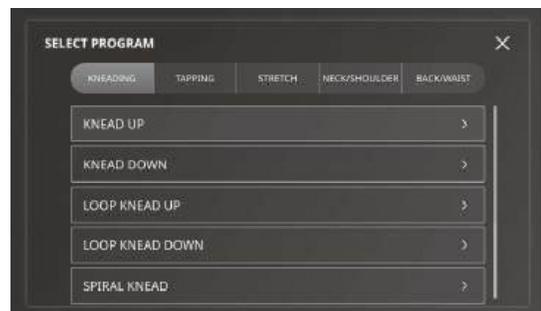

Nivel de fatiga


Analiza el nivel de fatiga de tu cuerpo dando golpecitos en las zonas cansadas de tu cuerpo. En función de los resultados del análisis, el sillón de masaje le guiará por el mejor camino.

Iniciar un masaje adaptado al nivel de fatiga física.

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato.

- Aparece la pantalla de inicio.

2. Toca "NIVEL DE FATIGA".

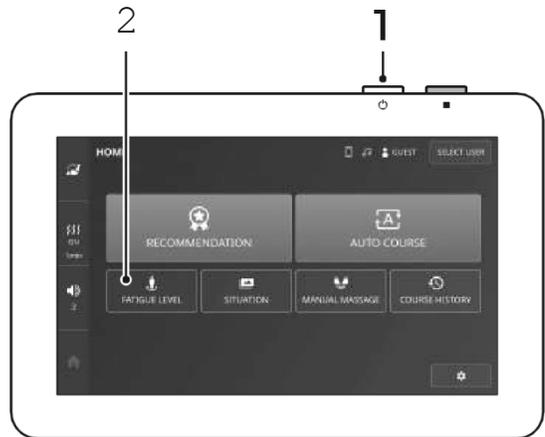

3. Rellene la zona cansada tocando el la pantalla con el dedo.

- Toca con el dedo la parte cansada del cuerpo para rellenar la zona.
- Los toques repetidos oscurecerán el color. Si la zona está especialmente cansada, rellénala con un color más oscuro (3 niveles).



4. Pulse "ANÁLISIS".

- Se analizan los niveles de fatiga y se muestran los programas de masaje recomendados.



5. Pulse "INICIAR MASAJE".

- El masaje comenzará.
- Toque "RESTART" para volver al estado anterior al llenado.



Situación

Le orientaremos sobre el programa de masaje que mejor se adapte a sus necesidades.

Comenzando el masaje con propósito



1. Pulse el botón de encendido para encender el sillón.

- Aparece la pantalla de inicio.

2. Pulse "SITUACIÓN".

3. Seleccione la opción que mejor se adapte a su propósito.

- El masaje comenzará.

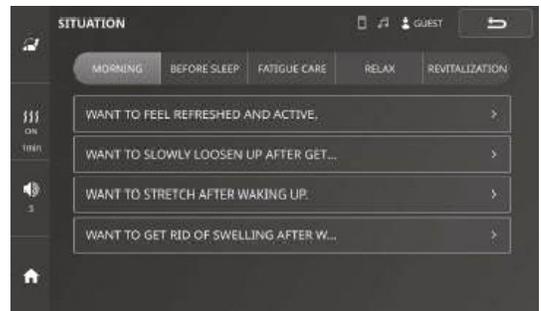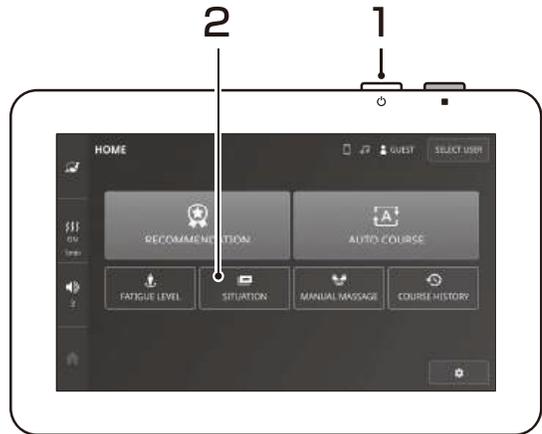


Muestra hasta 10 programas de masaje recientemente realizados.

Ver el historial de programas

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato.

- Aparece la pantalla de inicio.

2. Pulse "Historial de programas".

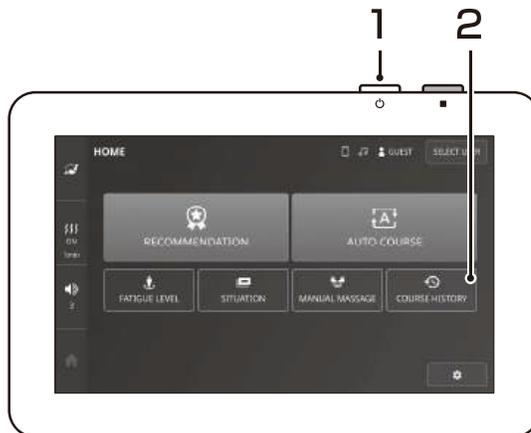

3. Aparecerá "Historial de programas" (máximo 10 programas)

- Pulse el nombre del programa para iniciar el masaje.






Función de Calor ON/OFF

! PELIGRO

No utilice el calor durante mucho tiempo, ni en el mismo lugar durante mucho tiempo.
 Puede causar alta temperatura o lesiones.
 Incluso a una temperatura comparativamente baja (40-60C), y no utilice el calor en el mismo lugar de la piel durante mucho tiempo.
 Puede causar alta temperatura o lesiones.

1. Pulse el "botón de calor".

- Los calefactores de espalda y pies se encienden.
- Toca de nuevo para apagar ("OFF").
- Cuando se utiliza con masaje, el calefactor también se apaga cuando termina el masaje.
- Pulsando el "botón de calor" en la pantalla de inicio podrá utilizar el calentador de forma independiente. Cuando se utiliza el calefactor solo, finalizará automáticamente después de unos 60 minutos.

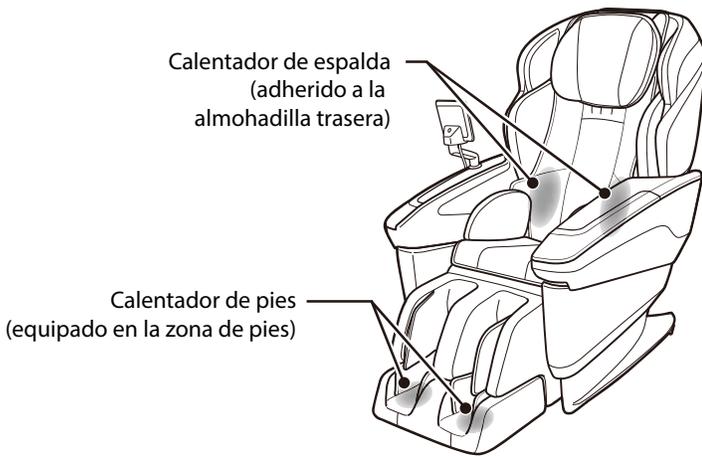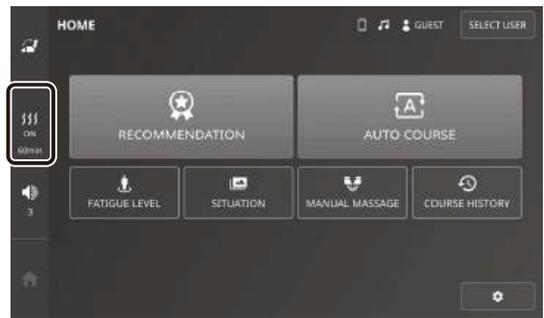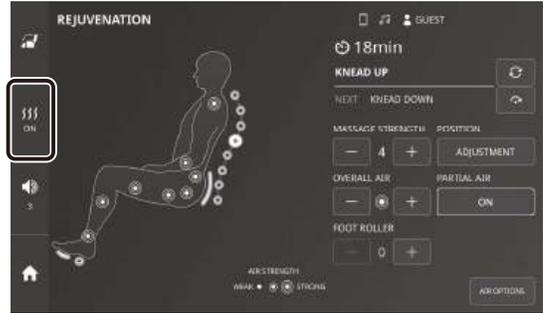

Ubique la almohadilla trasera (parte del calentador)


Cuando el calor trabaja en la zona de la cintura

Coloque la almohadilla en la espalda.



Cuando el calor trabaja en la zona del estómago

Retire los cierres (1) que sujetan la almohadilla trasera y el respaldo, levante los cierres (2) de la parte posterior del respaldo y coloque la parte del calefactor delante de su cuerpo como un chaleco.

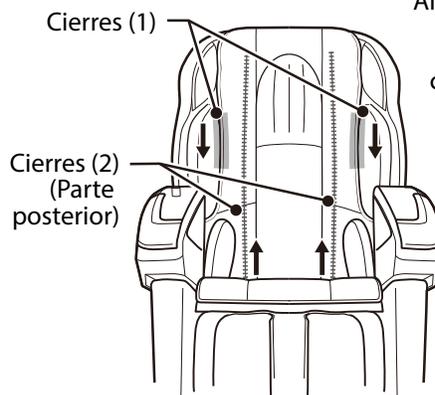

Masaje con rodillo de pies



ADVERTENCIA

No golpee los dedos de los pies contra los rodillos. Podrían producirse lesiones.



Los rodillo masajeadores de pies pueden utilizarse con la combinación de programas automáticos o masaje manual.
※ No se puede utilizar solo.

1. Toque "-" o "+" en "rodillo de pies" durante el programa automático o la operación de masaje con técnica de masaje.

- Toca "-" para hacerlo más débil y "+" para hacerlo más fuerte.
- Puede elegir entre tres niveles de intensidad. Cuando la intensidad es "1", al pulsar "-" se desactiva.
- Cuando se activa el rodillo de pies, el aire de pantorrilla y tobillo se encenderá automáticamente. Cuando el rodillo de pies está encendido, el aire de pantorrilla y tobillo no se puede apagar.
- Dependiendo del programa o de la técnica de masaje seleccionada, puede que no sea posible combinar el rodillo de pies o apagarlo.



[Cuando no se puede combinar]

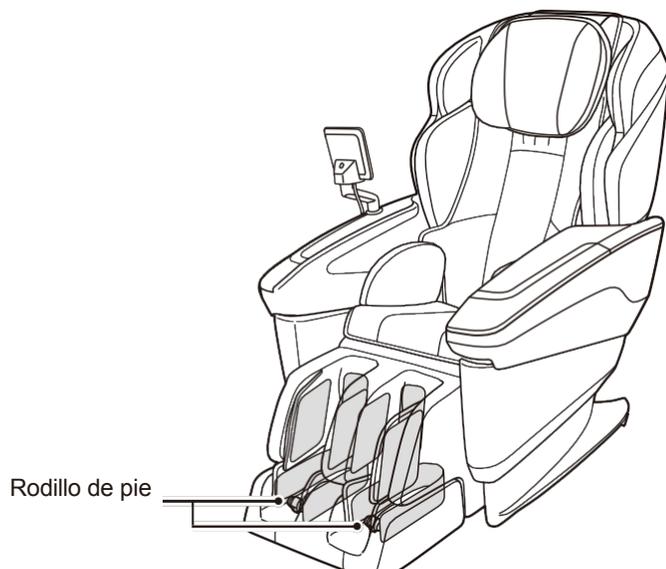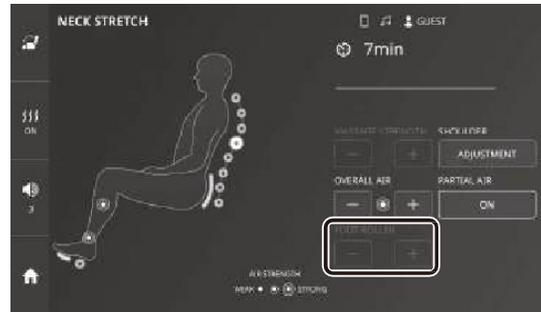


Control de volumen del sonido de funcionamiento

El volumen del "sonido de funcionamiento" del control remoto puede ajustarse.

1. Pulse el "botón de control de volumen" que aparece en la parte izquierda de la pantalla.


- Cada vez que se pulse el botón, el volumen cambiará de "1" a "2" a "3" y a "OFF".
- El volumen del altavoz BLUETOOTH no se puede ajustar con los botones de control de volumen.

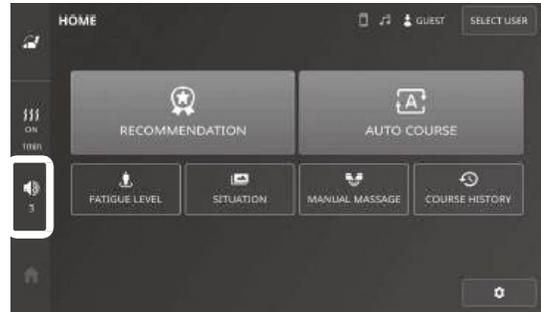

Indicación de los botones de control de volumen


	Sonido de funcionamiento: OFF Algunos sonidos de funcionamiento, como el sonido "bip, bip" durante la inclinación, no se desactivan.
	Sonido de funcionamiento: Bajo
	Sonido de funcionamiento: Medio
	Sonido de funcionamiento: alto

Parte posterior del control remoto

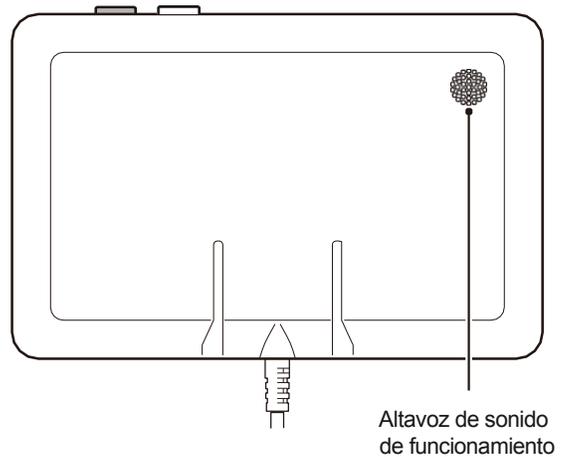


Ajustes (Idioma / Reclinación automática / Brillo de la pantalla / Reinicio de Bluetooth)

Abre la pantalla de ajustes desde el "símbolo de engranaje" de la pantalla de inicio para configurar diversos ajustes.

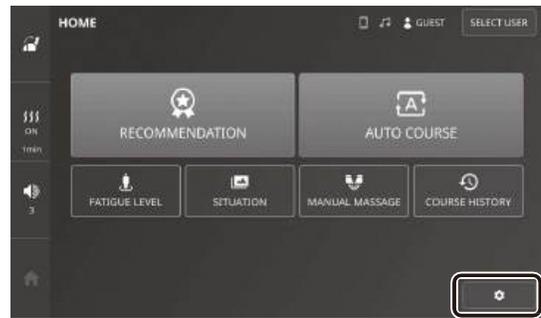

Idioma


El idioma de visualización del control remoto puede cambiarse a otro idioma.

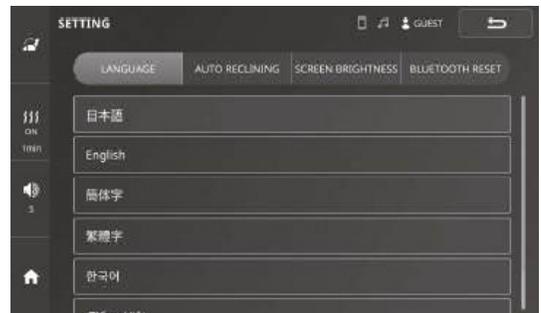


Reclinación automática

La "reclinación automática" es una función que retrae automáticamente las piernas, eleva el respaldo y apaga todas las funciones cuando finaliza un masaje o cuando se apaga el sillón.

- Cuando comienza el guardado, primero se retraen las piernas y luego se levanta el respaldo.
- Cuando se vuelva a encender el interruptor de alimentación de la unidad principal, continuará el ajuste "ON/OFF" de la reclinación automática.

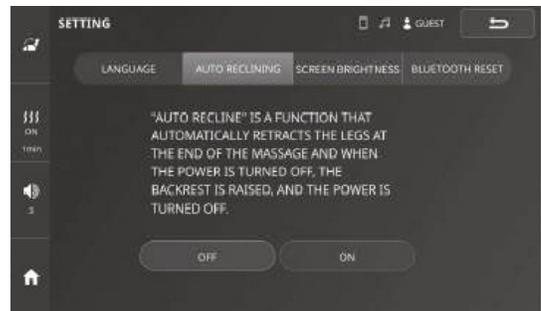


- Al final del masaje

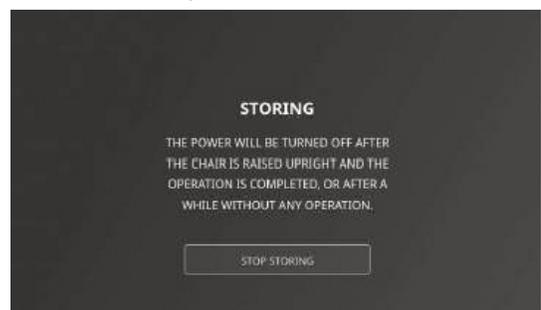

Brillo de la pantalla


Brillo de pantalla regulable (11 niveles)

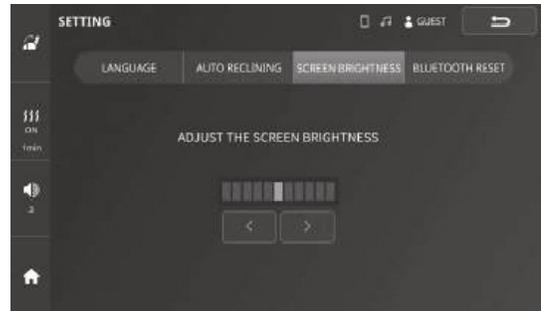

Reinicio de Bluetooth

La información de emparejamiento Bluetooth se puede restablecer.

- Para más detalles, consulte "Acerca del restablecimiento de la información de emparejamiento". (P.49)

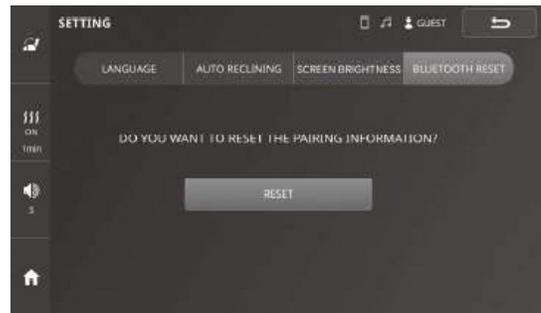

Uso del altavoz BLUETOOTH®

Cuando el BLUETOOTH está conectado, puedes escuchar música a través de los altavoces BLUETOOTH.



ADVERTENCIA

Por favor, no escuche a un volumen alto.
Escuchar a un volumen alto durante mucho tiempo puede dañar su audición.

Precauciones de uso de los altavoces

- Asegúrese de leer las instrucciones del dispositivo BLUETOOTH cuando lo utilice.
- La empresa no será responsable si desaparece el contenido almacenado en el dispositivo conectado.
- Al conectar, asegúrese de reducir previamente el volumen del dispositivo.
- Si hay dispositivos electrónicos o transmisores (teléfonos móviles, etc.) cerca del producto, pueden interferir con él. Manténgase alejado de ellos cuando utilice el sillón de masaje.
- Si el producto se utiliza cerca de una antena del televisor o radio, éstos pueden producir ruido. Manténgase alejado de ellos cuando utilice el sillón de masaje.

Al conectarse por primera vez

Debe realizarse el emparejamiento. Una vez realizado el emparejamiento con éxito, el sistema guardará la información de conexión, y se conectará automáticamente a partir de la siguiente vez. Puede almacenar la información de conexión de hasta 5 dispositivos.

※ No se puede conectar con más de un dispositivo al mismo tiempo.

Conectar con un teléfono inteligente

1. Pulsa el botón de encendido para encenderlo.

- Aparece la pantalla de inicio.



2. Abra la pantalla de configuración de BLUETOOTH mediante la aplicación de configuración del smartphone, etc.

- Para iOS, ajustes → BLUETOOTH, y para Android, ajustes → Dispositivo conectado → Nuevo dispositivo de emparejamiento (el nombre puede variar según la versión).
- Después de la búsqueda, "Massage Chair H22" se mostrará en el dispositivo BLUETOOTH.
- Pulsa el botón "buscar" cuando estés cerca del sillón de masaje. Por favor, lea las instrucciones del celular para su funcionamiento.

3. Cuando aparezca "Massage Chair H22", haga clic en él.

- En iOS, se mostrará en la parte inferior de la pantalla, y en Android, en el campo "Dispositivos disponibles" (el nombre puede variar según la versión).
- Después de seleccionar "Massage Chair H22", en la pantalla aparece un mensaje como "Emparejando" o "En emparejamiento" y, a continuación, el dispositivo se conecta (permite el emparejamiento en caso de que se solicite permiso). Para iOS, la posición de visualización de "Massage Chair H22" se desplaza al campo "Mis dispositivos" y para Android la posición de visualización de "Massage Chair H22" se desplaza al campo "Dispositivos conectados".
- Una vez completado el emparejamiento, el icono "♪" aparecerá en blanco en la pantalla del control remoto.
- Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo se conectará automáticamente. (hasta 5)
- Si el emparejamiento falla, reinicie la alimentación del cuerpo principal del sillón de masaje e inténtelo de nuevo.
- Dado que el sonido puede emitirse a un volumen alto, baje el volumen del altavoz antes de utilizarlo.
- El volumen del altavoz BLUETOOTH no puede ajustarse con el "Botón de control de volumen" de la pantalla del control remoto. Por favor, ajústelo con el dispositivo.
- En caso de masaje, por favor complete la conexión primero y luego realice las operaciones de masaje como de costumbre.
- Si se utiliza junto con el masaje, la música también dejará de sonar cuando termine el masaje.
- Si se utiliza junto con el calefactor, éste se detendrá al cabo de unos 60 minutos, pero la música continuará.
- Si no hay reproducción de música o no se realiza ninguna operación durante 3 minutos durante la conexión BLUETOOTH, la alimentación se apagará automáticamente.

Uso del altavoz BLUETOOTH®

Conexión desde otros dispositivos (TV, transmisor, etc.)

Explicación de los pasos de conexión habituales para dispositivos sin pantalla de funcionamiento.

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato.
 - Aparece la pantalla de inicio.



2. Accione el dispositivo que desea conectar y entre en el modo de emparejamiento.



El nombre del modo de emparejamiento y las operaciones para cambiar al modo de emparejamiento varían según el dispositivo. Consulte las instrucciones del dispositivo para obtener más información.

Cuando el estado de visualización del dispositivo cambia, significa que ha entrado en modo de emparejamiento.

3. Espere brevemente hasta que la conexión se realice correctamente.

- Cuando cambia el estado de visualización del LED del dispositivo, significa que la conexión se ha completado.
- Una vez completado el emparejamiento, el icono "🎵" aparecerá en blanco en la pantalla del control remoto.
- Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo se conectará automáticamente. (hasta 5)
- Si el emparejamiento falla, reinicie la alimentación del cuerpo principal del sillón de masaje e inténtelo de nuevo.
- Dado que el sonido puede emitirse a un volumen alto, baje el volumen del altavoz antes de utilizarlo.
- El volumen del altavoz BLUETOOTH no puede ajustarse con el "Botón de control de volumen" de la pantalla del control remoto. Por favor, ajústelo con el dispositivo.
- En caso de masaje, por favor complete la conexión primero y luego realice las operaciones de masaje como de costumbre.
- Si se utiliza junto con el masaje, la música también dejará de sonar cuando termine el masaje.
- Si se utiliza junto con el calefactor, éste se detendrá al cabo de unos 60 minutos, pero la música continuará.
- Si no hay reproducción de música o no se realiza ninguna operación durante 3 minutos durante la conexión BLUETOOTH, la alimentación se apagará automáticamente.

El icono "🎵" aparecerá en blanco en la pantalla del control remoto.

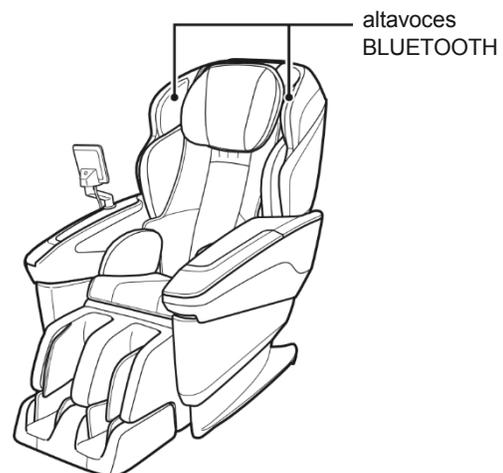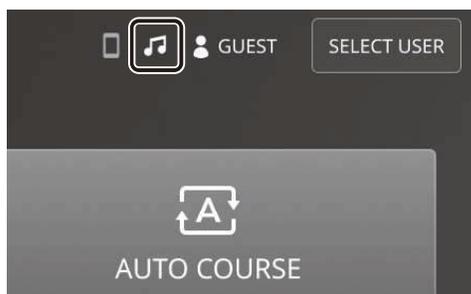

Al conectarse por segunda vez

1. Después de encender el smartphone o el dispositivo, pulse el "botón de encendido" para encenderlo y la conexión se establecerá automáticamente.

- El sillón de masaje puede guardar la información de conexión de hasta 5 dispositivos.
- Después de conectar la alimentación, el sillón de masaje intentará conectarse según el orden de la información de conexión almacenada. La conexión puede tardar un tiempo (unos 30 segundos).



Para reiniciar la información de emparejamiento


En los siguientes casos, debe restablecerse la información de emparejamiento.

- Cuando no desee que el sillón de masaje se conecte automáticamente al dispositivo.
- Cuando quieras que se conecte automáticamente con un dispositivo después de que ya se hayan registrado 5.
- Cuando quiera restaurar la conexión a su estado inicial.

Tenga en cuenta que después de restablecer la información de emparejamiento, se borrará toda la información de conexión anterior.


1. En "Modo invitado", abra la pantalla de ajustes desde el "símbolo de engranaje" de la pantalla de inicio.

2. Pulse "Restablecer Bluetooth" y pulse "Restablecer" para restablecer la información de emparejamiento.

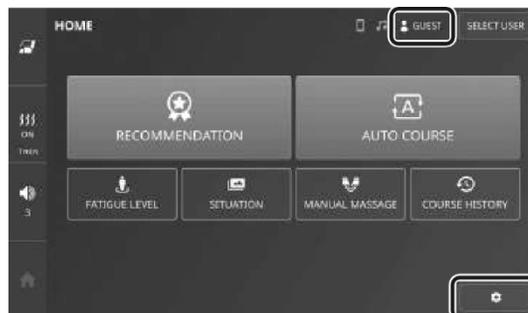

[Nota] Después de restablecer la información de emparejamiento, la información de conexión debe borrarse también en el dispositivo de conexión. Para un smartphone, busque el nombre "Massage Chair H22" a través de la configuración BLUETOOTH de la App de configuración y cancele el emparejamiento o cancele la configuración de emparejamiento.

[Explicación] La información sobre la conexión entre el sillón de masaje y el dispositivo se almacenará tanto en el sillón de masaje como en el dispositivo de conexión. Dado que esta información se vincula mediante el emparejamiento o el ajuste de emparejamiento, cuando se pierda la información de conexión de un lado, la del otro lado también quedará invalidada.

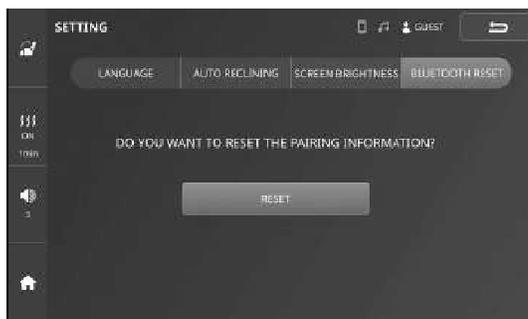

Acerca del modo personalizado por el usuario

Funciones del modo personalizado por el usuario

- Puede registrar / personalizar información para 2 usuarios.
Seleccione Usuario 1 ó 2 y registre la información personalizada. El registro de información personalizada le permite omitir la detección de la forma del cuerpo al inicio del programa y comenzar el masaje inmediatamente.
- El uso del masaje y los distintos ajustes son los mismos que en el Modo Invitado.
Excepto el registro de información personalizada, las demás operaciones son las mismas que en el Modo Invitado. Consulte el uso del Modo Invitado. (P.20-49)
* El "Bloqueo Infantil" y el "Restablecimiento de la información de emparejamiento BLUETOOTH" no pueden realizarse en el modo personalizado por el usuario. Por favor, hágalo en el Modo Invitado.
- Para conocer las limitaciones de las funciones de cada modo, consulte la tabla de la página de especificaciones. (P.67)

Información personalizada registrable (Modo personalizado por el usuario)

PERSONALIZACIÓN DE LA FORMA DE LA ESPALDA

Información de posición de hombros/cintura

Información sobre la posición de los hombros y la cintura.

Seleccione el punto de masaje del programa automático.

Información de detección de curva en S

Para que el sillón de masajes trabaje de manera uniforme a lo largo de la espalda, esta función recolecta información de la línea dorsal. Los datos detectados también se pueden editar según las preferencias.

PERSONALIZACIÓN DEL ÁNGULO DE RECLINACIÓN

Información de reclinación


Es posible registrar la información del ángulo preferido del respaldo, ángulo de las piernas y longitud de piernas.

PERSONALIZACIÓN DE AIRE


Información de presión de aire

Después de la configuración previa, es posible registrar la intensidad preferida del masaje por aire.

Ejemplo de primer registro de información personalizada:

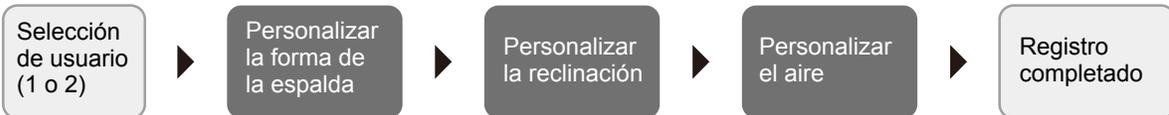

Cuando registres la información de reclinación y selecciones Usuario 1 o 2, el respaldo y las piernas se moverán automáticamente al ángulo registrado. Tené en cuenta tu entorno.

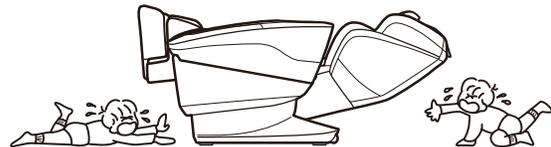


Al usar el modo personalizado por el usuario por primera vez

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato.

- Aparece la pantalla de inicio.

2. Pulse "Seleccionar usuario".

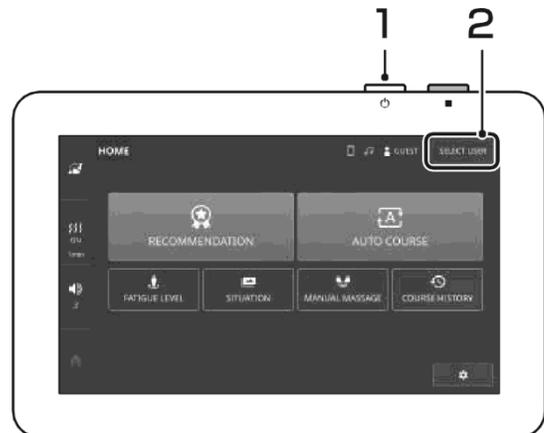


3. Pulse "Usuario 1" o "Usuario 2".




4. Pulse "Inicio" para iniciar los ajustes de personalización en el orden de forma de la espalda, inclinación y aire.

- Por favor, consulte de P.52 a P.56 para más detalles sobre varios métodos de personalización.
- Si no se ha completado el registro de la línea de la espalda, no se podrá utilizar el modo personalizado por el usuario.
- Al personalizar la presión de aire, pulse "Omitir" para saltarse el ajuste.
- No desconecte la alimentación durante el registro, de lo contrario no se podrá completar el registro de la información personalizada.

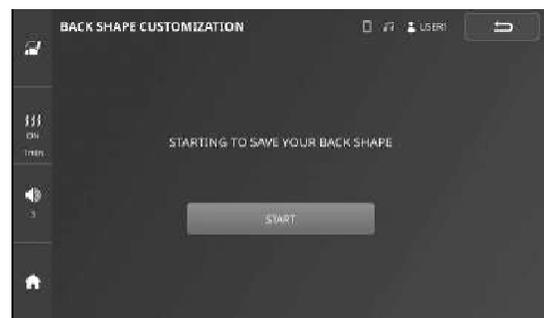

5. Una vez completado el registro de la información personalizada, aparecerá la pantalla de inicio.


- Una vez finalizado el registro de la información personalizada, se puede realizar el masaje en el modo personalizado por el usuario. El funcionamiento es el mismo que en el modo invitado.

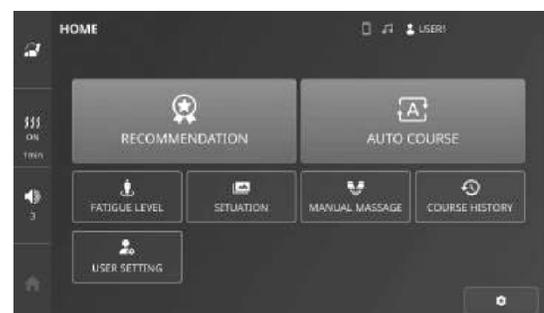

Acerca del modo personalizado por el usuario


Para restablecer la información del usuario (volver a registrarse)

1. Inicie sesión en "Usuario 1" o "Usuario 2" y pulse el "símbolo de engranaje".

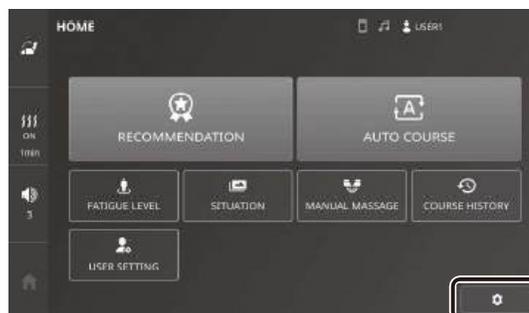


2. Pulse "Restablecer" para iniciar los ajustes de personalización en el orden de forma de la espalda, inclinación y aire.

- Para mantener la disponibilidad inmediata del masaje, la información de la línea dorsal no se borra. Si el usuario cancela antes de sobrescribir la información en la personalización de la línea dorsal tras restablecer la información de usuario, la información de la línea dorsal mantendrá el valor anterior.

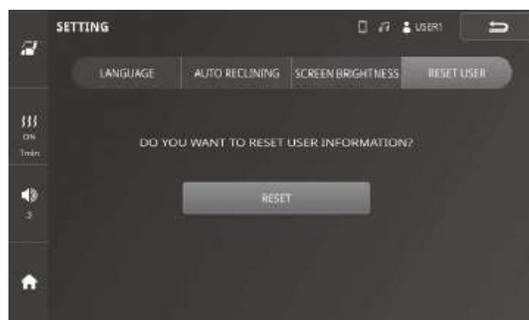

Personalizar la forma de la espalda

1. Inicie sesión en "Usuario 1" o "Usuario 2" y pulse "Configuración de usuario".

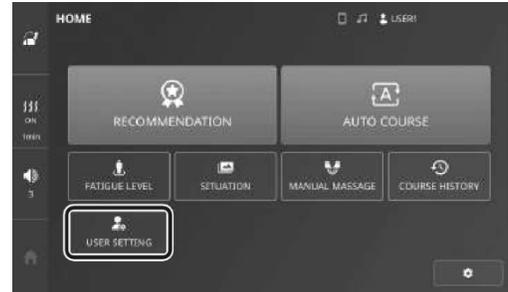


2. Toque "FORMA DE ESPALDA" ("BACK SHAPE").




3. Pulse "REGISTRAR" para iniciar la detección de la posición del hombro.

- No aleje la cabeza del respaldo durante la detección.
- Toque "MODIFICAR" para ajustar la línea de espalda ya registrada.

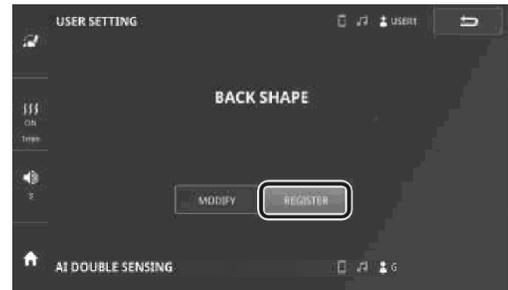


4. Una vez finalizada la detección, pulse "OK" para registrar la posición del hombro. Si la posición del hombro no coincide, utilice "Volver a detectar" o "Ajuste" para ajustar.

- Toque "Volver a detectar" para iniciar de nuevo la detección.
- Si se produce un error de detección, pulse "Volver a detectar" para iniciar de nuevo la detección.

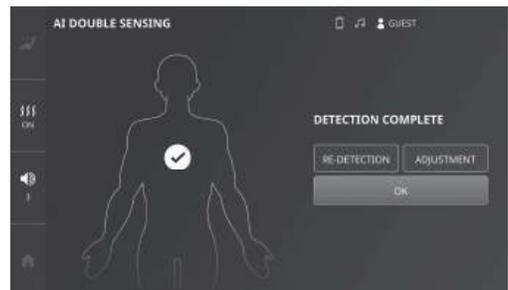

● Ajuste manual

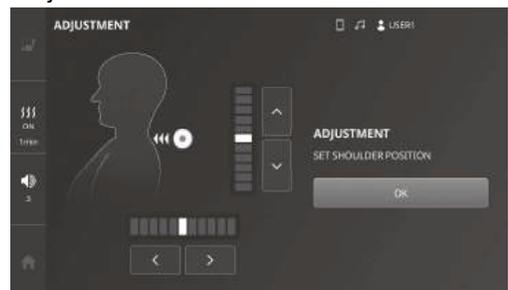

Acerca del modo personalizado por el usuario

5. Una vez completado el registro de la posición del hombro, se inicia la detección de la línea dorsal. Una vez finalizada la detección, pulse "OK" para registrar la línea dorsal. Si desea realizar más ajustes, utilice "PERSONALIZACIÓN" para realizarlos.

- No aleje la cabeza del respaldo durante la detección.
- Tras pulsar "PERSONALIZACIÓN", la línea dorsal puede ajustarse manualmente. Consulte "Acerca de la personalización de la línea de la espalda" a continuación.
- Toca "Volver a detectar" para iniciar de nuevo la detección.
- Si se produce un error de detección, pulse "Volver a detectar" para iniciar de nuevo la detección.



Acerca de la personalización de la línea de la espalda

Generalmente, el masaje se realizará con una fuerza uniforme a lo largo de la línea de la espalda, pero la fuerza estándar del masaje en cada parte se puede modificar personalizándola según las preferencias del usuario.

(Por ejemplo)

Para aumentar la intensidad en las zonas de cabeza y hombros:

- 1- Una vez detectada la línea dorsal, toque "Personalizar".
- 2- Seleccione el área que desee ajustar con el botón de Subir/Bajar ① para mover los rodillos de masaje y masajear con el valor estándar de Tapure.
- 3- Ajuste al nivel de referencia deseado de Tapure con el botón Izquierda/Derecha ②. (Se pueden configurar hasta ± 7 niveles).
- 4- Ajuste la zona del cuello y hombros según la línea dorsal reforzada y registrelo tocando "OK" ③.



6. Cuando se registra la línea dorsal, comienza el ajuste de la posición de la cintura. Ajuste la posición de los rodillos de masaje y pulse "OK" para iniciar el registro. Cuando aparezca "Registro completado", el registro habrá finalizado.

- No desconecte la alimentación durante el registro. La información no se registrará.



Personalizar reclinación

1. Inicie sesión en "Usuario 1" o "Usuario 2" y pulse "Configuración de usuario".




2. Pulse "RECLINAR".



3. Toque "REGISTRAR" para ver el menú de personalización.

- Ajuste el ángulo del respaldo, el ángulo de las piernas y la longitud de las piernas.
- El ángulo de las piernas no puede ser inferior a la posición de espera.
- Toque "MODIFICAR" para ajustar el ángulo de reclinación ya registrado.

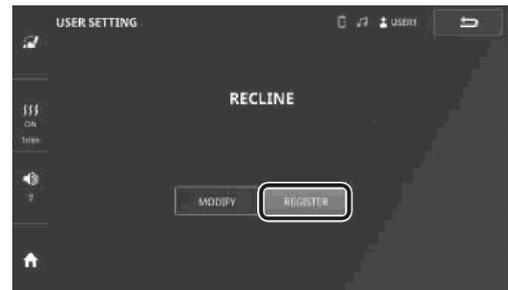

4. Pulse "OK" para iniciar el registro. Cuando aparezca "Registro completado", el registro se habrá completado.

- No apague la alimentación durante el registro. La información no se registrará.
- Cuando se registra la personalización de reclinación, el respaldo y las piernas se moverán automáticamente a la posición registrada la próxima vez que el usuario se conecte.




- Posición de espera



Acerca del modo personalizado por el usuario

Masaje de aire personalizado

1. Inicie sesión en "Usuario 1" o "Usuario 2" y pulse "Configuración de usuario".

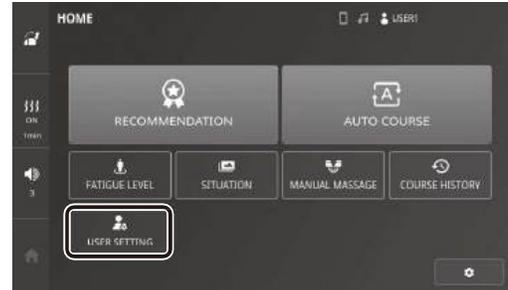


2. Pulse el botón "AIRE".



3. Pulse "REGISTRAR" para visualizar la pantalla de personalización e iniciar la operación de ajuste de la intensidad para cada parte.

- El masaje de aire se realiza en cada parte del cuerpo sucesivamente. Pulse "OK" cuando alcance la intensidad deseada.
- La operación se repite dos veces para cada zona. Si no presiona "OK", la intensidad se fija en "7". Toque "MODIFICAR" para ajustar la intensidad ya registrada.

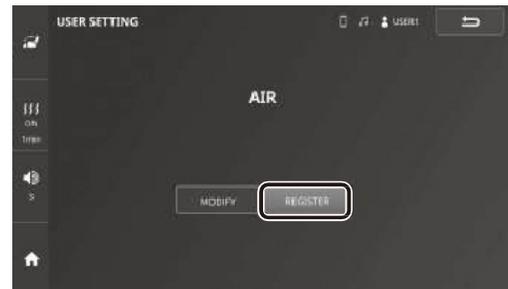


4. Confirme la potencia en la pantalla de confirmación y pulse "OK" para iniciar el registro. Cuando aparezca "Registro completado", el registro habrá finalizado.

- La intensidad también se puede ajustar en la pantalla de confirmación.
- No apague la alimentación durante el registro. La información no se registrará.




Configuración de lote (para restablecer el lote)

1. Inicie sesión en "Usuario 1" o "Usuario 2" y pulse "Configuración de usuario".

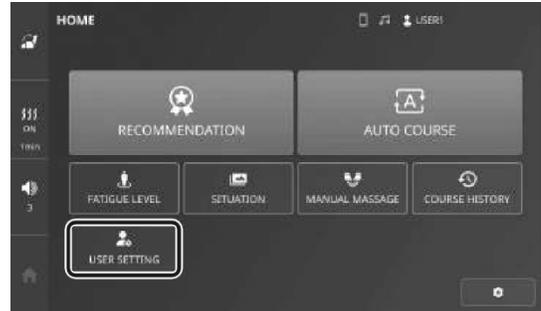


2. Pulse "Ajustes por lotes" para iniciar los ajustes de personalización en el orden de forma de la espalda, reclinación y aire.

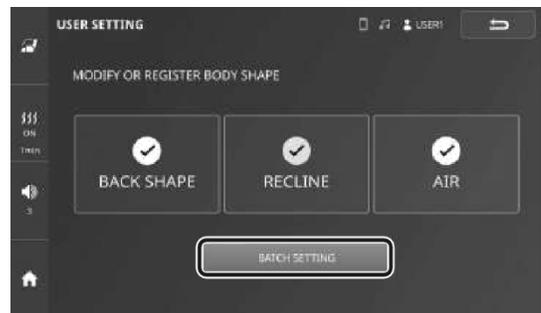

Para cambiar a otros modos

1. Cuando quieras cambiar a otro usuario o pasar al "modo invitado", vuelve a encender el sillón.

- Cuando cambie a otros modos, por favor reinicie la alimentación antes de la operación.

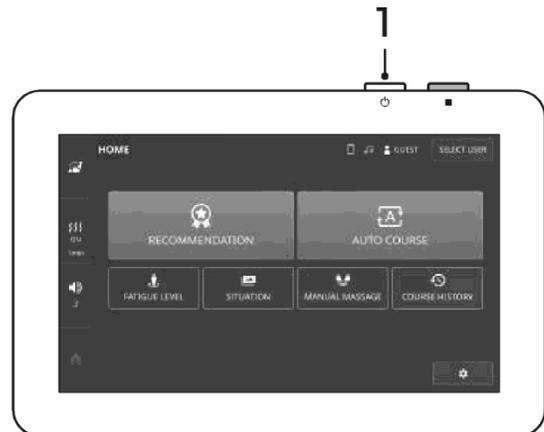


Para activar el bloqueo para niños

La función "Bloqueo para niños" desactiva la recepción de los botones para evitar que los niños manejen el sillón accidentalmente.

1. Asegúrese de que el respaldo y las piernas estén recogidos.

- Las funciones AI no pueden accionarse durante el bloqueo para niños. Por favor, levante primero el respaldo y guarde las piernas.

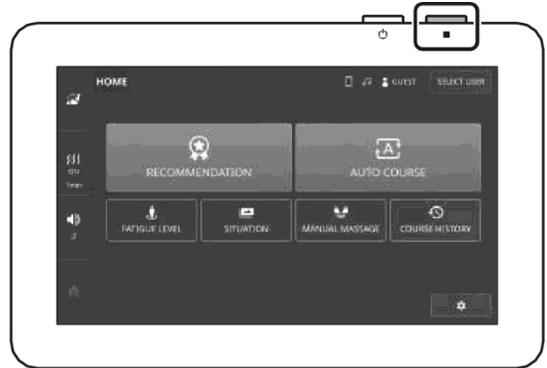

Mantenga presionado durante 3 segundos

2. Mantenga pulsado el "Botón de parada de emergencia" en la pantalla de inicio durante unos 3 segundos, sonará un "bip" y aparecerá la pantalla de bloqueo para niños.

- Después de establecer el bloqueo para niños, la pantalla desaparecerá si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos. Pulse el "botón de encendido" para mostrar la pantalla de bloqueo para niños.
- Para liberar el bloqueo para niños, realice la misma operación o vuelva a conectar el interruptor de alimentación de la unidad principal.



Mantenimiento y almacenamiento

Cómo mantener el sillón



PELIGRO

No conecte ni desconecte el enchufe de alimentación con las manos mojadas. Podría producirse una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación. Podría producirse una descarga eléctrica. No limpie con bencina, diluyente de pintura o alcohol. Esto puede causar incendio o descarga eléctrica.

Tela /Almohadilla trasera / Almohada

1. Absorba con un paño agua con detergente neutro y apriete firmemente.
 2. Limpie la parte sucia con el paño.
 3. Límpielo con un paño bien apretado que contenga agua.
 4. Séquelo de forma natural después de limpiarlo con un paño seco.
- No planchar. Puede dañar la tela.
 - Tenga cuidado al usar el sillón con ropa de color, ya que el color puede adherirse a las telas o prendas.
 - Después de usar el sillón con productos de peluquería, coloque algo como una toalla en el lugar donde toca la cabeza, ya que puede causar un cambio de color o agrietamiento

Pieza de resina

1. Absorba con un paño agua con detergente neutro y apriete firmemente.
 2. Limpie la parte sucia con el paño.
 3. Límpielo con un paño seco para no dejar restos de detergente.
- No utilice detergente en polvo, ya que puede provocar arañazos, decoloración y grietas.

Control remoto y zona inferior del sillón (caja de control)

Limpiar con un paño seco.

- No lo limpie con un paño mojado. Puede causar un mal funcionamiento.

Cómo almacenar



PELIGRO

No lo use ni lo guarde en baños ni en lugares con mucha humedad. Podría producirse electrificación, incendios, accidentes y moho.

Después de limpiar la suciedad y el polvo del sillón, guárdelo en un lugar donde la temperatura, la humedad y el polvo sean menos adversos.

Cuando no vaya a utilizar el sillón durante un tiempo prolongado, cubralo y evite que entre polvo.

* No guarde el sillón cerca de una estufa ni en lugares donde esté expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo. Puede causar decoloración y deterioro.

Mantenimiento y almacenamiento

Cómo mover la unidad principal



ADVERTENCIA

No mueva el sillón mientras haya personas u objetos sobre él. Podrían producirse daños o lesiones. No arrastre el sillón ni lo mueva con las ruedas por el suelo, donde podría rayarse fácilmente. No tire del cable de alimentación o del cable del mando a distancia con la pierna ni lo enrolle con las ruedas. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

Para moverlo con las ruedas

Haga flotar la parte delantera de la unidad principal, empújela y muévala.


- Al bajar la unidad principal, hágalo lentamente para que no se golpee la parte de la pata.



Cuando más de 2 personas lo levantan

Desmonte la unidad del brazo y el reposabrazos, y después de bajar la parte del respaldo, sujete la parte inferior de la parte delantera y del respaldo con las manos (Consulte el diagrama de abajo) y luego levante y mueva.


- Para más información sobre el método de desmontaje de la unidad de brazo, consulte "Desmontaje de la unidad de brazo". (P.12)
- Como es muy pesado, se necesitarán seguramente más de 2 personas.
- Por favor, vigile sus pasos con cuidado y bájele lentamente.

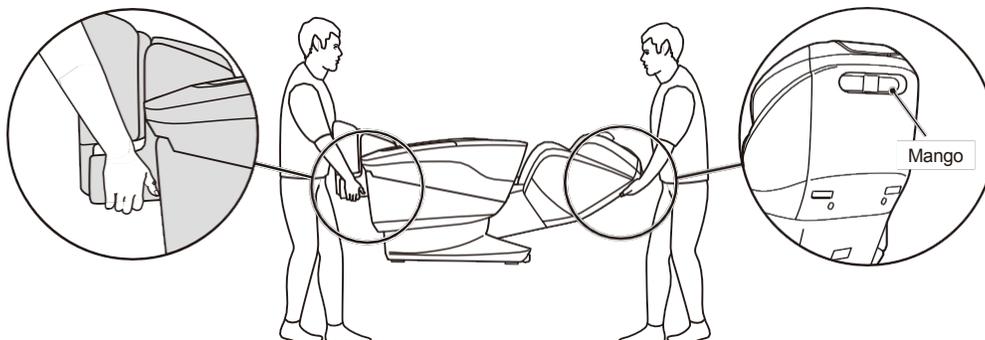

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P1 La fuerza izquierda y derecha son diferentes. Y siento que la diferencia es notable.

R Para una mejor sensación, en relación con la adopción de un mecanismo en el que el roce se golpeará mutuamente, inevitablemente, la operación podría tener lugar en el rodillo de masaje en posición deslizada. De este modo, sientes que hay una diferencia entre la fuerza de la izquierda y la de la derecha. Pero no es una falla.

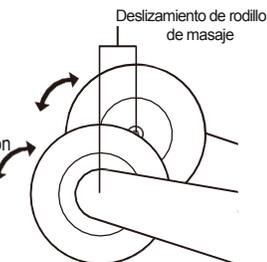

P2 ¿Por qué se tambalea el soporte del control remoto?

R Compruebe los tornillos de montaje del soporte y vuelva a apretarlos si están flojos.

P3 La pierna no encaja bien en la parte de las piernas...

R Ajuste expandiendo y estrechando la parte de la pierna.

- Para personas de baja estatura: Eleve la parte del respaldo y eleve la parte de las piernas.

P4 Debo ir al hospital, ¿puedo utilizarlo?

R Consultar con el médico en el hospital y luego usar. "Estimulación por presión táctil" se refiere a la acción que promueve la circulación sanguínea para el masaje aliviando la tensión en los músculos. Según la enfermedad puede haber riesgo de empeorar. Consulte con su médico.

P5 ¿Se puede utilizar quitando el brazo?

R No, no es posible. El suministro de aire y el escape de aire quedarán expuestos, se acumulará basura y polvo y esto será la causa del fallo.

P6 ¿Se puede extender una alfombra caliente debajo del sillón?

R Como existe peligro de incendio, deténgase. El calor generado por la alfombra caliente podría generar fuego.

P7 ¿Se puede bajar la pierna hasta la posición de reposo?

R Cuando se utiliza el masaje con aire en los pies o con rodillo en los pies, el reposapiés no baja a la posición de reposo. Apague la función de aire de pies o rodillo de pies.

P8 Durante el masaje, se producen algunos ruidos chirriantes. ¿Está bien?

R No hay nada anormal en la estructura. Consulte "Solución de problemas".

P9 ¿Pueden utilizarlo personas de estatura inferior a 150 cm o superior a 185 cm?

R Sí, puede utilizarlo. Durante la detección, es posible que la posición de los hombros no coincida aunque ajuste la posición de los hombros, por lo que debe proceder de la siguiente manera.

- Persona de baja estatura: Levante el respaldo y la parte de las piernas.
- Persona alta: Baje el respaldo y la parte de las piernas.

P10 El brazo no llega a la unidad de brazo. ¿Qué hay que hacer?

R Levante el respaldo y ajuste la posición del brazo

P11 ¿Se enrojecen el hombro y el brazo después del masaje de aire de hombro/brazo?

R Después del uso, pueden quedar "marcas" del masaje. Eso se debe al masaje. Desaparecerá a su debido transcurso del tiempo. Y, mientras que hace el masaje de aire de hombros, evite la ropa que expondrá los hombros.

P12 Aunque se realice la detección, la posición de los hombros no coincide.

R Siéntese cómodamente, incline la cara para que descanse en el respaldo y después haga el sensado. Esto puede ajustarse manualmente.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P13 Es difícil notar las diferencias al cambiar la intensidad del rodillo de pie.

R A veces es difícil sentir las diferencias de intensidad ya que la intensidad del rodillo de pie se ajusta por la fuerza de presión por el aire de las aletas de la parte del pie.

P15 Al estirar los pies, a veces se oye un chirrido.

R Puede generarse ruido, pero no es un fallo. En la estructura, cuando el actuador eléctrico está aislado de la pierna, puede generarse ruido.

P14 Aparece la pantalla "Bloqueo para niños" y el control remoto no es operable.

R Se ha activado el bloqueo para niños. Mantenga pulsado el "Botón de parada de emergencia" durante aproximadamente 3 segundos para desbloquear el seguro para niños. Consulte "Configuración del bloqueo para niños" para obtener más información.




P16 La acción de masaje automático es diferente de lo habitual.

R Incluso en el mismo programa, el número de operación, el número de veces de las protuberancias de aire al momento del movimiento de los rodillos de masaje puede cambiar dependiendo del ajuste de la fuerza, el movimiento de inclinación, la presión a lo rodillos.

P17 Explique las dimensiones de la unidad principal.

R Consulte el siguiente diagrama.

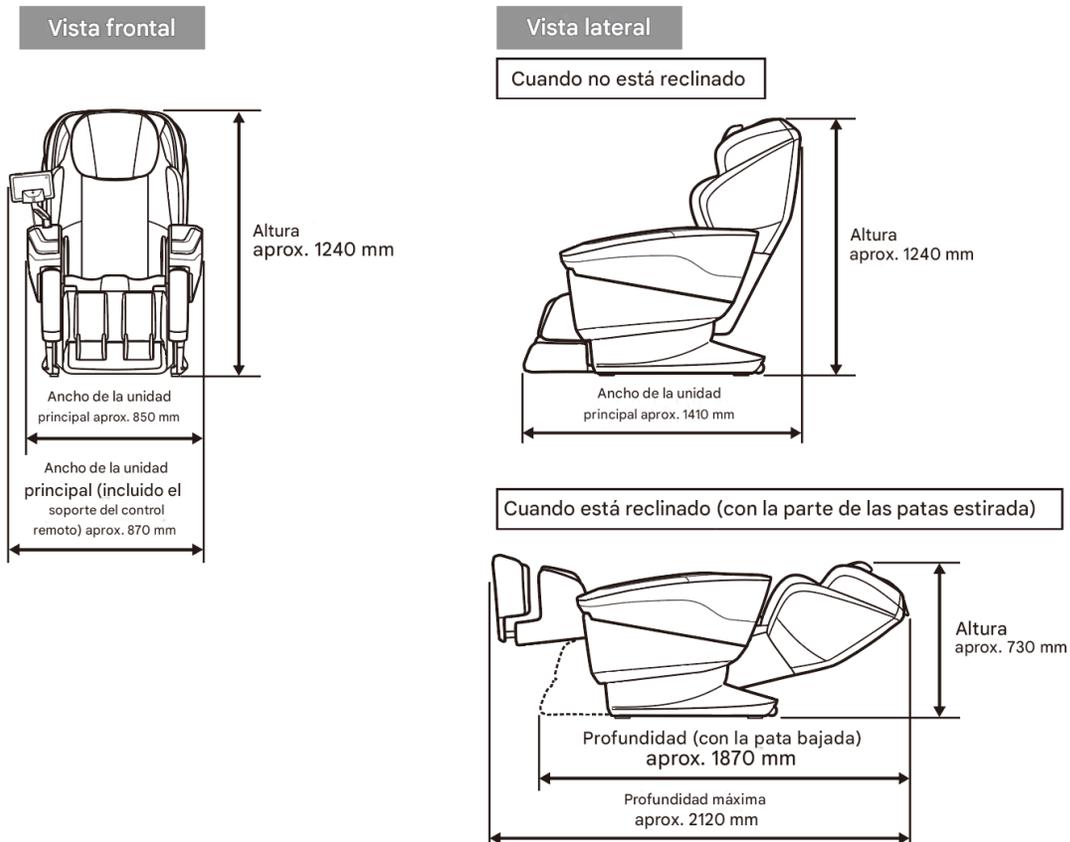

Solución de problemas



No remodelar y tampoco analizar o reparar por sí mismo, hay posibilidades de lesiones debido a fuego (o) funcionamiento anormal.

Es posible que se encuentre con los siguientes fenómenos durante el masaje. Al ser debidos al diseño mecánico, no tienen nada que ver con la vida útil del producto

- Se produce un ruido de "traqueteo" cuando los rodillos de masaje suben y bajan.
- Se produce un crujido del engranaje y del motor durante el masaje.
- Se produce un ruido de fricción cuando los rodillos de masaje rozan la tela de la cubierta (particularmente durante el proceso de kneading).
- Se produce un ruido de traqueteo durante el masaje de "TAPPING" o "WAVELET".
(Particularmente cuando el masaje se mueve de los hombros a la espalda).
- En el masaje de "KNEADING", "TAPPING" o "WAVELET", la velocidad del masaje puede variar según la fuerza de los rodillos de masaje.
- El ruido cambia cuando se cambia la velocidad del masaje.
- Se produce un rugido del motor cuando se aplica carga al sillón.
- Se produce un ruido de "cuco" mientras, en el modo automático, los rodillos de masaje se ajustan automáticamente a la posición de vaivén para que el sillón se adapte a la forma del cuerpo del usuario
- El ruido del compresor y el ruido del escape de aire se producen durante el masaje de aire.
- Se produce un ruido cuando se infla el airbag.
- Se produce un chirrido durante el masaje del hombro
- Se produce un chirrido cuando el respaldo o el asiento se reclinan (Sonido chirriante)
(La altura de los rodillos de masaje entre la izquierda y la derecha es diferente.)
- Se utiliza un mecanismo para permitir que los dos rodillos de masaje golpeen alternativamente. Ocurre inevitablemente y este no es el problema)

Síntomas	Puntos de control	Solución del problema
El sillón no se pone en marcha	¿Están desconectados el enchufe o el conector del sillón?	Enchufe la clavija de alimentación a la toma de corriente e introduzca el conector en la entrada.
	¿Está apagado el interruptor de alimentación de la parte inferior situada detrás del cuerpo principal?	Encienda el sillón.
El sillón se detiene a medio camino. (El control remoto no funciona)	¿Está el respaldo en contacto con el cuerpo principal o similar?	Aleje el sillón del cuerpo principal. APAGUE y ENCIENDA el interruptor de alimentación de la parte inferior situada detrás del cuerpo principal.
	¿Se aplica alguna carga a los rodillos de masaje? (En caso de que se aplique alguna carga a los rodillos de masaje, un mecanismo de seguridad se encarga de detener todas las funciones).	Separe el cuerpo del respaldo por un momento, apague y encienda el interruptor de encendido de la parte inferior detrás del cuerpo principal y vuelva a operar desde el principio.
El respaldo no se puede reclinar	¿Están desconectados el enchufe o el conector del sillón?	Enchufe la clavija de alimentación a la toma de corriente e introduzca el conector en la entrada.
	¿El respaldo está en contacto con la pared o similar?	Alejar el sillón del cuerpo principal.
¿Las piernas no se bajan hasta la posición de retracción?	¿Se encuentra encendido el masaje de aire de piés o el rodillo de piés?	Apague el masaje de aire de piés y el rodillo de piés.

Solución de problemas



código de error

La pantalla puede mostrar "ERROR: Apague y encienda la alimentación principal". En este caso, siguiendo las instrucciones, apague y encienda el interruptor principal.

Si el producto no funciona con normalidad incluso después de tomar las medidas anteriores, o si se produce el mismo problema con frecuencia, ponga el interruptor de alimentación de la unidad principal en "OFF", desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y, a continuación, póngase en contacto con el lugar de compra o con nuestro centro de atención al cliente. Al hacerlo, infórmenos del número de error que aparece en pantalla.

Acerca de la conexión BLUETOOTH

■ No se puede emparejar

- La distancia entre el sillón de masaje y el dispositivo BLUETOOTH no debe ser superior a 1 m.
- Reinicie el sillón de masaje e inténtelo de nuevo.
- Después de restablecer la información de emparejamiento, vuelva a realizar el emparejamiento.
- Ajuste las especificaciones del dispositivo BLUETOOTH.
Lea las instrucciones del dispositivo BLUETOOTH para conocer el método de conexión.
- Confirme las especificaciones del dispositivo BLUETOOTH. El dispositivo debe ser compatible con la especificación BLUETOOTH, A2DP y GATT, de lo contrario no se puede utilizar.

■ No se puede conectar

- No se puede conectar a través de BLUETOOTH con más de un dispositivo al mismo tiempo.
 - Cuando el sillón de masaje ya se está conectando con un dispositivo a través del BLUETOOTH, no puede conectarse con otros dispositivos nuevos. Compruebe si hay otros dispositivos conectados.
 - El funcionamiento de los dispositivos BLUETOOTH (smartphone, etc.) varía en función del dispositivo, por lo que le recomendamos que lea las instrucciones de su dispositivo BLUETOOTH.
- ※ Cuando el icono "🎵" del control remoto está en blanco, significa que el sillón se está conectando con un BLUETOOTH de otro dispositivo. Después de desconectar el dispositivo no utilizado, compruebe si el icono BLUETOOTH del control remoto es gris.

■ La conexión tarda mucho / No se conecta automáticamente

- Conectar manualmente
- ※ Los smartphones almacenarán la información de conexión del BLUETOOTH: para iOS vaya a ajustes → "Mis dispositivos" de BLUETOOTH, y para Android vaya a ajustes → dispositivos conectados → dispositivos conectados anteriormente, confirme si aparece "Massage Chair H22" y conecte (el nombre puede variar según la versión).
- Por favor, restablezca la información de emparejamiento y realice el emparejamiento de nuevo.
- ※ El sillón puede guardar la información de conexión BLUETOOTH de hasta 5 dispositivos conectados.
Puede emparejar más de 5 dispositivos, pero la memoria sólo puede guardar la información de conexión de hasta 5 dispositivos.
Cuando se ha conservado la información de 5 dispositivos, si desea conservar la información de un nuevo dispositivo y permitir que se conecte automáticamente, debe utilizar la función de restablecimiento de la información de emparejamiento para descartar la información que se ha conservado.

El funcionamiento del BLUETOOTH (smartphone, etc.) varía en función del dispositivo, por lo que le recomendamos que lea las instrucciones de su dispositivo BLUETOOTH.

Acerca de la conexión BLUETOOTH

■ No hay sonido / El sonido es demasiado bajo

- Encienda el sillón de masaje y el control remoto. Cuando aparezca la pantalla de selección del menú del programa, encienda el dispositivo BLUETOOTH.
- Suba el volumen del dispositivo BLUETOOTH.
- Retire todos los obstáculos entre el sillón de masaje y el dispositivo BLUETOOTH y acorte la distancia entre ambos.
- Cambie la salida de voz del dispositivo BLUETOOTH a la conexión BLUETOOTH.

■ Ruptura de sonido / Ruido / Interrupción de sonido

- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH.
- Al reproducir música, si otros dispositivos BLUETOOTH están intentando conectarse o buscando, puede haber ruido e interrupción del sonido.
- Mantenga el horno microondas, la red LAN inalámbrica y otros dispositivos alejados del sillón de masaje.
- Mantenga el televisor, la radio y los aparatos con sintonizador incorporado alejados del sillón de masaje. Estos aparatos pueden afectarlo.
- Desactive el ajuste del ecualizador del dispositivo BLUETOOTH.
- Retire todos los obstáculos entre el sillón de masaje y el dispositivo BLUETOOTH, y acorte la distancia entre ambos.

El funcionamiento del BLUETOOTH (smartphone, etc.) varía en función del dispositivo, por lo que le recomendamos que lea las instrucciones de su dispositivo BLUETOOTH.

Puntos de control



ADVERTENCIA

Cuando utilice el sillón después de un tiempo, vuelva a leer el manual de usuario y compruebe que funciona normalmente para volver a utilizarlo.



Inspección: ¡importante!

Asegúrese de hacer una inspección para una vida útil más larga.

¿Existen estos síntomas?

- El sillón desprende olor a quemado.
- El cable de alimentación o el enchufe están sobrecalentados.
- La electricidad se enciende o apaga con el cable de alimentación movido.
- Existen otras anomalías.

Interrumpir el
uso

Para evitar accidentes o problemas, apague el interruptor principal, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente.

Especificaciones del producto

Nombre del producto		sillón de masaje	
Número de modelo		JP-4000	
Clasificación	Fuente de alimentación (50-60 Hz)		220-240V
	Tiempo nominal		30 minutos
	Consumo (50-60 Hz)		125W (Potencia en espera: 0,3 W)
	Consumo del motor		100W
	Consumo de energía del calentador eléctrico		25W
Rango de ajuste de la velocidad del masaje Mecha (rodillos de masaje)	Kneading		Ajuste en 4 niveles (aprox. 8-30 ciclos/min)
	Tapping		Ajuste en 4 niveles (aprox. 250-650 ciclos/min)
	Arriba y abajo		Aprox. 1,0-5,4 cm/segundo
Presión de aire para masaje de aire			Aprox. 45 kPa
Estructura de seguridad			Clase I
Temporizador automático			Aprox. 7, 18, 30 min
Ángulo de inclinación	Respaldo		Aprox. 117°-164° min
	Reposapiés	Quando el masaje de aire está activado	Aprox. 56°-84° min
		Quando el masaje de aire está desactivado	Aprox. 0°-84° min
Dimensiones	Posición vertical		Aprox. Ancho 850 x Prof. 1410 x Alto 1240 (mm)
	Posición reclinada (Incluye soporte para mando a distancia)		Aprox. Ancho 870 x Prof. 2120 x Alto 730 (mm)
Peso			Aprox. 96 kg
Tapicería			Cuero ecológico PVC, poliéster
País de origen	Fabricado en Japón		

Especificaciones de comunicación

Modo de comunicación	Conformidad con la especificación estándar BLUETOOTH Ver.4.1
Salida	Especificación estándar BLUETOOTH Clase de potencia 1,5
Distancia máxima de comunicación	a menos de 10 m con buena visibilidad
Banda de frecuencia utilizada	Banda de frecuencia de 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,480GHz)
Método de modulación	GFSK </4 DQPSK 8DPSK
Especificaciones de compatibilidad con BLUETOOTH	A2DP 1.3, GATT
Código de soporte	SBC (44,1 kHz)
Protección de contenidos	SCMS-T



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de FUJIRYOKI se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Funciones disponibles en cada modo

Función	Modo Invitado	Modo Personalizado por el Usuario
Función personalizada	—	○
Reiniciar información personalizada	—	○
Reiniciar información de emparejamiento	○	—
Función de bloqueo de seguridad para niños	○	—